



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5

オートアップデート・インストールする場合



DTX Studio™ Implant



DTX Studio™ Go

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Content

Introduction	03
Computer Guidline	04
DTX Studio™ Implant Install (for Windows®)	06
DTX Studio™ Implant Install (for Mac-OS®)	41
Contact Support	54



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Introduction

- ✦ ご使用のコンピュータースペックをご確認ください。
- ✦ インターネットに接続されている事をご確認ください。
- ✦ ラップトップ型コンピュータをご使用の場合、充電が十分に残っている事をご確認ください。
- ✦ コンピュータの日付及び時間設定が正しい事をご確認ください。
- ✦ ライセンス契約が終了している場合はバージョンアップが出来ません。
- ✦ Practice Setupライセンスユーザーは、現在ご使用になっている全てのソフトウェアバージョンを合わせる必要があります。
- ✦ Computer Guidelineに記載されていないOS (**Windows®** & **Mac OS®**) には、対応していません。
- ✦ インストールに必要なファイルは、ソフトウェアを起動すると**オートアップロード**します。
アップロード終了後、ソフトウェアを再起動してください。
再起動後、ポップアップ・ウィンドウが表示されます。
インストールの開始をクリックすると、アップデート・インストールが開始されます。
画面に従ってインストールを行ってください。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Computer Guideline

Windows® 64-bit (Windows® 10)

Recommended requirements (推奨要件)

CPU : 最小条件

デュアルコアプロセッサ
3 GHz

RAM : メモリ

64bit 8GB 以上

Graphics card

ビデオメモリ1GB 以上
(4K/Retinaディスプレイは2GB以上)
OpenGL® (NVIDIA、AMDなど)
※Intelのグラフィックでは動作しません

Monitor : 解像度

推奨1920 X 1200 ※最小1920 X 1080
※4Kなどの大きな解像度では、表示は可能ですが文字が極端に小さくなってしまいます

Internet : 回線速度

ブロードバンドの回線が必要 推奨 アップロード3Mbps 以上、ダウンロード30Mbps以上

Disk space

患者様のデータは約250MB以上になります。
通常インストールに最低5GB、患者ファイル数に応じてそれ以上のディスクスペースが必要です。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Computer Guideline

MacOS® High Sierra, MacOS® Mojave, MacOS® Catalina, MacOS® Big Sur

Recommended requirements (推奨要件)

Devices

iMac / Mac Pro / Mac Book Pro(15インチ以上)
*2011年以降にリリースされたモデルがサポートされています。

CPU : 最小条件

デュアルコアプロセッサ
3 GHz
(Apple M1 Chip(SoC)搭載のコンピュータは現在検証中のため、動作保証は致しかねます。)

RAM : メモリ

Mac OS X 8 GB 以上

Graphics card

ビデオメモリ1GB 以上
(4K/Retinaディスプレイは2GB以上)
OpenGL® (NVIDIA、AMDなど)
※Intelのグラフィックでは動作しません

Monitor : 解像度

推奨1920 X 1200 ※最小1920 X 1080
※4Kなどの大きな解像度では、表示は可能ですが文字が極端に小さくなってしまいます

Internet : 回線速度

ブロードバンドの回線が必要 推奨 アップロード3Mbps 以上、
ダウンロード30Mbps以上

Disk space

患者様のデータは約250MB以上になります。
通常インストールに最低5GB、患者ファイル数に応じて、それ以上のディスクスペースが必要です。


Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Impalnt

DTX Studio™ Implant のインストール方法

Windows®

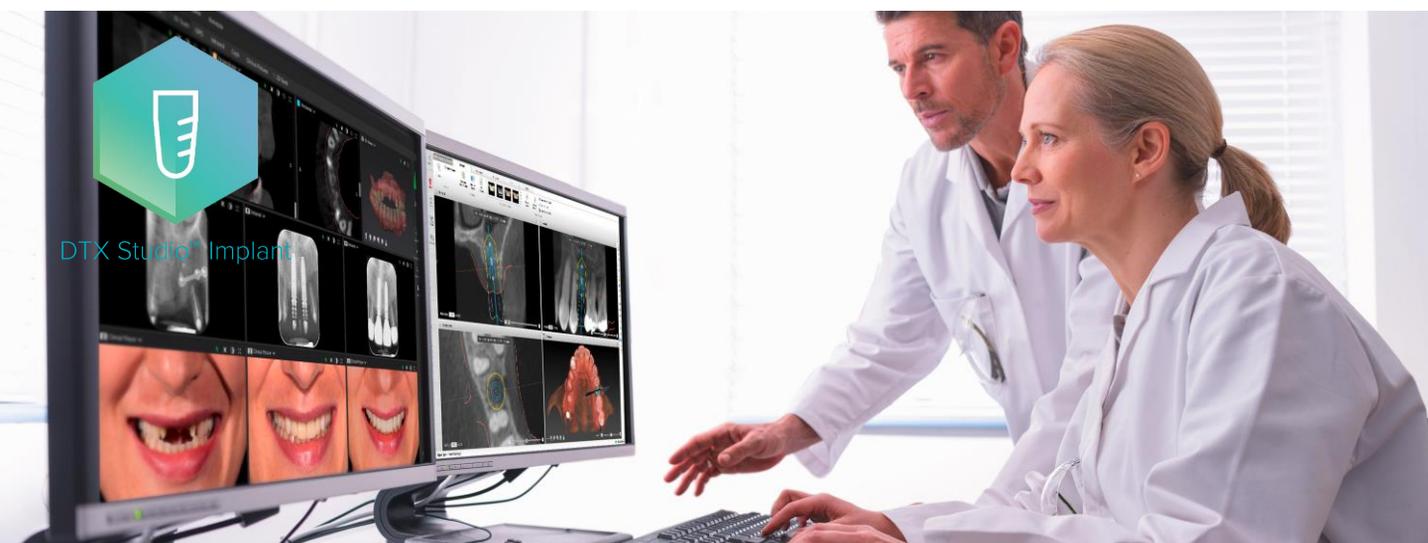

Windows®の場合

【DTX Studio™ Implant】もしくは【NobelClinician®】を起動します。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Install (Windows®)



DTX Studio™ Implant

1

コンピュータ上のアイコンを左クリックし、
DTX Studio™ Implantを起動します。



左クリックします



2

【パスワード】を入力し【サインイン】を
左クリックします。



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




DTX Studio™ Implant

Install (Windows®)

3

DTX Studio™ Implant起動後、トップ画面右下のアップロードセンターを左クリックします。

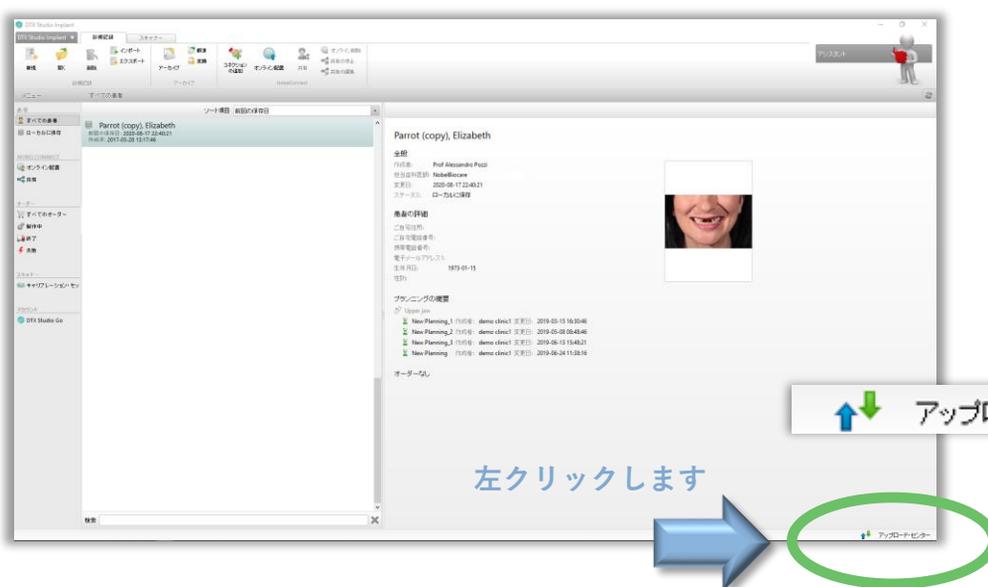


4

更新プログラムを確認します。
更新プログラムのダウンロードには、1時間程度の時間を要します。
(通信環境により左右されます)



アップロードセンター左側の通信(矢印)が消えたら、ダウンロードの終了です。

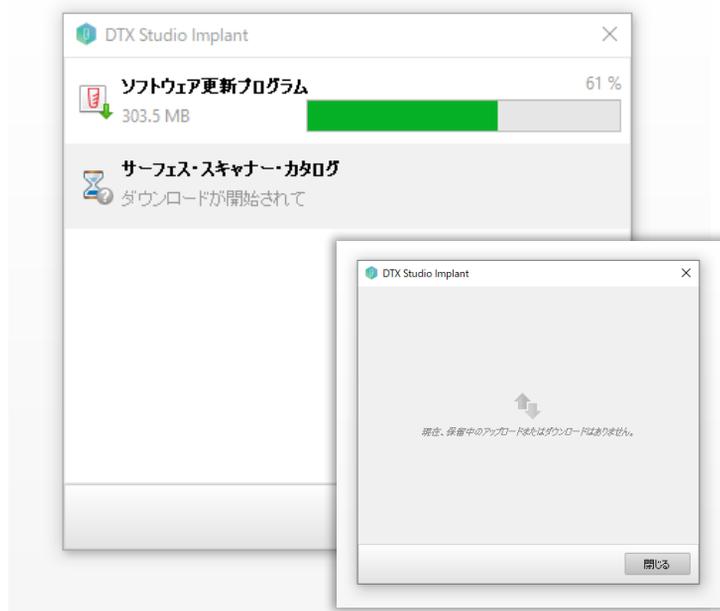

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




Install (Windows®)



DTX Studio™ Implant

5

DTX Studio™ Implant ソフトウェアを再起動します。
画面右上の【×】をクリックします。

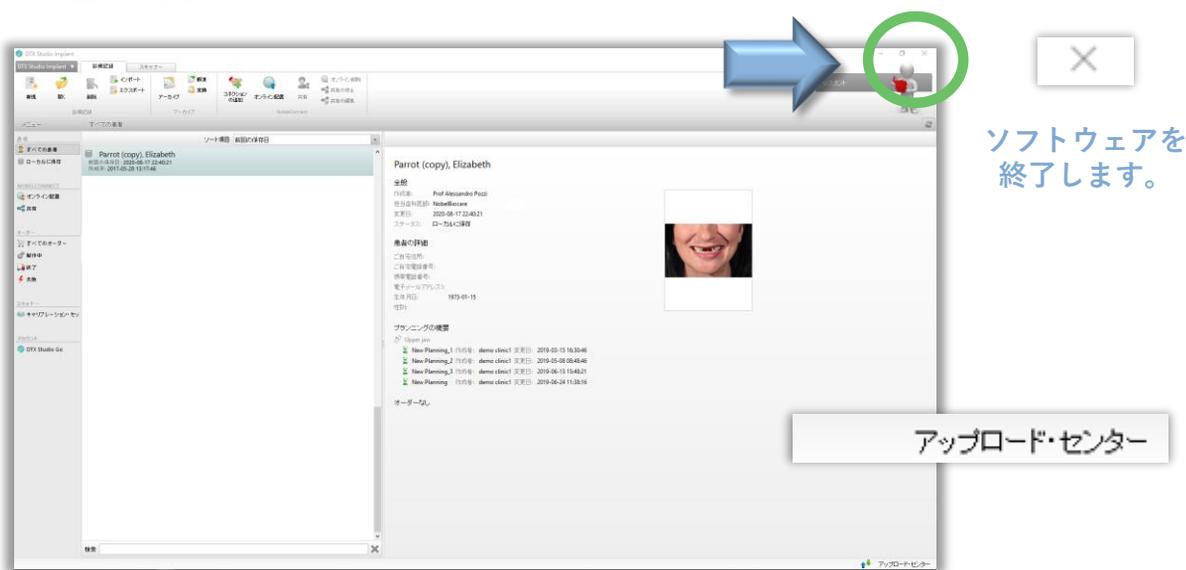

6

コンピュータ上のアイコンを左クリックし、
DTX Studio™ Implantを再起動します。



左クリックします



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




Install (Windows®)



DTX Studio™ Implant

7

インストールウィンドウが、ポップアップ表示されます。

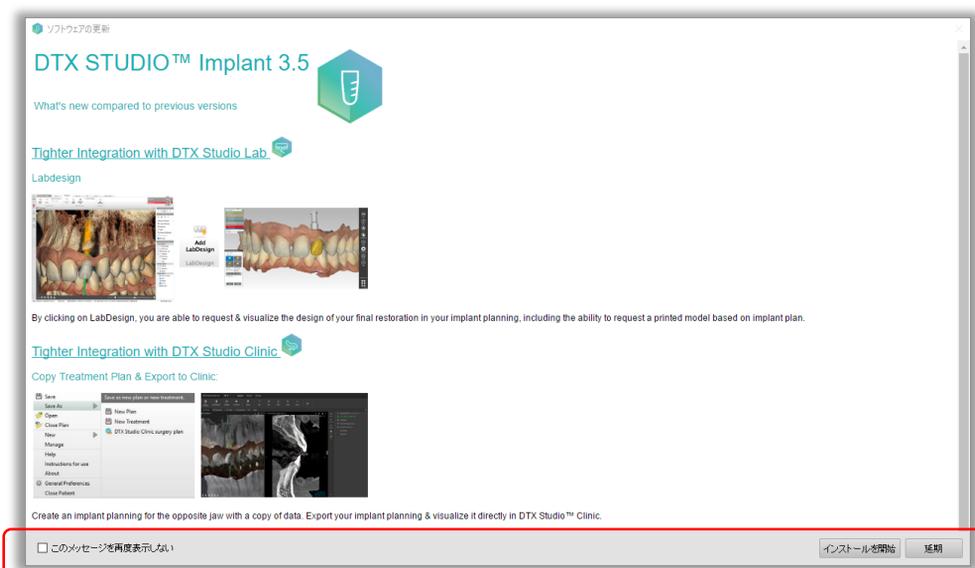

インストールの開始をクリックすると、インストールが開始されます。

このメッセージを再度表示しない

ポップアップ・ウィンドウを再度表示させません。
(インストールを延期させた場合のみ有効)

インストールを開始

Start install

インストールを開始します。
インストールの開始をクリックした場合のみ次
項へ進んでください。

延期


Cancel

インストールは行わず、現行のバージョンでソフト
ウェアを使用します。


Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



NobelClinician® V2.8

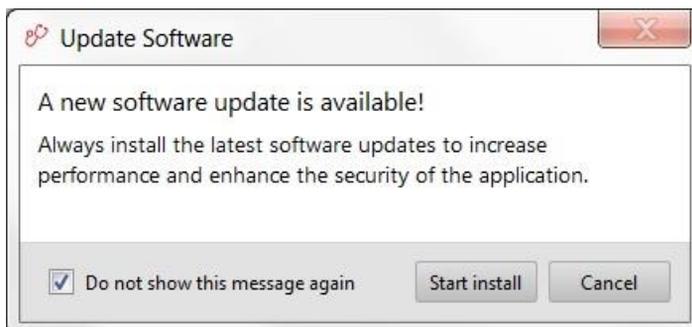

NobelClinician® V3.2

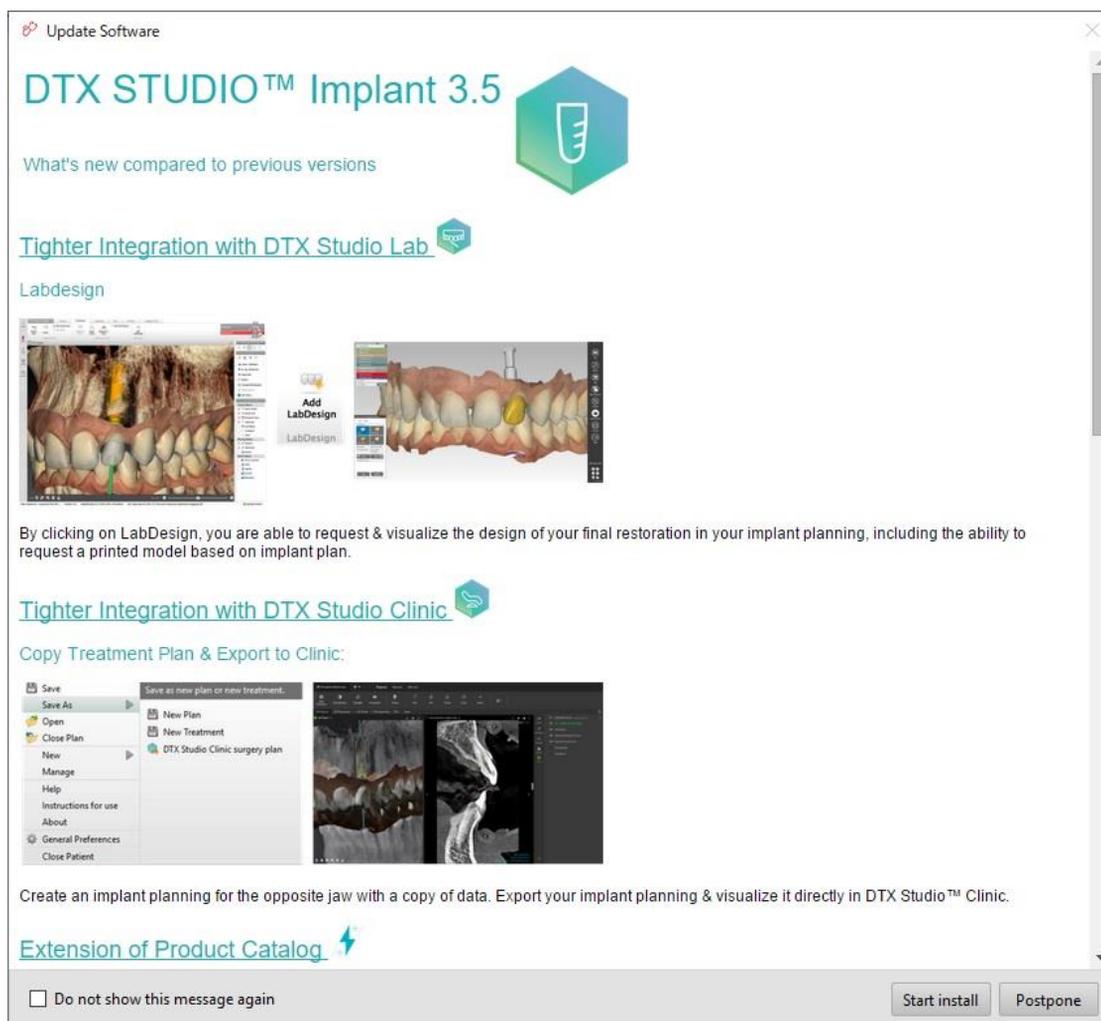

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




Install (Windows®)



DTX Studio™ Implant


8

インストール・ウィザードが起動します。

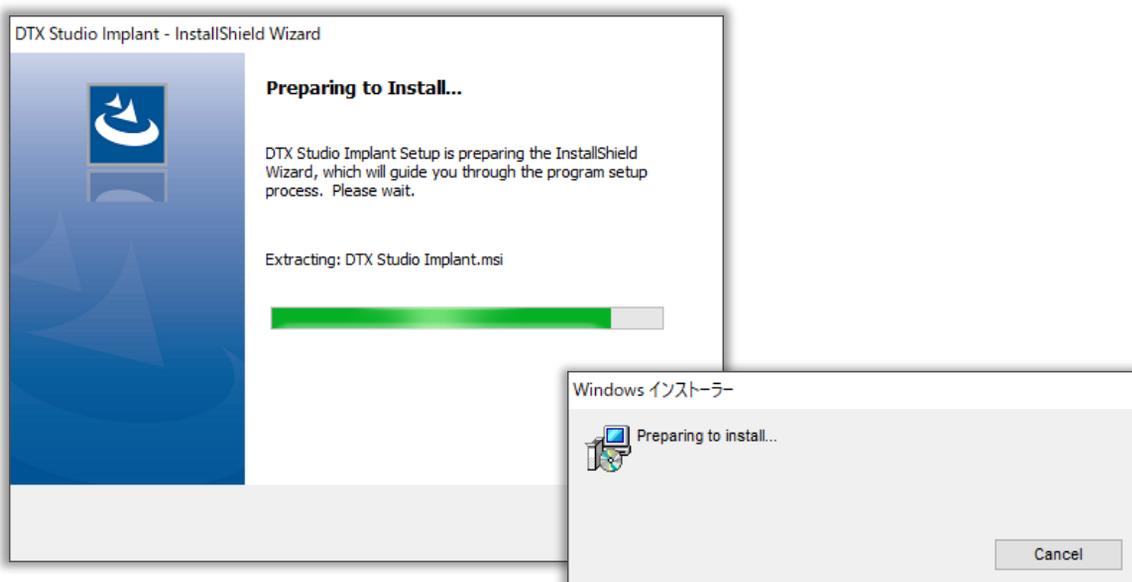

9

[Next]を左クリックします。

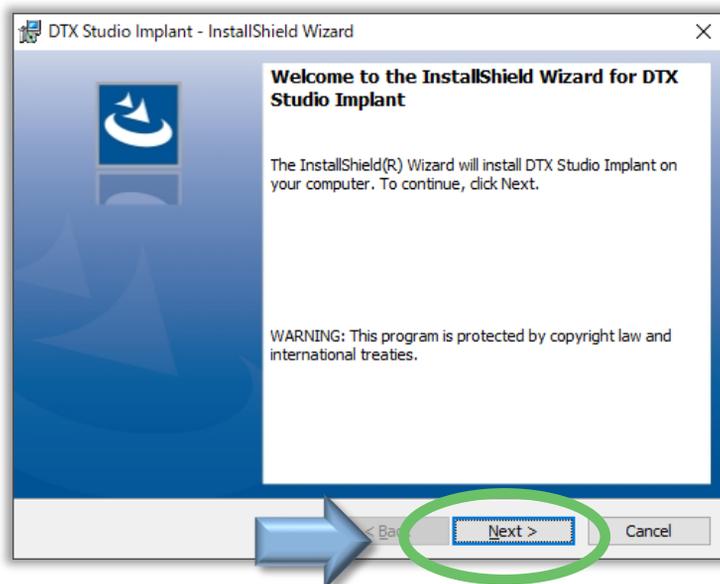

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant

Install (Windows®)

10

エンドユーザー契約に同意して、
【Next】を左クリックします。


【 I accept the term in the agreement 】
(上段)
にチェックを入れ、 【Next】 をクリック
します。



11

【Next】を左クリックします。

プログラムファイルのインストール先を設定
します。
基本的にはC ¥ Program Filesにインス
トールしてください。Nextを左クリックします。

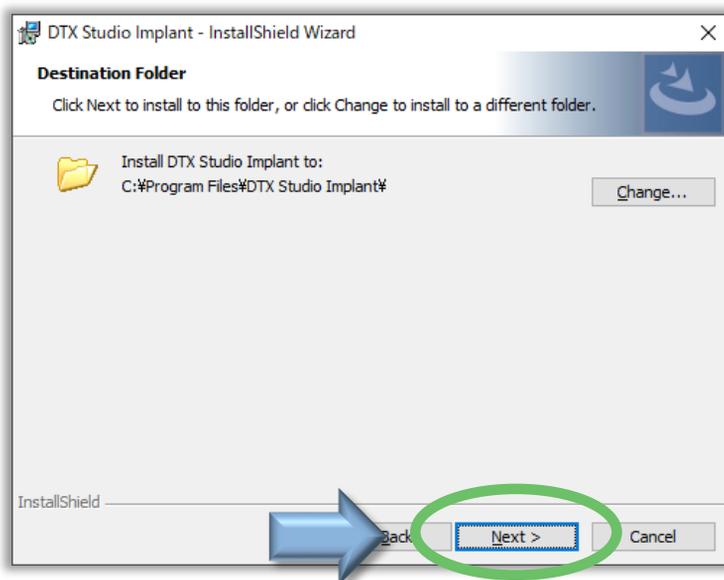

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Install (Windows®)




DTX Studio™ Implant

12

【Install】を左クリックします。


複数のファイルをインストールします。
インストール中はコンピュータの電源
を切らないよう、ご注意ください。

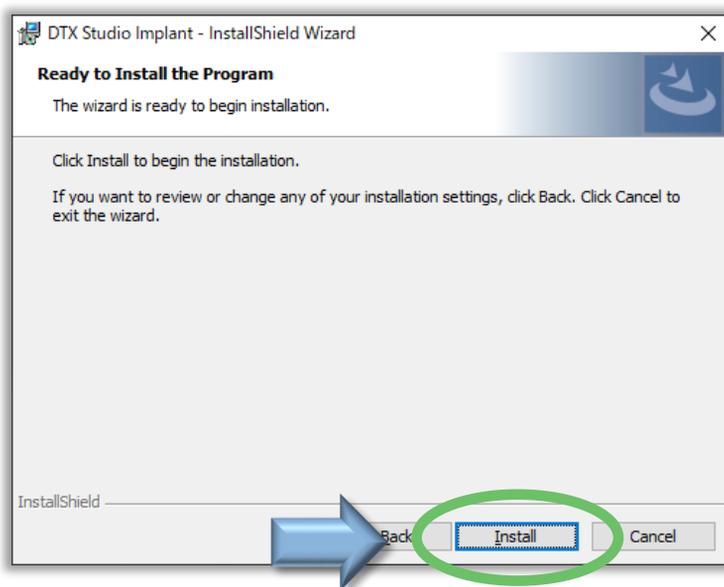

13

【Finish】を左クリックします。

コンピュータへのインストールが完了

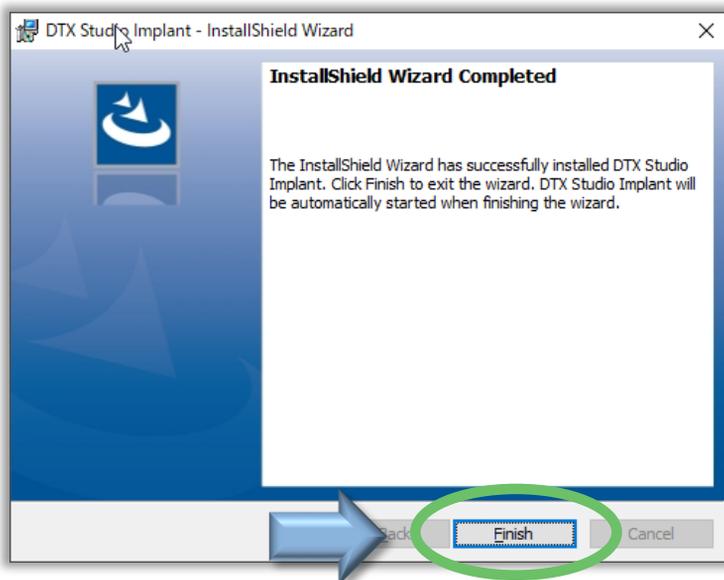

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Install (Windows®)




DTX Studio™ Implant

NobelClinician®を使用されている場合はStep.16へ進んでください。


14

インストール終了後、ソフトウェアが起動します。
【パスワード】を入力し、【サインイン】をクリックします。

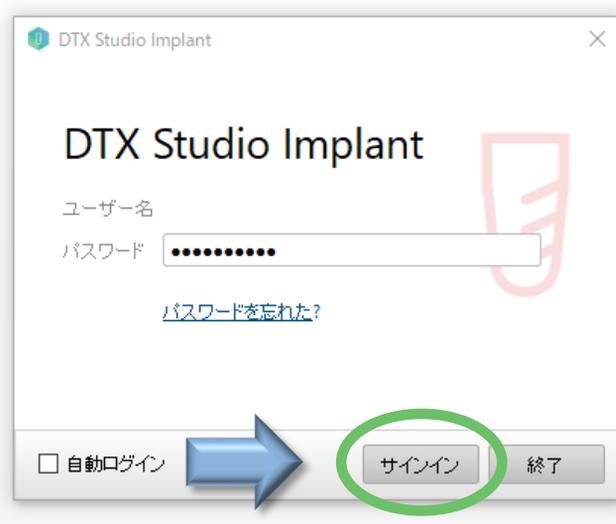

15

DTX Studio™ Implant V3.5.5の起動

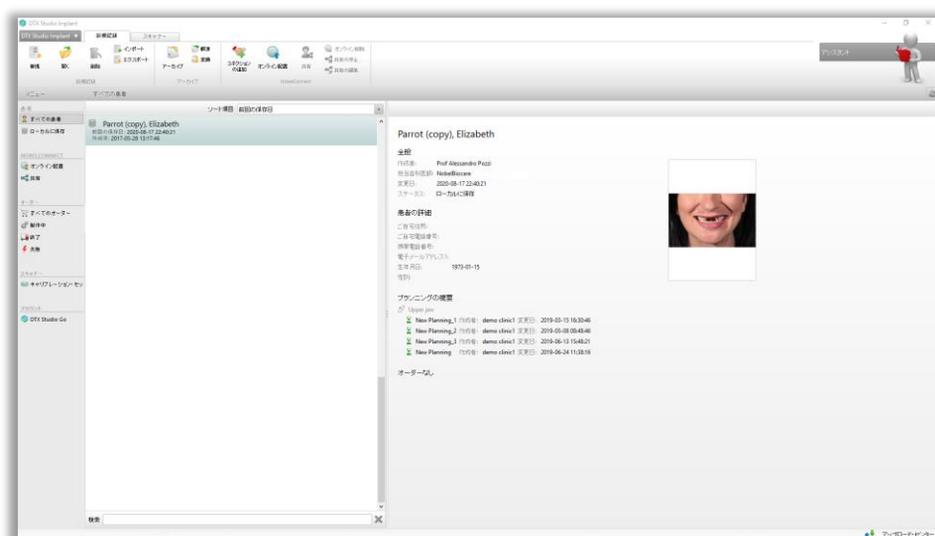

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant

Install (Windows®)

NobelClinician®を使用されている場合。

16


インストール終了後、【ライセンス認証】のインストール画面が開きます【Next】をクリックします。



17

【Installation Key】を入力します。(32桁の英数)

Installation Keyは、DTX Studio™
Go から確認できます。
次項をご確認ください。

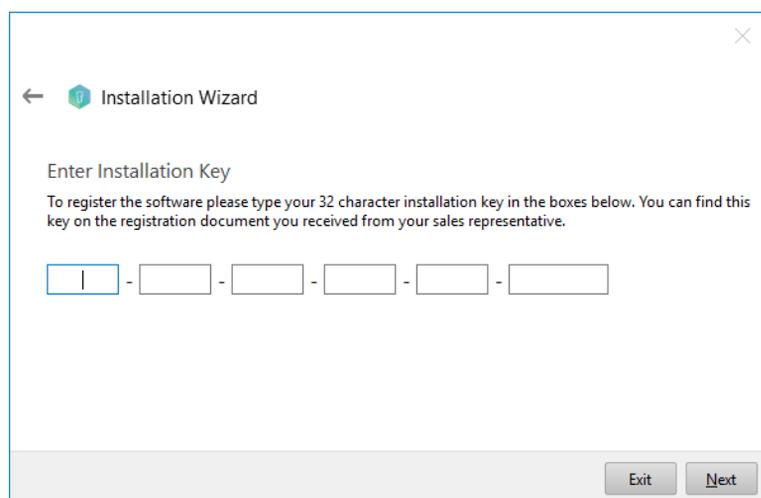

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

- 【 NobelClinician® 】を起動します。
- Menuから【DTX go】をクリックします。(Ver,3.2)
Ver,3.2 より以前のバージョンをご使用な場合は、<https://go.dtxstudio.com/> からアクセスしてください。
- DTX Studio™ Goのログイン画面が開きます。
- Usernameの確認方法は次項を参照ください。
- ご不明な場合または、Ver,3.2 より以前のバージョンをご使用な場合は、プロセラ・テクニカル・サポートまでご連絡ください。(ユーザー名確認後、Step18へ進んでください)

* 【 DTX Studio™ Go 】では、大文字、小文字、数字、記号を含む10桁のパスワード設定を要求されます。
【 DTX Studio™ Implant 】のパスワードも変更されます。

NobelClinician® V3.2 トップ画面

The image shows the NobelClinician V3.2 software interface. On the left, a sidebar menu contains various options, with 'DTX go' highlighted in a blue box. A blue arrow points from this menu item to a central overlay window. This overlay window, titled 'NOBEL BIOCARE DTX go', displays a login form for 'DTX Studio™ Go ログイン画面'. The form includes fields for 'Username' and 'Password', a 'Forgot password?' link, and a 'Log in' button. The background of the software interface shows a list of patients and various medical records.

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

【 NobelClinician® 】ユーザーネーム確認方法 V3.2のみ

- 画面左上の【NobelClinician】タブをクリックします。
- [Manage Account]を選択します。
- アカウント情報の[Username]をご参照ください。

NobelClinician® 画面

The image shows a composite screenshot of the NobelClinician software interface. On the left, a red box highlights the 'NobelClinician' tab in the top-left corner, with a red arrow pointing to it. A larger red box highlights the 'NobelClinician' menu, with a blue arrow pointing to the 'Manage Account' option. On the right, a blue box highlights the 'User details' section, with a green arrow pointing to the 'Username' field, which is masked with dots. Below this, the 'General' section shows the user's name as 'cocoroha Clinic' and the treating clinician as 'Akinoi Aoi'. The 'Patient Details' section shows a placeholder for a profile picture. The 'Planning Overview' section shows a list of planning orders with details like 'Created by', 'Date modified', and 'Status'.

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

18

[Forgot password?]をクリックします。

19

Usernameを入力して[Reset password]をクリックします。

Go
DTX STUDIO

Username

Password

[Forgot password?](#)

DTX Studio
Go

Enter your username and we will send you a link to reset your password.

Username **← Username**

If you forgot your username, please contact support.

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go




DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

20

ご登録されたメールアドレスへ【Reset Password】のリンクが送信されます。
ご登録メールを確認してください。

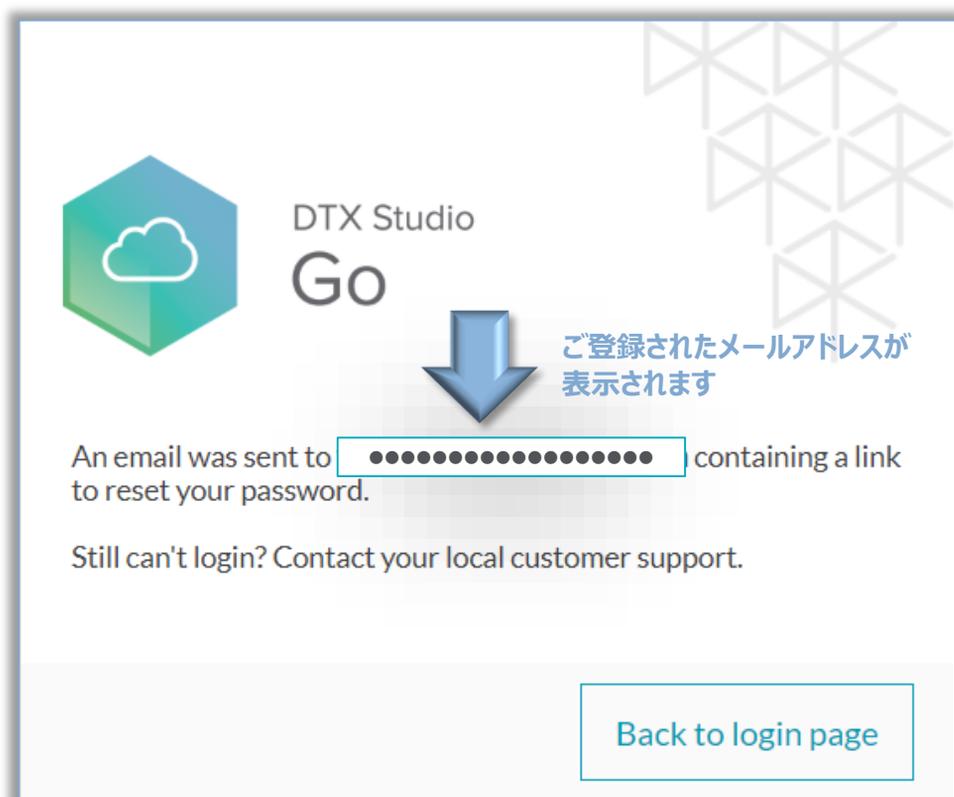

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法



21

ご登録メールアドレスに下記メールが届きますので、パスワードのリセット[Reset password]をクリックします。

22

パスワード設定してください。(10文字以上)
[Next]をクリックします。
DTX Studio™ Implantも同じパスワードを使用します。

パスワードは少なくとも10文字で、大文字、小文字、数値、特殊文字（!、@、#、\$、%、^、&）を含む必要があります。

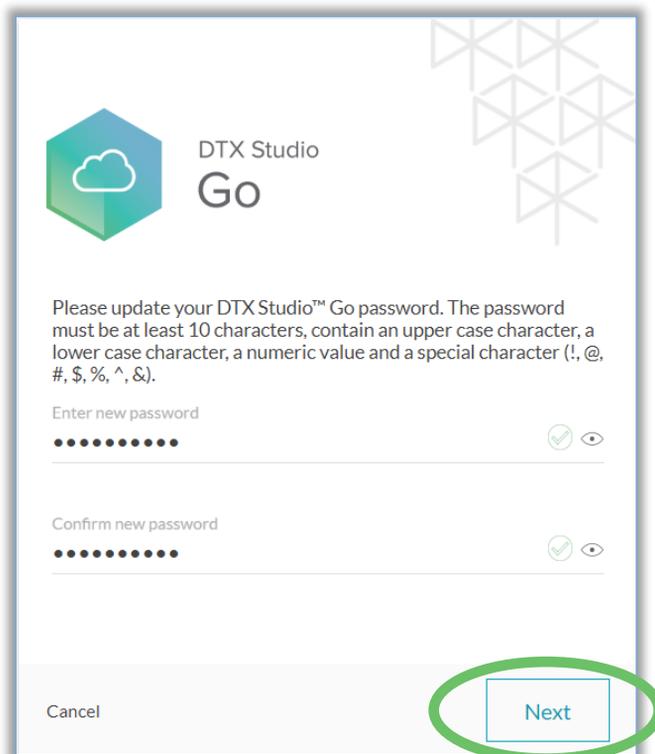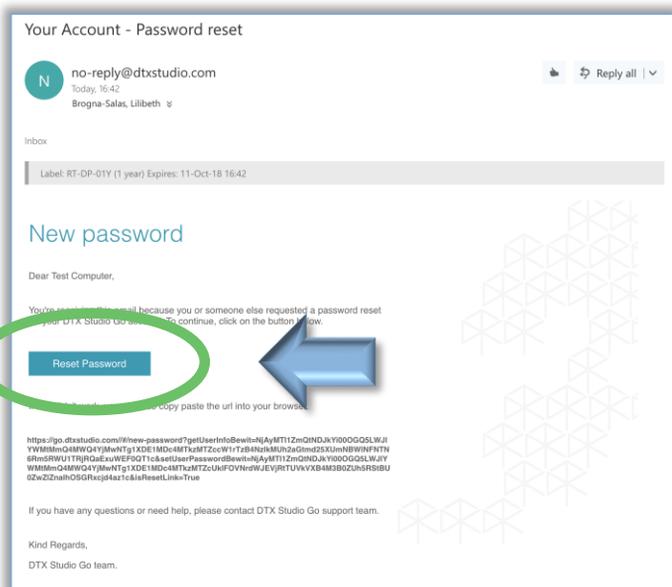

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

23

「DTX Studio™ Go」が開きログイン完了です。



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go


DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go の言語設定

日本語に設定します

24

言語設定を行います。
左側メニューから【Settings】を選択します。
【Edit】をクリックし、編集画面にします。

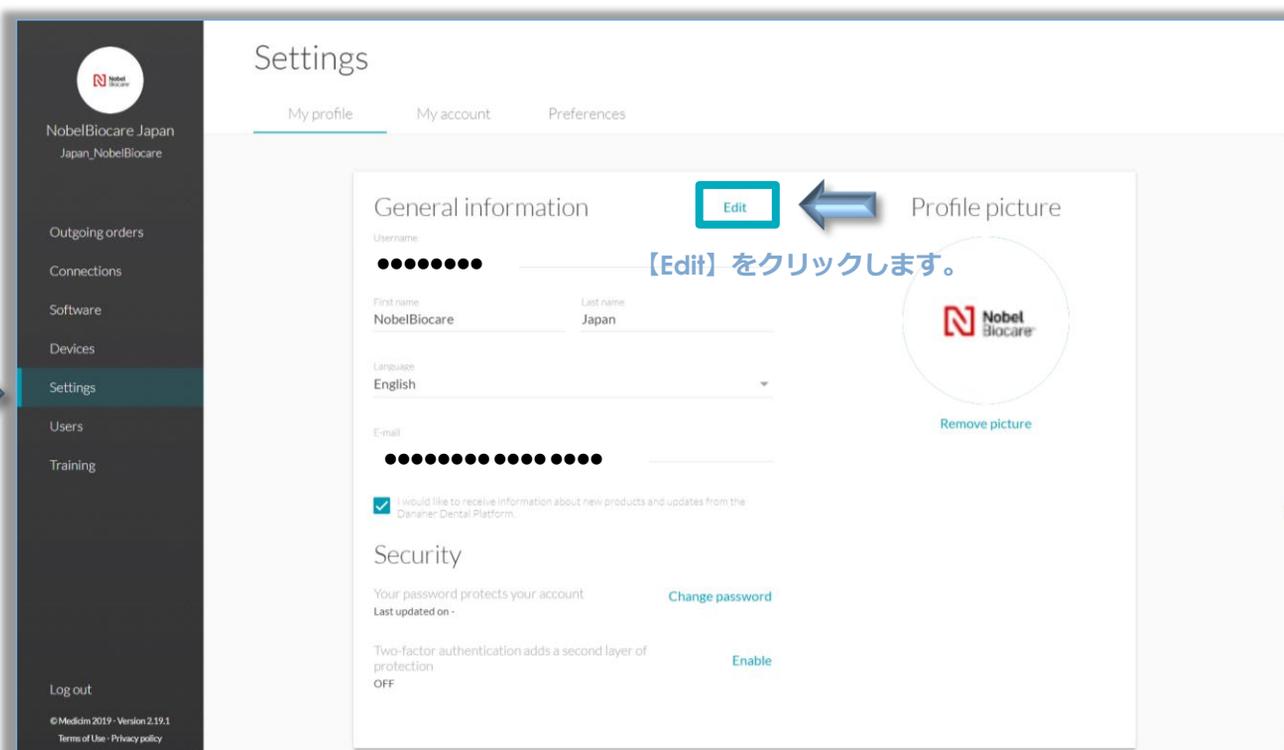

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go の言語設定

日本語に設定します

25

言語設定を行います。
【Language】の項をクリックします。
【日本語】(好みの言語)を選択します。
【Save】をクリックします。

General information

Username
●●●●●●●●

First name
NobelBiocare

Last name
Japan

Language
English

E-mail
●●●●●●●●●●

I would like to receive information about new products and updates from the Danaher Dental Platform.

Cancel Save

English
Español
Français
Italiano
日本語

【日本語】をクリックします

【保存】します

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go の言語設定

日本語に設定します

26

言語設定の完了です。



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Implant のダウンロード方法

インストールファイルをダウンロードする

27

DTX Studio™ Goの画面の左側メニューから【ソフトウェア】を選択します。
NobelClinicianのアイコンにカーソルを合わせ、【詳細】をクリックします。
DTX Studio™ Implant Viewerのアイコンと似ていますので、ご注意ください。

DTX Studio™ Go 【ソフトウェア】画面

Software

DTX Studio™

DTX Studio Implant...
インストールも取得

NobelClinician
v3.2.6 - Single User

詳細

NobelClinician
v3.2.6 - Single User

【ソフトウェア】を選択後、対象のSoftwareにマウスカーソルを合わせると表示される【詳細】を選択すると、対象のソフトウェア・ダウンロードページへ移ります。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Implant のダウンロード方法

インプラントカタログファイルをダウンロードする

29

続いて、インプラントカタログファイルをダウンロードします。
ソフトウェアの項目から【追加のリソース】タブをクリックします。

製品バージョンを【3.5.5】、OSを【Windows64】に設定し、
追加ファイルから【ImplantLibrary_3.5.ILF(2.94GB)】をダウンロードします。

DTX Studio™ Go 【ソフトウェア】画面

The screenshot shows the 'ソフトウェアの詳細' (Software Details) page for 'DTX Studio Implant'. The left sidebar has 'ソフトウェア' (Software) selected. The main content area shows the '追加のリソース' (Additional Resources) tab. Annotations with arrows point to the following elements:

- An arrow points to the '【追加のリソース】タブをクリックします。' (Click the 'Additional Resources' tab.) annotation.
- An arrow points to the 'バージョン 3.4.3' dropdown menu, with the annotation 'バージョンを3.5.5に合わせます。' (Match the version to 3.5.5.).
- An arrow points to the 'オペレーティング・システム Windows x64' dropdown menu, with the annotation 'OSを選択します' (Select OS).
- An arrow points to the '追加ファイル (4)' list, specifically to the 'ImplantLibrary_3.5.ILF (2.94 GB)' file, with the annotation 'クリックしインプラントカタログファイルをダウンロードします。' (Click to download the implant catalog file.).

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Implant のダウンロード方法

ライブラリーファイルをダウンロードする

30


ダウンロードしたファイルをコンピュータに保存します。

Windows® の場合

Web画面左下にダウンロードされます



ダウンロードされたファイルをPCへ保存します。

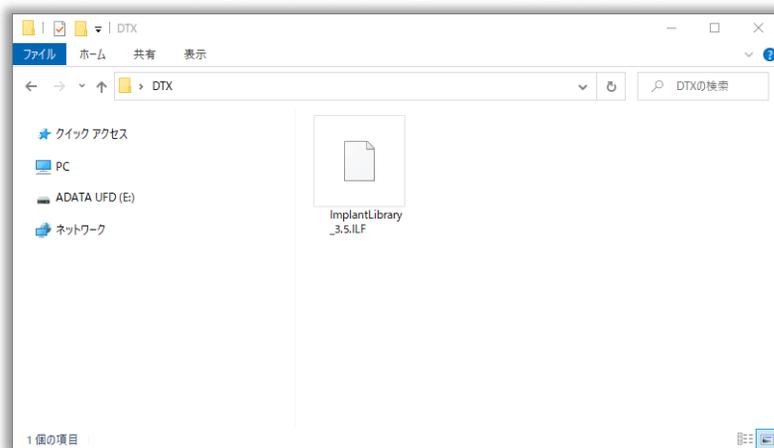

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Go

NobelClinician®のライセンス解除 (Windows®のみ)

31

ソフトウェア (インストールの詳細 / ライセンス解除)

新しいPCにインストールする場合は、以前ご使用していたPCのライセンスを解除する必要があります。
インストール詳細からライセンスの解除を行います

DTX Studio™ Goから【ソフトウェア】⇒【インストールの詳細】タブをクリックします。

DTX Studio™ Go 【ソフトウェア】画面

The screenshot shows the 'ソフトウェアの詳細' (Software Details) page for NobelClinician. The 'インストールの詳細' (Installation Details) tab is highlighted with a green box and a green arrow pointing to it from the text 'インストール詳細'. The page displays the following information:

- ソフトウェアの詳細**
ソフトウェア > NobelClinician
- NobelClinician** (Feedback link: フィードバックをお寄せください)
- Nobel Biocare® · 現在のバージョン 3.2.6
- 最新バージョンのダウンロード: Mac (3.5.5) | Windows (3.5.5)
- インストールの詳細 (highlighted)
- インストール・キー: DTX Studio™ Care ② ライセンスの種類
- インストレーションキー: 装置ID, ライセンス有効期限, ライセンスタイプ
- ユーザー (1/1) (Add user link: ユーザーの追加)
- インストール (1/2) table:

割り当て名	プラットフォーム	バージョン	インストール日
●●●●●●●●	Windows x64	3.2.6	7月 12, 2019

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go



NobelClinician®のライセンス解除 (Windows®のみ)

31

ソフトウェア (インストールの詳細 / ライセンス解除)

インストール状況の項目内にある、各PCのライセンスを確認します。
各ライセンスにカーソルを合わせると【...】が表示されますので、左クリックします。

【インストールの削除】を左クリックします。

(0/2)...未インストールの状態

(1/2)...2ライセンス、1インストールの状態

(2/2)...2ライセンス、2インストールの状態

DTX Studio™ Go 【ソフトウェア】画面

ソフトウェアの詳細
ソフトウェア > DTX Studio Implant

NobelClinician
最新バージョンのダウンロード Mac (3.4.3) Windows (3.4.3)

インストールの詳細 製品情報 追加のリソース バージョン履歴 (2)

インストール・キー
ライセンスの種類

ユーザー (1/1) ユーザーの追加

割り当て名	プラットフォーム	バージョン	インストール日
●●●●●●●●		3.4.3	9月17,2019
●●●●●●●●	Indows x64	3.2.6	9月17,2019

カーソルを対象のライセンスに合わせると右端に【...】マークが現れます。クリックし【インストールの削除】を選択するとライセンスが解除されます

割り当て名の編集
インストールの削除

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Go

NobelClinician®のライセンス解除 (Windows®のみ)

32

ソフトウェア (インストールの詳細 / ライセンス解除)

【削除】を左クリックし、ライセンスを削除します。
続いて、DTX Studio implantのライセンス認証を行います。
DTX Studio™ Implant画面を立ち上げます。

DTX Studio™ Go 【ソフトウェア】画面



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




DTX Studio™ Implant

Install (Windows®)

33

【Installation Key】を入力し、
【Next】をクリックします。


DTX Studio™ Go から確認した
インストールキーを入力します

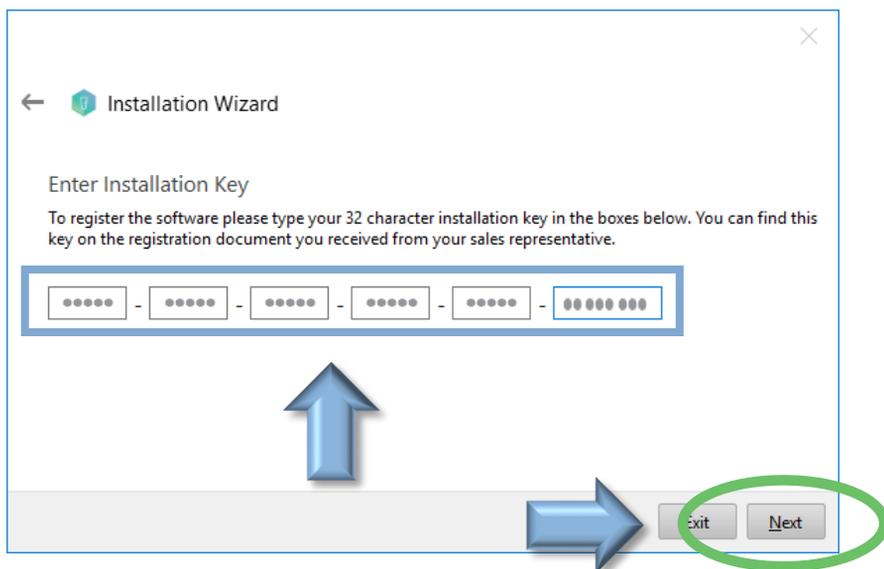

34

【Next】をクリックします。

DTX Studio™ Implantのフォルダー
(患者データ、オーダー履歴など)の
データを保存する場所を設定します。
デスクトップPCで、別のドライブ (HDD)
がある場合はそちらに設定する事をお奨
めします。

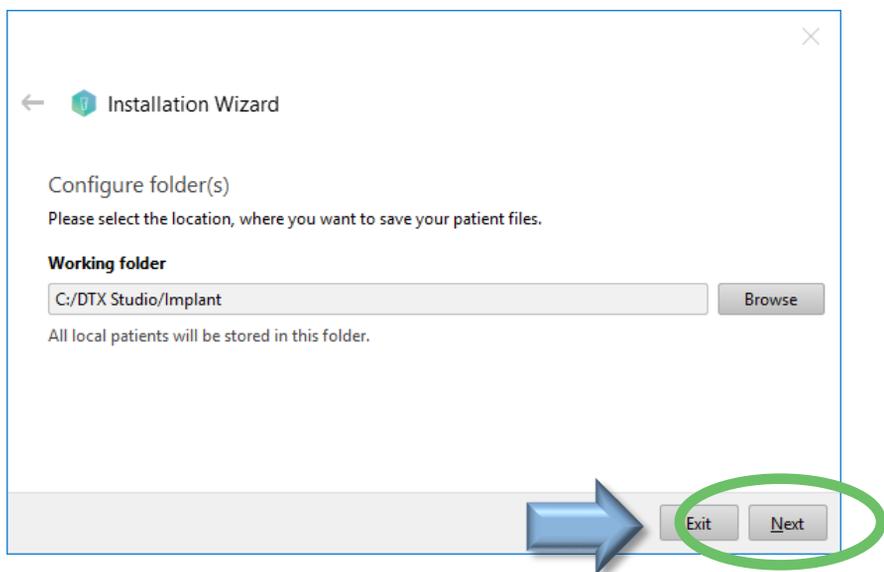

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant

Install (Windows®)


35

Install from local fileにチェックが入っている事を確認後、右側の【Select】ボタンを左クリックします。

【Install from local file】は、PCに保存してあるインプラントカタログファイルをインストールします。

【Install through the download server】は、「ImplantLibrary_3.5.ilf」ファイルをお持ちでない場合に選択します。通信環境に依存しますが、3時間強を要します。

表示されない場合があります。
表示されない場合は【STEP39】へ進んでください。

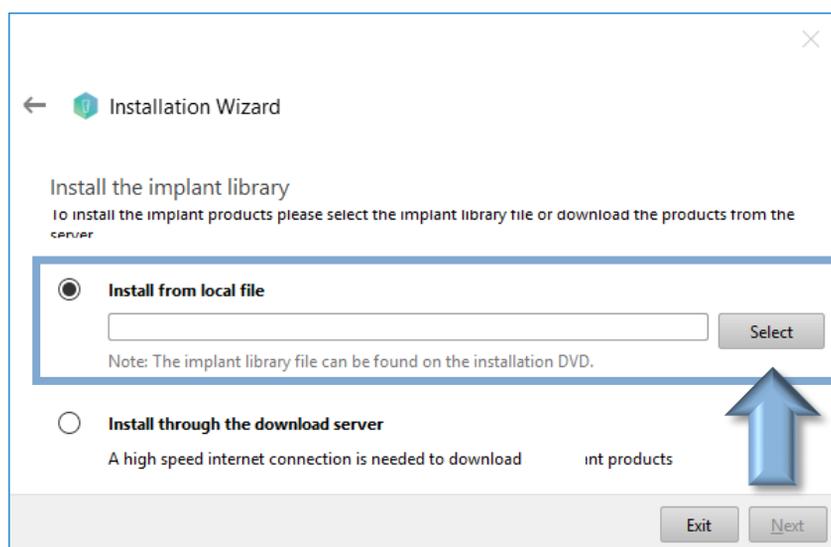


36

インプラントカタログファイルを選択します。

DTX Studio™ Goからダウンロードしたインプラント、アバットメントのカタログのファイルの場所を選択します。

保存したフォルダにある「ImplantLibrary_3.5.ilf」ファイルを選択します。

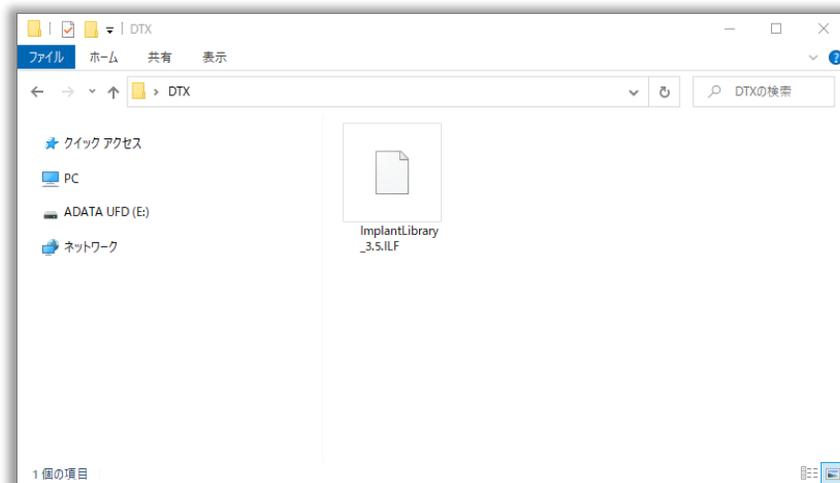

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




DTX Studio™ Implant

Install (Windows®)

37


インプラントカタログファイルが
選択されていることを確認し
[Next]をクリックします。

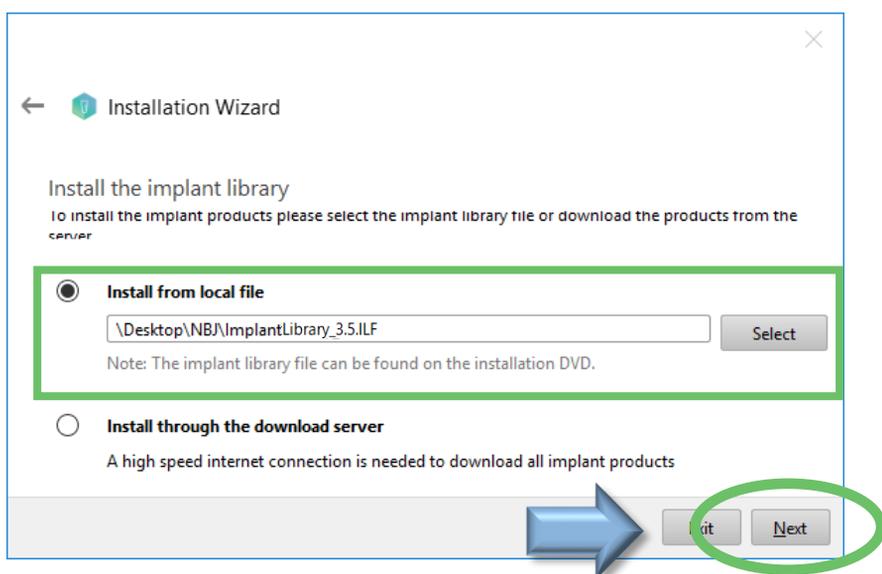

38

インプラントカタログファイルを
インストールします。

DTX Studio™ Implantのウィンドウが
出現し、ソフトウェアを自動起動します。

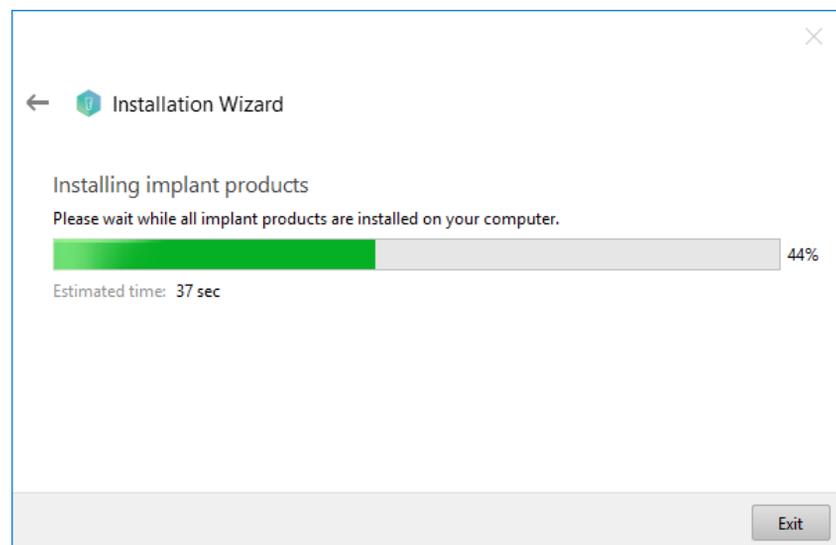

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




Install (Windows®)



DTX Studio™ Implant

39

インストールが完了したら、
【Finish】を左クリックします。

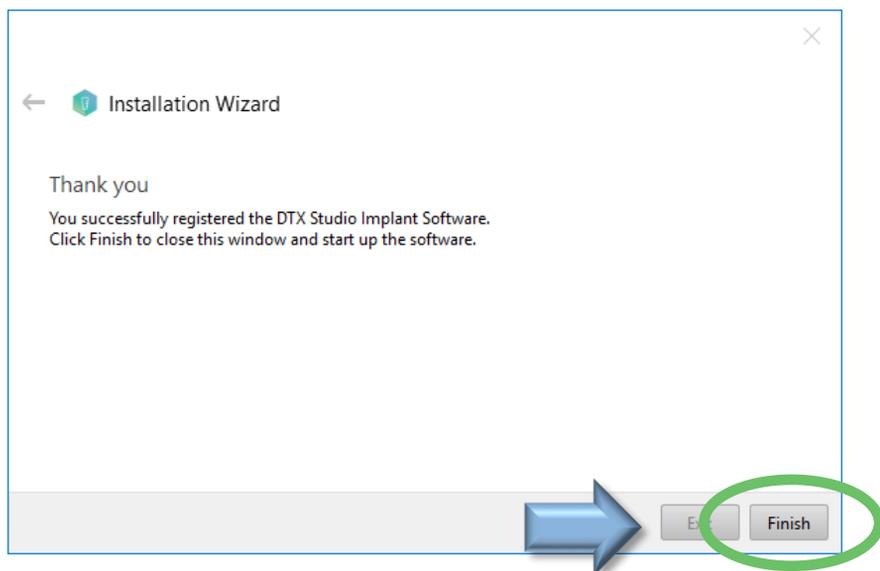


40

ソフトウェアの起動
DTX Studio™ Implantが
自動で起動します。

右の画面は、インストール中
に表示されることもあります。

インストール終了後、自動で
ソフトウェアが起動します。

起動に時間がかかる場合が
あります。

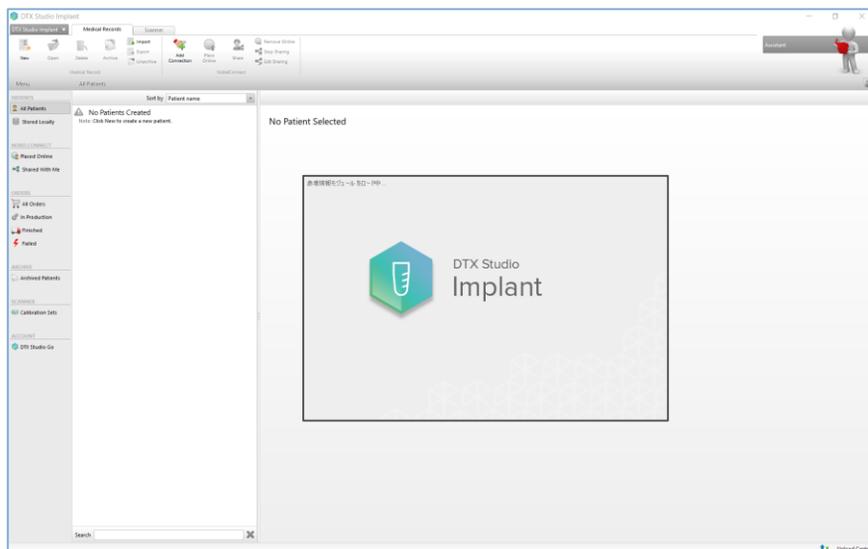

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant


Install (Windows®)

41

DTX Studio™ Implantのログイン画面に、パスワードを入力し、【Login】を左クリックします。

DTX Studio™ Implantのログイン画面にパスワードを入力します。

ユーザーネームとパスワードは、DTX Studio™ Goで設定したものと同じになります。

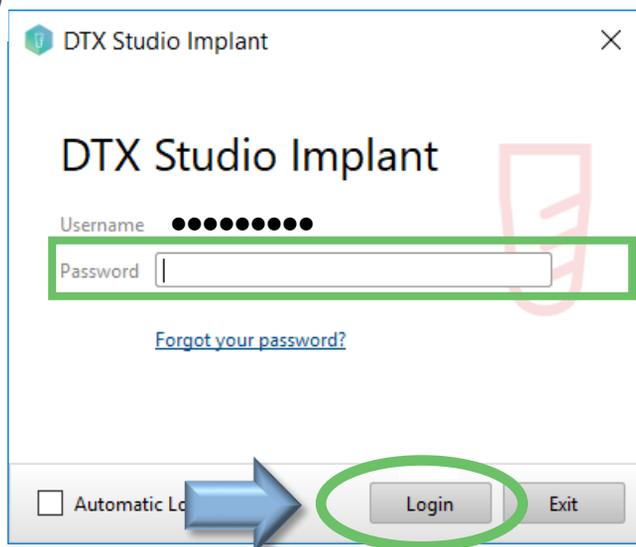

42

エンドユーザー契約に同意して、【Next】を左クリックします。

【 I accept the term in the agreement 】
(上段)
にチェックを入れ、【Next】をクリック
します。



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




Install (Windows®)



DTX Studio™ Implant


43

レジストレーションを完了します。
【Finish】を左クリックします。

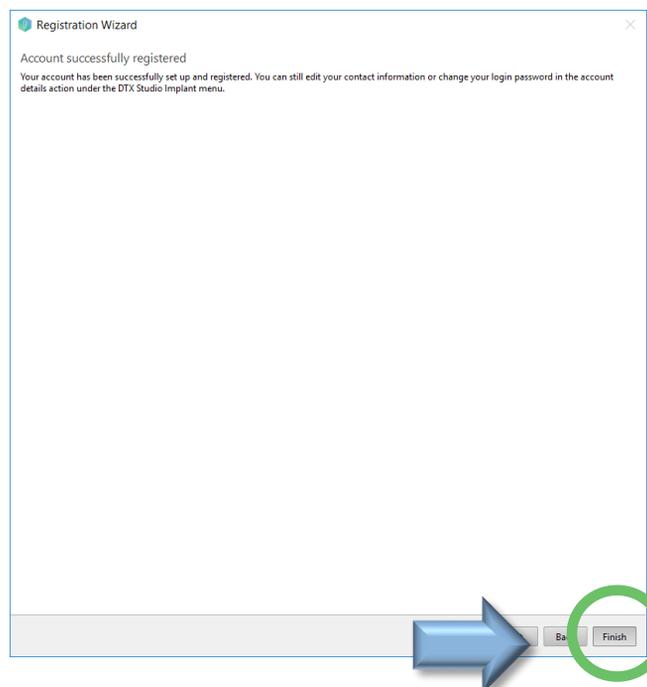

44

【Insutrcution for Use(取扱説明書)】
のウィンドウが立ち上がります。
Japaneseを選択します。

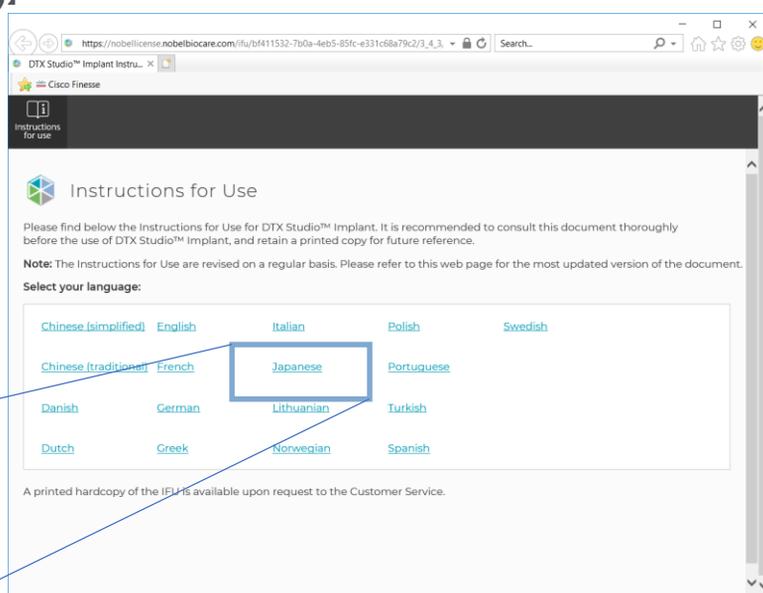

Japanese

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant

Install (Windows®)

45

取扱説明書のPDFが開きます。
必要に応じて、コンピュータに保存します。




46

【IFU】言語ファイルを自動ダウンロード

【バージョンアップ】を行った場合は、ソフト起動後、
【IFU】言語ファイルを自動ダウンロードします。

この操作には、数十分から数時間を要します。

ダウンロードが終了したら、インストール完了です。

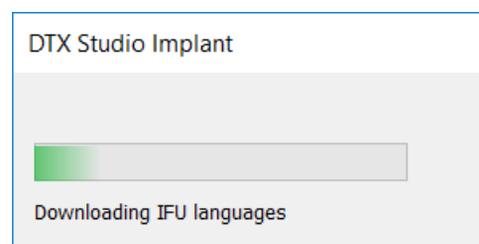

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant

Install (Windows®)

患者データの移設

47

【NobelClinician】フォルダから、データをコピーします。

¥ Windows(C:)




¥ NobelClinician



¥ Patients

【Patients】フォルダ内にある患者データをコピーします。

【Patients】フォルダ毎、コピーしバックアップを取っておく事を推奨します。

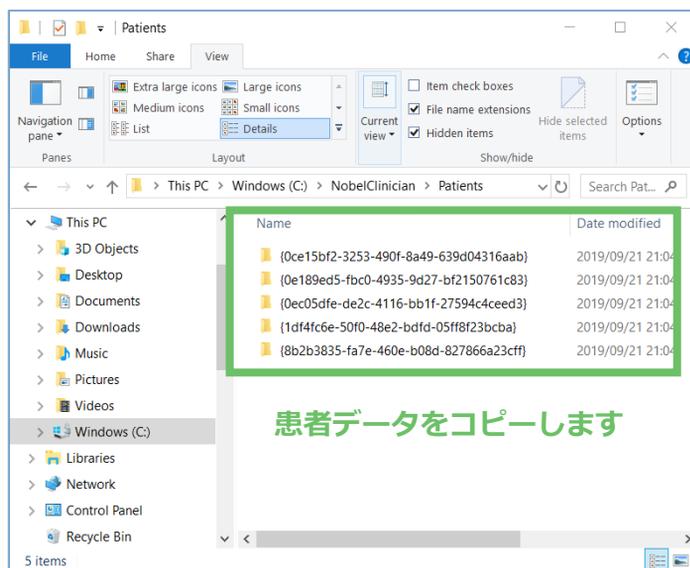

48

【DTX Studio】フォルダへ、データを移行します。

¥ Windows(C:)



¥ DTX Studio




¥ implant



¥ Patients

【Patients】フォルダ内にコピーしたデータを貼り付けます。

DTX Studio implantソフトウェアを再起動します。

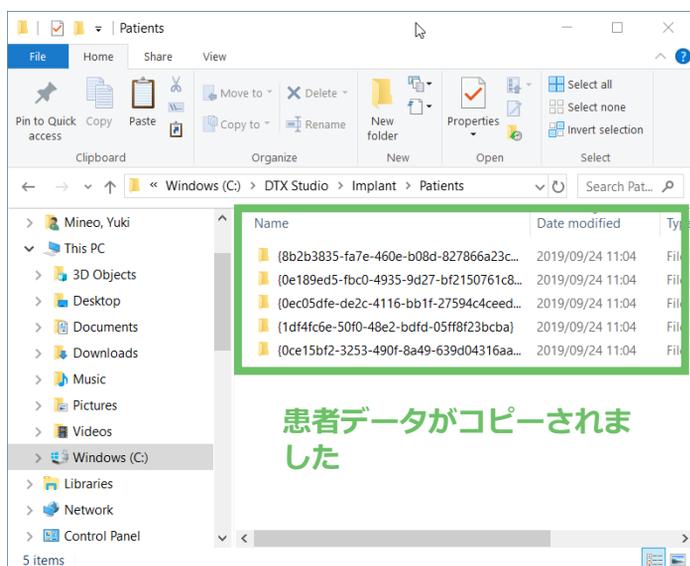


Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant

DTX Studio™ Implant のインストール方法

Mac OS®

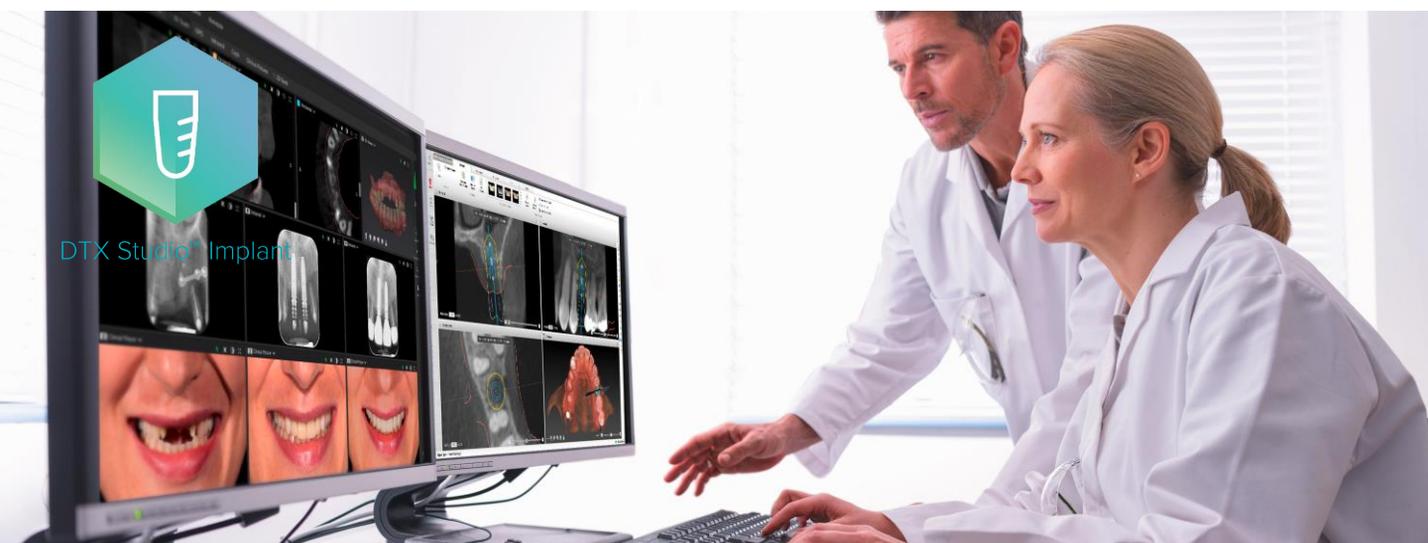

Mac OS® の場合

【DTX Studio™ Implant】もしくは【NobelClinician®】を起動します。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Install (Mac OS®)



DTX Studio™ Implant

1

コンピュータ上のアイコンを左クリックし、
DTX Studio™ Implantを起動します。




左クリックします



2

【パスワード】を入力し【サインイン】を
左クリックします。

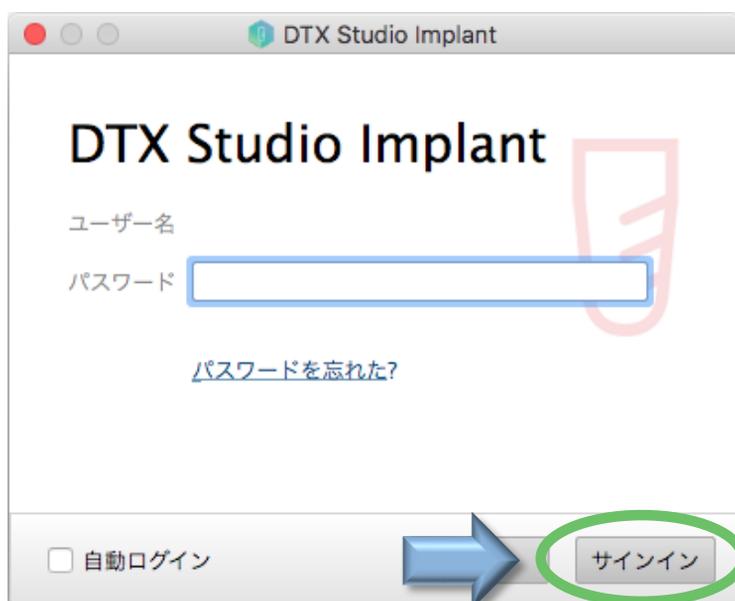

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




DTX Studio™ Implant

Install (Mac OS®)

3

DTX Studio™ Implant起動後、トップ画面右下の【アップロードセンター】を左クリックします。

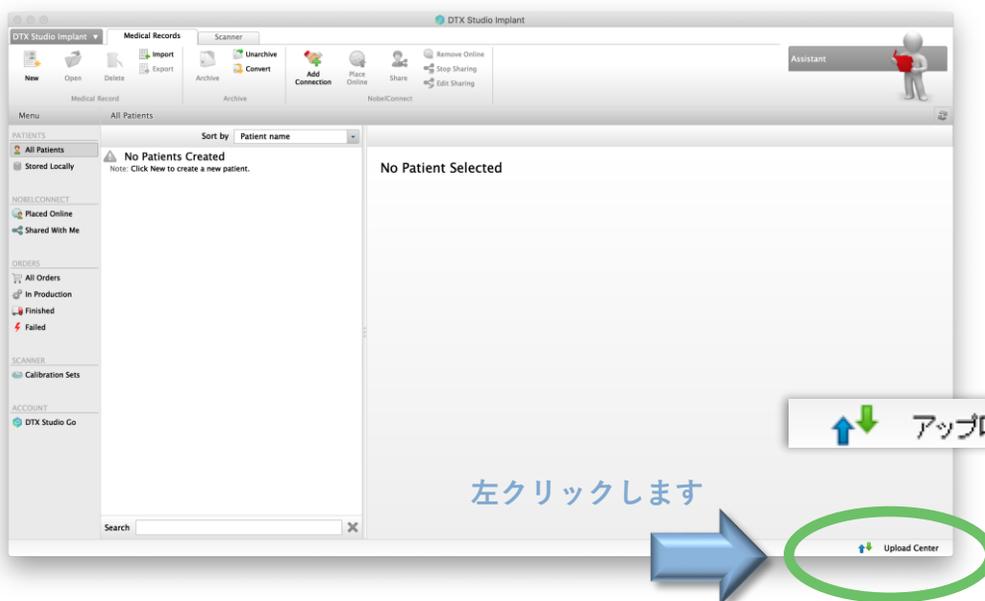


4

更新プログラムを確認します。
更新プログラムのダウンロードには、1時間程度の時間を要します。
(通信環境により左右されます)



アップロードセンター左側の通信(矢印)が消えたら、ダウンロードの終了です。

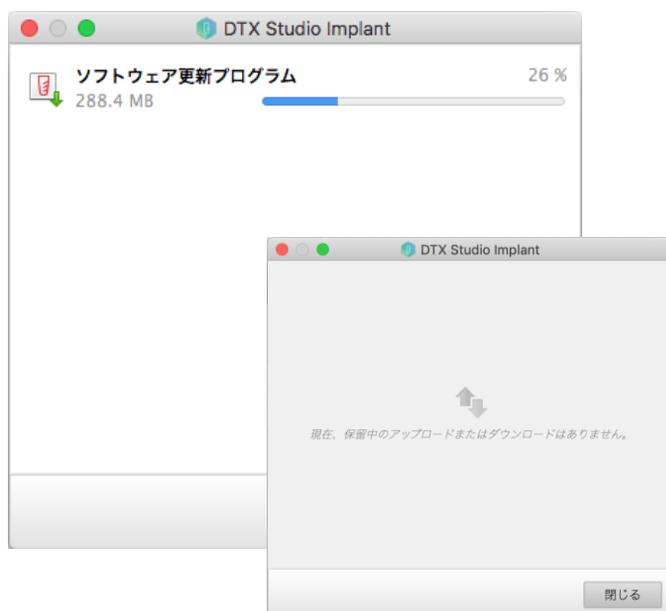

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant

Install (Mac OS®)

5

DTX Studio™ Implant ソフトウェアを再起動します。
画面左上の【×】をクリックします。



6

コンピュータ上のアイコンを左クリックし、
DTX Studio™ Implantを再起動します。



左クリックします



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




DTX Studio™ Implant

Install (Mac OS®)

7

インストールウィンドウが、ポップアップ表示されます。

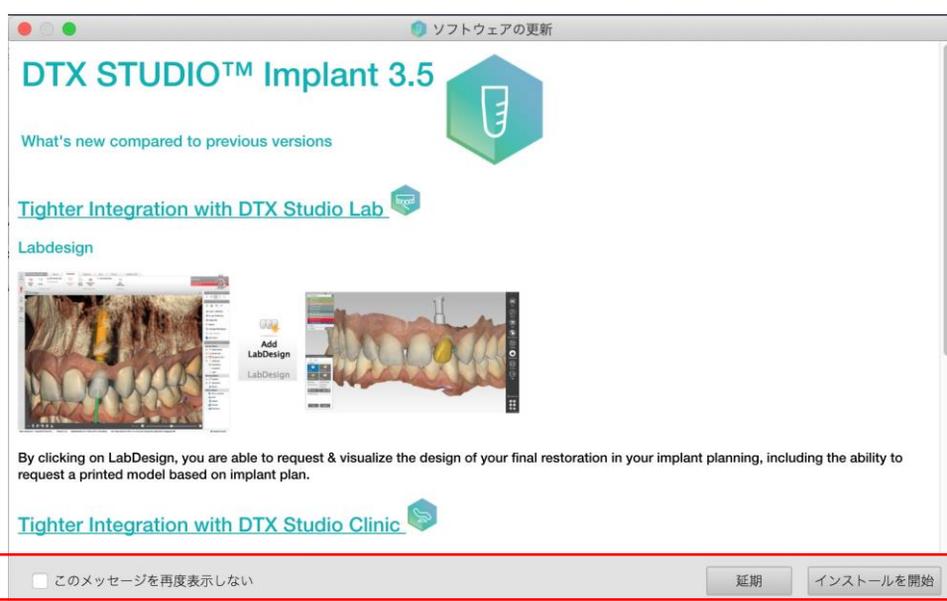

インストールの開始をクリックすると、インストールが開始されます。

このメッセージを再度表示しない

ポップアップ・ウィンドウを再度表示させません。
(インストールを延期させた場合のみ有効)

インストールを開始

Start install

インストールを開始します。
インストールの開始をクリックした場合のみ次
項へ進んでください。

延期


Cancel

インストールは行わず、現行のバージョンでソフト
ウェアを使用します。


Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



NobelClinician® V2.8

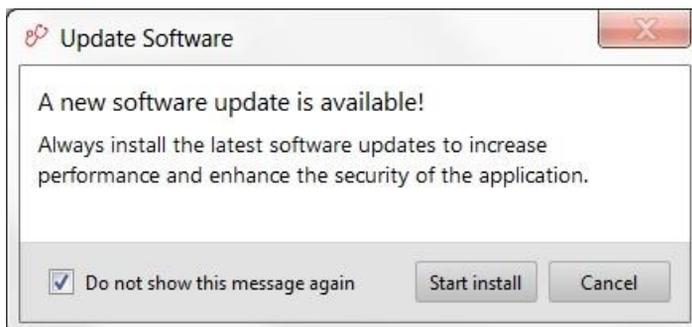

NobelClinician® V3.2

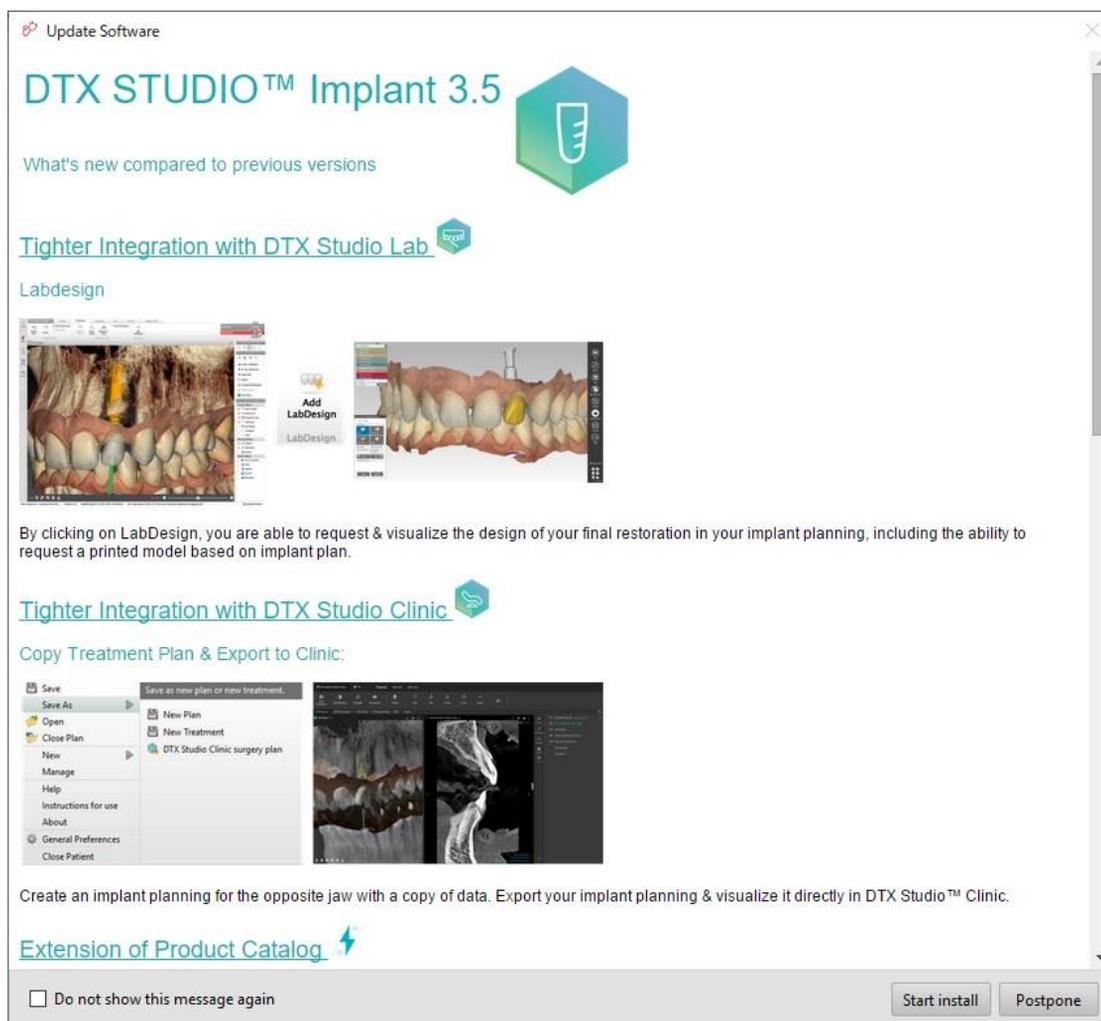

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




Install (Mac OS®)



DTX Studio™ Implant


8

インストール画面、DTX Studio Implantを
Wクリックします。

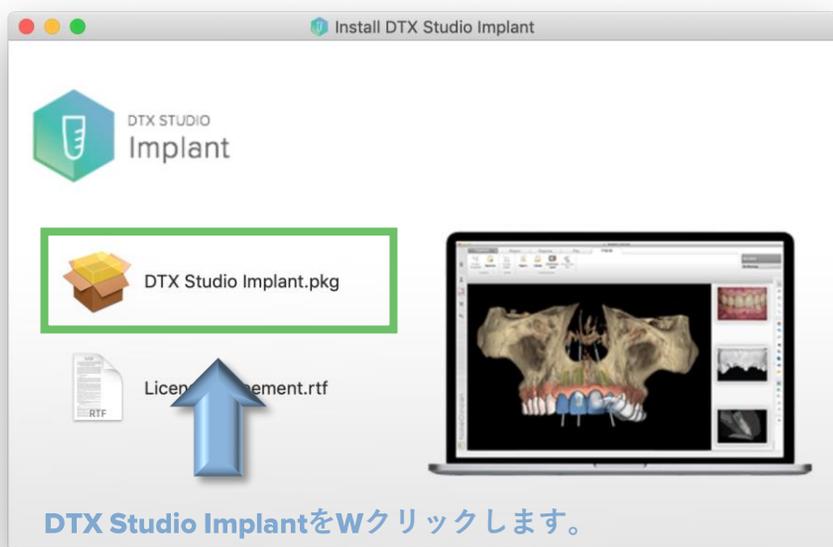

9

[続ける]を左クリックします。

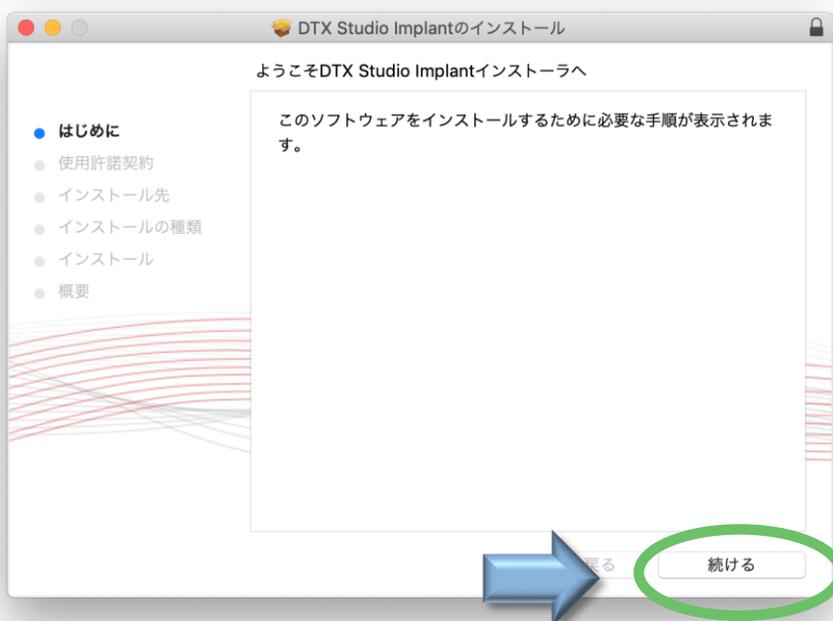

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant

Install (Mac OS®)


10

[続ける]を左クリックします。



11

[同意する]を左クリックします。

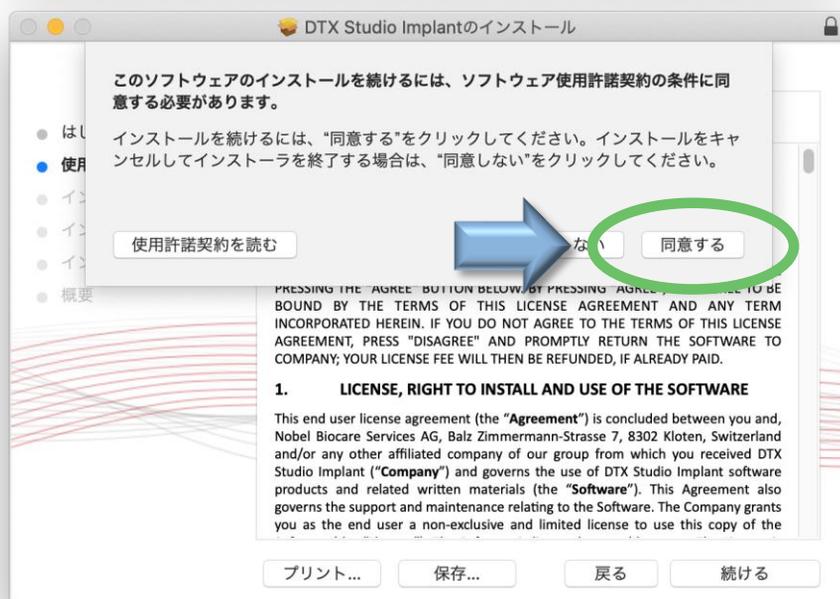

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




DTX Studio™ Implant

Install (Mac OS®)

12

【インストール】を左クリックしてインストール開始します。

インストール先を設定します。
基本はMacintosh HDにインストール
されます。

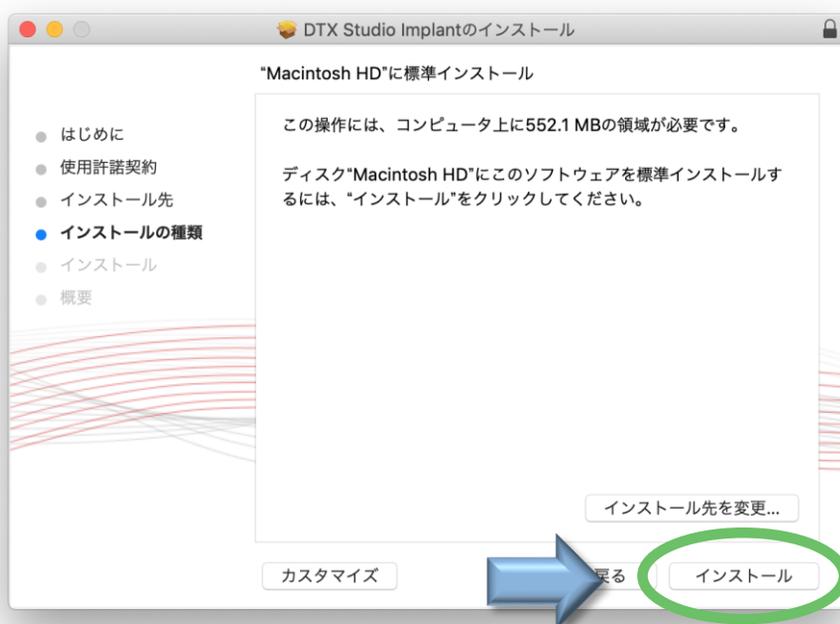


13

【パスワード】を入力し、【ソフトウェアをインストール】を左クリックします。

パスワードの入力を求められます。
このパスワードは、**Mac OS X**に設
定されたパスワードを入力してくだ
さい。

パスワードを設定していない場合
は、空欄で進みます。

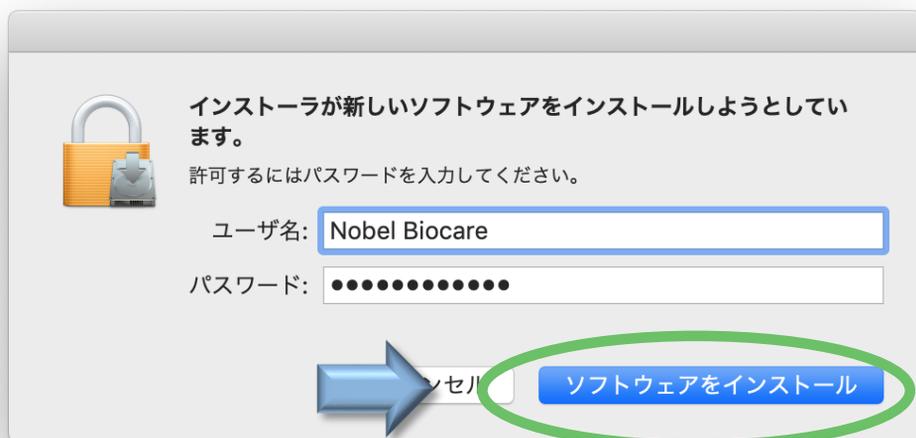

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




DTX Studio™ Implant

Install (Mac OS®)


14

インストールが進行します。

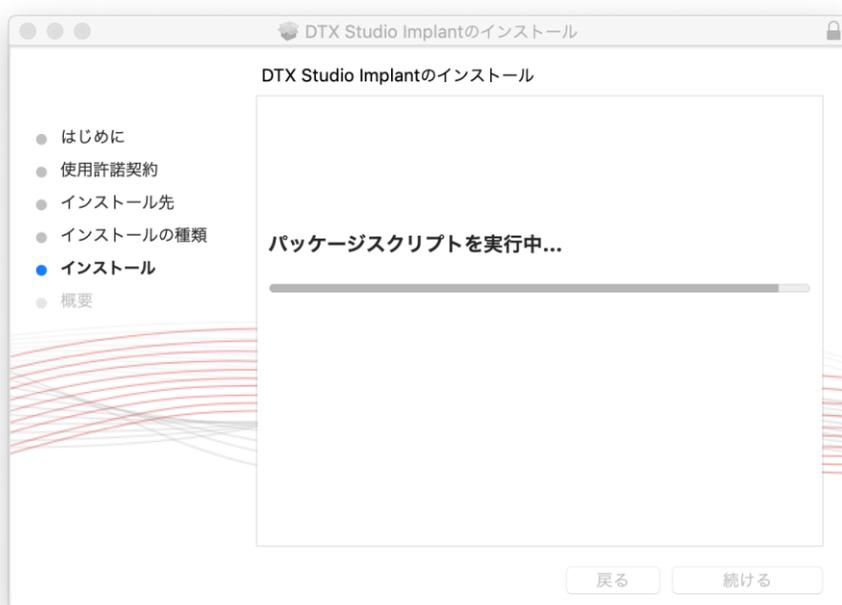

15

インストールの完了

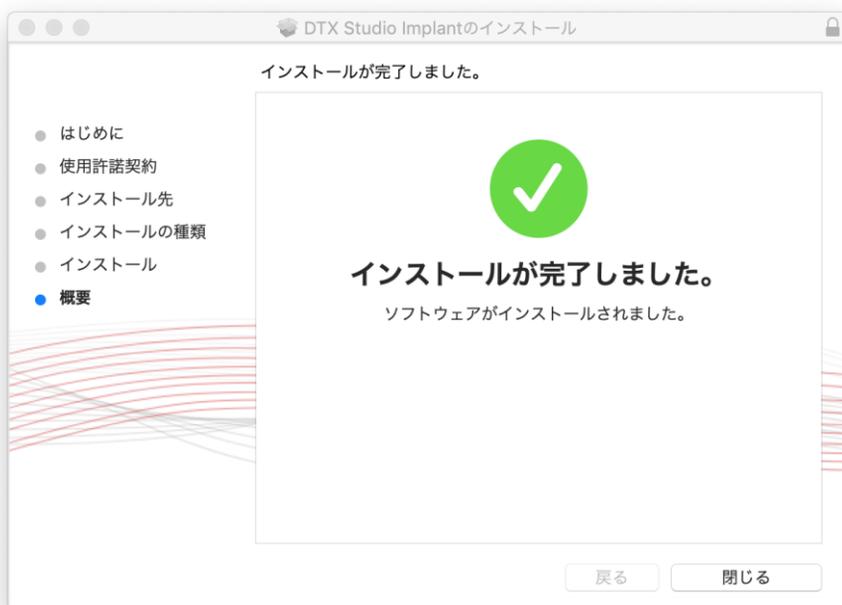

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




DTX Studio™ Implant

Install (Mac OS®)

16

DTX Studio™ Implantが起動
します。

DTX Studio™ Implant が自動で
起動します。

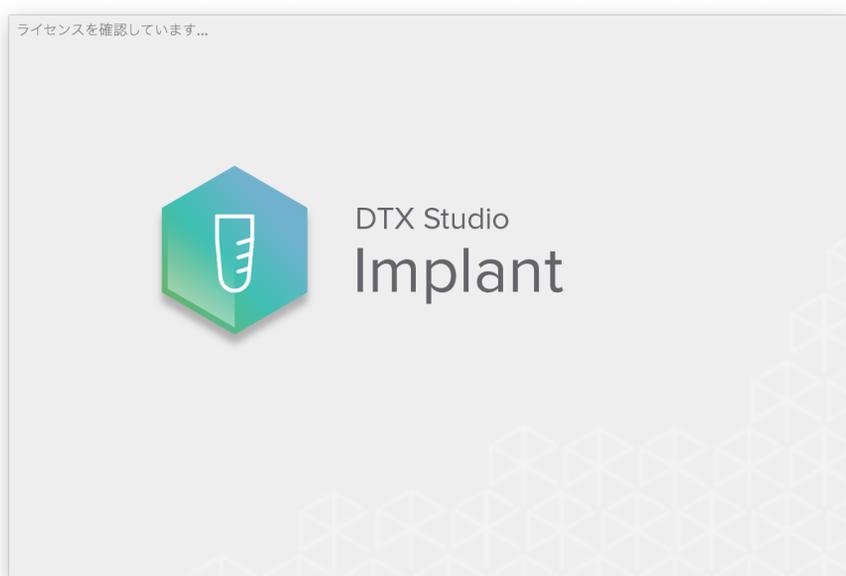

17

IFU言語ダウンロードが起動します。

ダウンロードが終了すると、自動
でウィンドウが閉じます。



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




DTX Studio™ Implant

Install (Mac OS®)

18

エンドユーザー契約に同意して、
【次へ】を左クリックします。

【ライセンス規約の条項に同意します】
(上段)
にチェックを入れ、【次へ】をクリック
します。

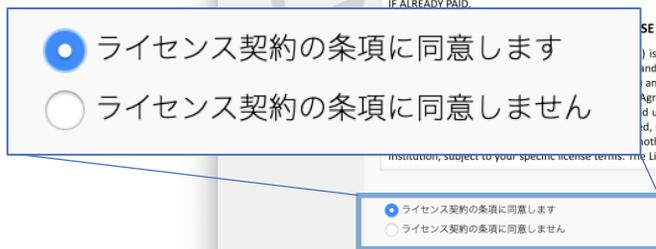

19

レジストレーションを完了します。
【完了】を左クリックします。



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant


Install (Mac OS®)

20

【Instruction for Use(取扱説明書)】のウィンドウが立ち上がります。
Japaneseを選択します。


取扱説明書のPDFが開きます。
必要に応じて、コンピュータに保存します。

Japanese

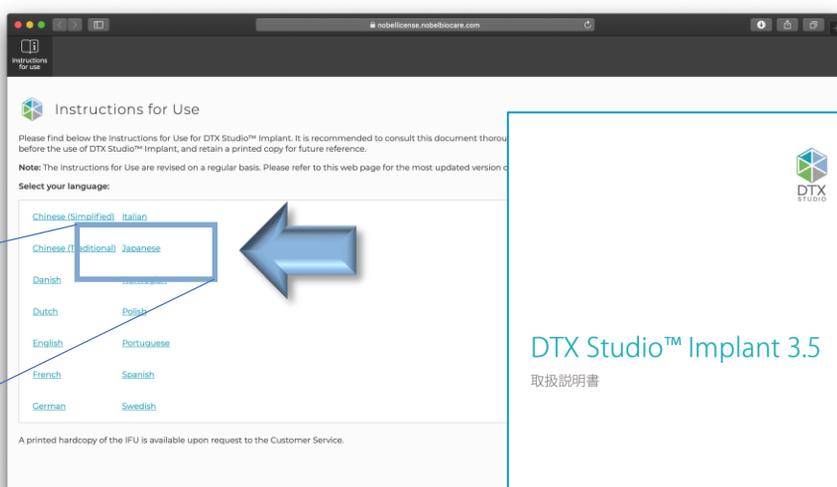

21

DTX Studio™ Implant V3.5.5の起動

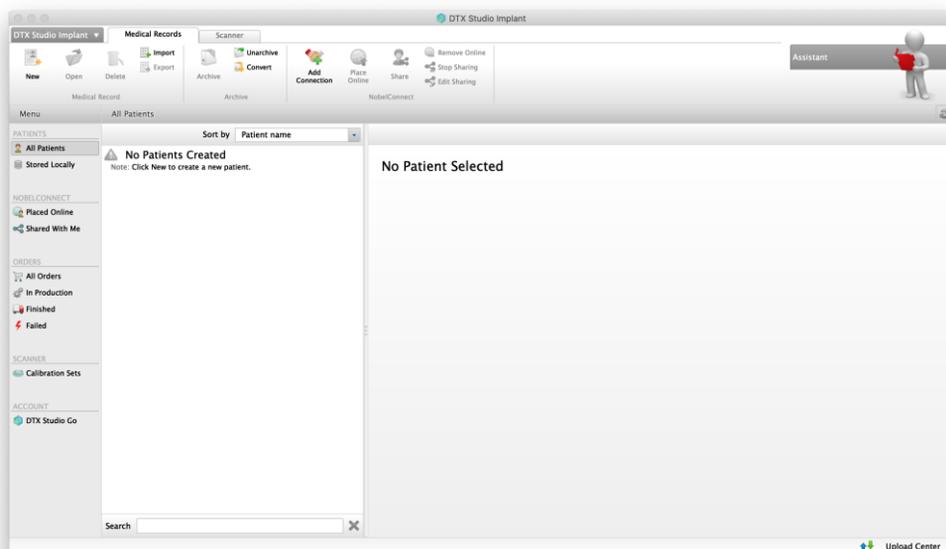

Contact Support

インストール方法やソフトウェア操作方法など
ご不明点などございましたら、以下までご連絡ください。

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

プロセラ・テクニカルサポート

TEL : 0120-432-118

営業時間 : 月～金 9時～20時 (土・日・祝日は除く)



Nobel Biocare DTX Studio™ Implant Version 3.5 Installation guide

©Nobel Biocare Japan K.K. All rights reserved.

MK444 2101