



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5

DTX Studio™ Implant Version 3.4からアップグレードを行う場合



DTX Studio™ Implant



DTX Studio™ Go

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Content

Introduction	03
Computer Guidline	04
About DTX Studio™ Go	06
DTX Studio™ Go Login	12
DTX Studio™ Implant Download	15
DTX Studio™ Implant Install (for Windows®)	20
DTX Studio™ Implant Install (for Mac-OS®)	28
Contact Support	36



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Introduction

- ◆ ご使用のコンピュータースペックをご確認ください。
- ◆ インターネットに接続されている事をご確認ください。
- ◆ ラップトップ型コンピュータをご使用の場合、充電が十分に残っている事をご確認ください。
- ◆ コンピュータの日付及び時間設定が正しい事をご確認ください。
- ◆ ライセンス契約が終了している場合はバージョンアップが出来ません。
- ◆ Practice Setupライセンスユーザーは、現在ご使用になっている全てのソフトウェアバージョンを合わせる必要があります。
- ◆ Computer Guidelineに記載されていないOS (**Windows® & Mac OS®**) には、対応していません。
- ◆ インストールに必要なファイルは、**DTX Studio™ Go**からダウンロードしてください。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Computer Guideline

Windows® 64-bit (Windows® 10)

Recommended requirements (推奨要件)

CPU : 最小条件

デュアルコアプロセッサ
3 GHz

RAM : メモリ

64bit 8GB 以上

Graphics card

ビデオメモリ1GB 以上
(4K/Retinaディスプレイは2GB以上)
OpenGL® (NVIDIA、AMDなど)
※Intelのグラフィックでは動作しません

Monitor : 解像度

推奨1920 X 1200 ※最小1920 X 1080
※4Kなどの大きな解像度では、表示は可能ですが文字が極端に小さくなってしまいます

Internet : 回線速度

ブロードバンドの回線が必要 推奨 アップロード3Mbps 以上、ダウンロード30Mbps以上

Disk space

患者様のデータは約250MB以上になります。
通常インストールに最低5GB、患者ファイル数に応じてそれ以上のディスクスペースが必要です。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Computer Guideline

MacOS® High Sierra, MacOS® Mojave, MacOS® Catalina, MacOS® Big Sur

Recommended requirements (推奨要件)

Devices

iMac / Mac Pro / Mac Book Pro(15インチ以上)
*2011年以降にリリースされたモデルがサポートされています。

CPU : 最小条件

デュアルコアプロセッサ
3 GHz
(Apple M1 Chip(SoC)搭載のコンピュータは現在検証中のため、動作保証は致しかねます。)

RAM : メモリ

Mac OS X 8 GB 以上

Graphics card

ビデオメモリ1GB 以上
(4K/Retinaディスプレイは2GB以上)
OpenGL® (NVIDIA、AMDなど)
※Intelのグラフィックでは動作しません

Monitor : 解像度

推奨1920 X 1200 ※最小1920 X 1080
※4Kなどの大きな解像度では、表示は可能ですが文字が極端に小さくなってしまいます

Internet : 回線速度

ブロードバンドの回線が必要 推奨 アップロード3Mbps 以上、
ダウンロード30Mbps以上

Disk space

患者様のデータは約250MB以上になります。
通常インストールに最低5GB、患者ファイル数に応じて、それ以上のディスクスペースが必要です。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go



ライセンス情報管理ウェブサイト

- ◆ オンラインプラットフォーム（ウェブサイト）にアクセスして、ソフトウェアのバージョン、サービス、およびご自身のライセンス情報についての詳細を確認することができます。
- ◆ 最新のソフトウェア・インストールデータをご自身でダウンロードすることができるだけでなく、他の【DTX Studio™ Implant】や【DTX Studio™ Lab】ユーザーと接続し情報をシェアすることができます。
- ◆ ご自身のライセンスと接続している他のDTX Studio™ユーザーをご自身のDTX Studio™ Goの中で管理します。



DTX Studio™ Go

<https://go.dtxstudio.com/>

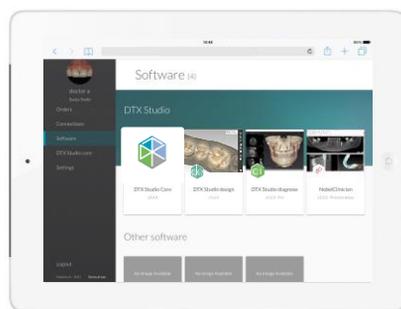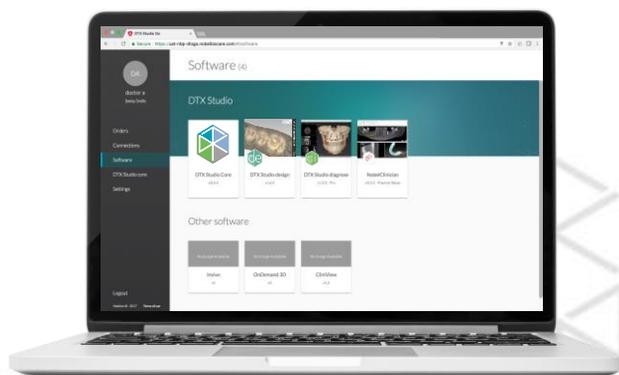

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Go

ライセンス情報管理ウェブサイト – DTX Studio™ Go

DTX Studio™ suite

DTX Studio™ プラットフォーム

- ◆ DTX Studio™ suiteは3つのソフトウェアと1つのWeb Portalの総称です。
- ◆ DTX Studio™ suiteの4つの主要コンポーネント：
DTX Studio™ / Clinic (画像取得と診断) / Implant / Lab and Go
- ◆ DTX Studio™ Goは、DTX Studio™ ソフトウェアのライセンス管理を行います。

DTX Studio™ suite

 DTX Studio™ Clinic
Image acquisition
Diagnostics



 DTX Studio™ Implant
Diagnostics
Implant planning



 DTX Studio™ Lab
Prosthetic design



 DTX Studio™ Go
Web - based portal



歯科医師 / 臨床医

歯科技工士

DSO/ 大規模歯科医院

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go で出来ること

オーダー確認

- ◆ NobelProcera®製品および、DTX Studio™ Implant・DTX Studio™ Lab において、ご自身の送受信履歴をいつでも確認することが可能です。
- ◆ IOSでスキャンしたデータを添付して、DTX Studio™ Labソフトウェアに直接オーダーリクエストを送信することが可能です。
※事前にラボとのコネクトが必要です。
- ◆ 最新のソフトウェア・インストールデータをご自身でダウンロードすることができるだけでなく、他のDTX Studio™ Implantや、DTX Studio™ Labユーザーと接続し情報をシェアすることができます。
- ◆ ご自身のライセンスと接続している他のDTX Studio™ユーザーをご自身のDTX Studio™ Goの中で管理します。

#	Article	Tooth #	Status
1	Surgical Template Fully Guided 2 implants (75566)	-	Blank

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go で出来ること

コネクト機能

- ◆ 弊社カスタマーサービスに依頼せず、他のDTX Studio™ユーザーと接続する事ができます
※双方の同意が必要です。
- ◆ 相手のDTX-IDを入力して新しい接続を追加します。
- ◆ ライセンス間で送受信されるデータの概要を確認することができます。

Connections

Want to add someone who's not here yet? [Find an account](#)

Find a connection

Nobelbiocare Japan NPS
Internal

1400001, Japan
D11-320-289

All requests (12)

ID	Date	Type	Status
R12-111-307	Dec 08, 2017	LabDesign	Finished
R13-111-739	Dec 08, 2017	TempShell	Created

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go




DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go で出来ること

ソフトウェア管理

- ◆ 各種ソフトウェアのインストーラをダウンロードする事ができるようになり、自身のライセンスのインストールキーを確認できます。
- ◆ ユーザー自身のライセンスへ他のユーザーを追加、または削除を実行することができます。
- ◆ 新しいPCにソフトを入れ直す際に、ご自身でライセンスを解除することができます。
- ◆ ユーザーご自身でインストールを実行することができます。

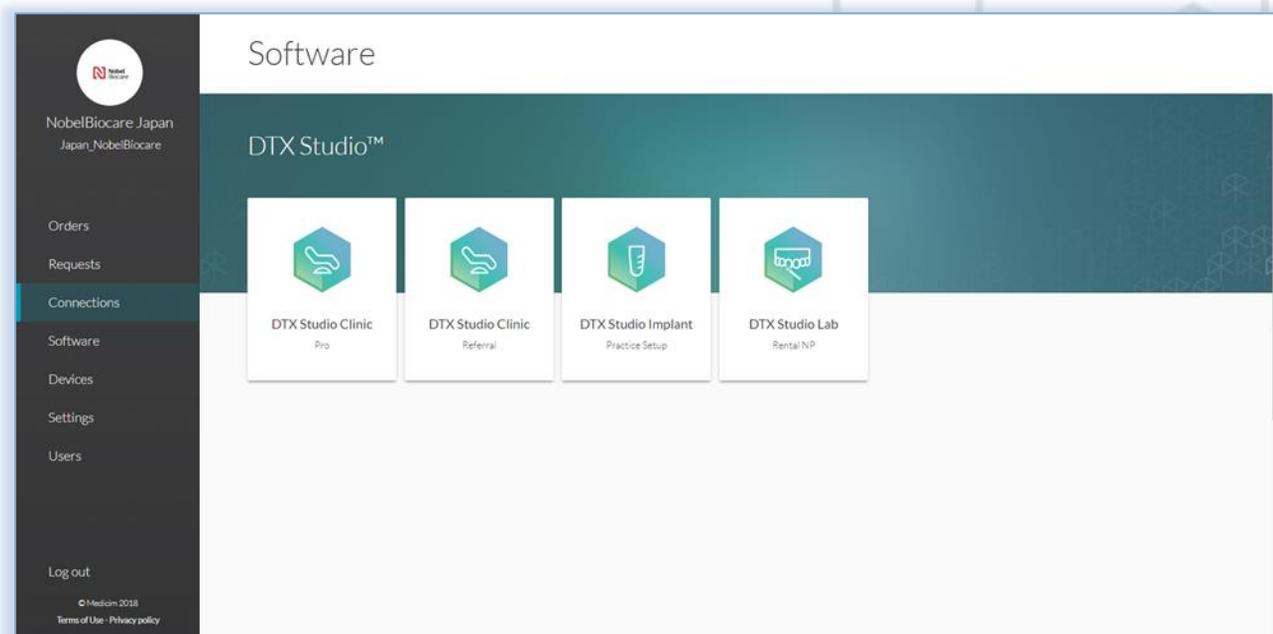

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go で出来ること

設定

- ✦ ユーザーのプロフィール画像を追加し、ロゴを追加することができます。
- ✦ アカウントの電子メールアドレスを変更することができます。
- ✦ ユーザーご自身で電子メールアドレス設定を変更することができます。
- ✦ 言語設定を行えます。

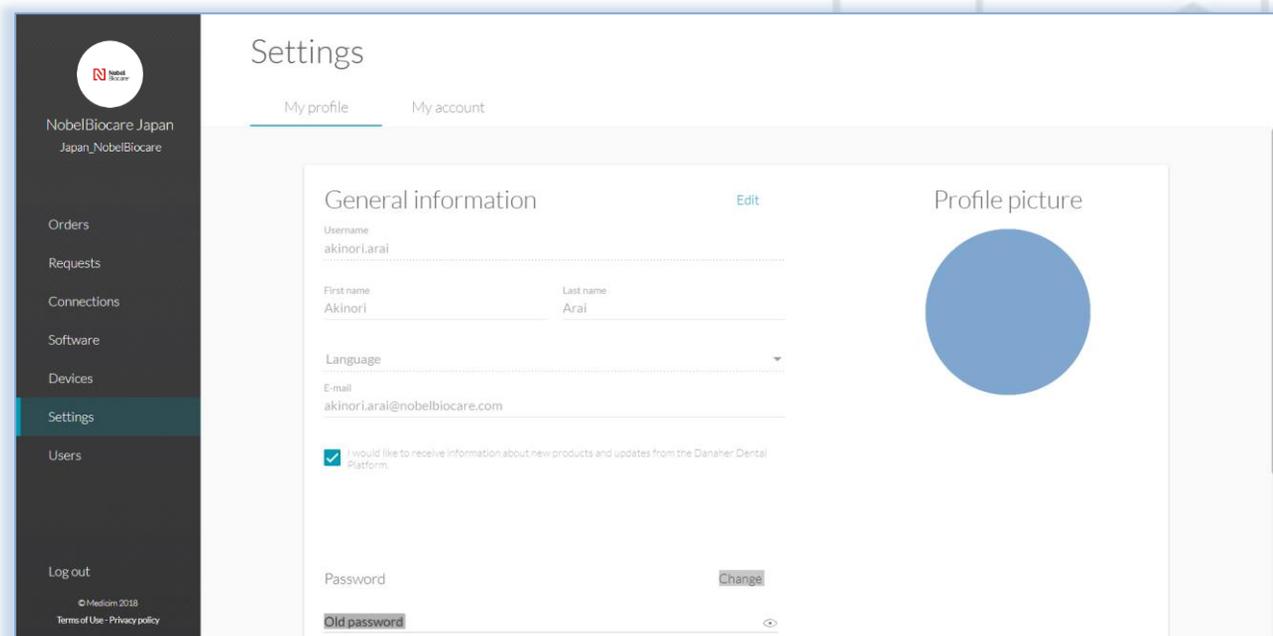


Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

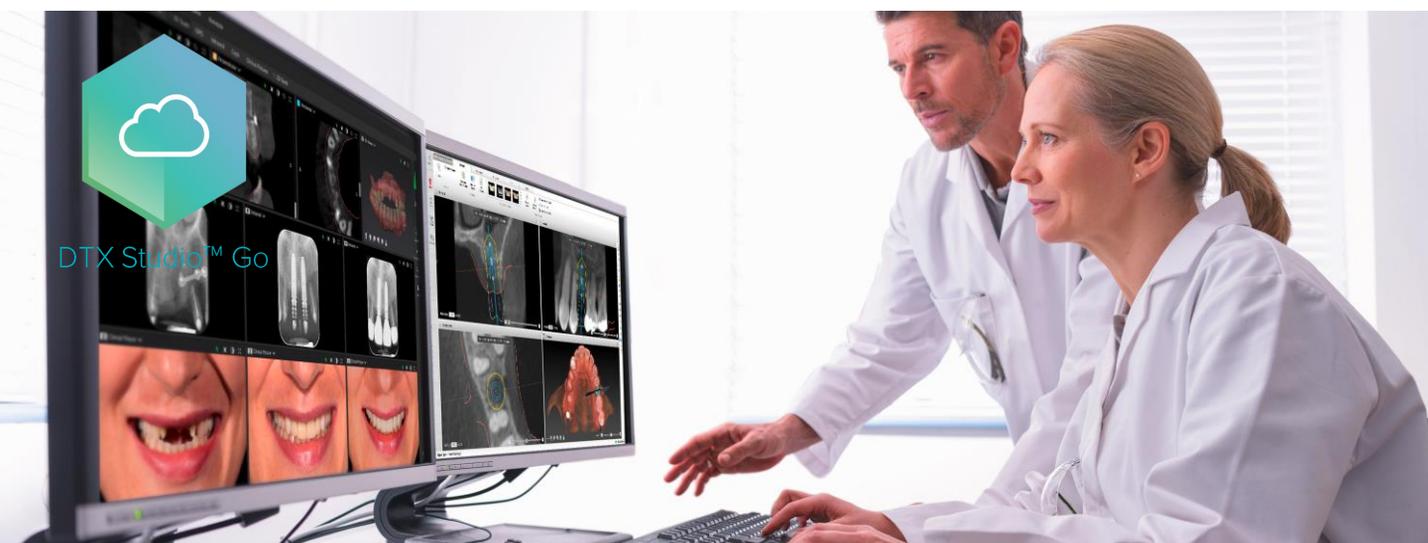

- ❖ <https://go.dtxstudio.com/> または、ソフトウェア内の【DTX Go】のリンクからログインし、必要に応じてパスワードを新しく設定してください。
Username、PasswordはDTX Studio™ Implantと同じになります。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go


DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

【DTX Studio™ Implant】ユーザーネーム確認方法

- 画面左上の【DTX Studio Implant】タブをクリックします。
- [アカウントの管理]を選択します。
- アカウント情報の[Username]をご参照ください。

DTX Studio™ Implant 画面

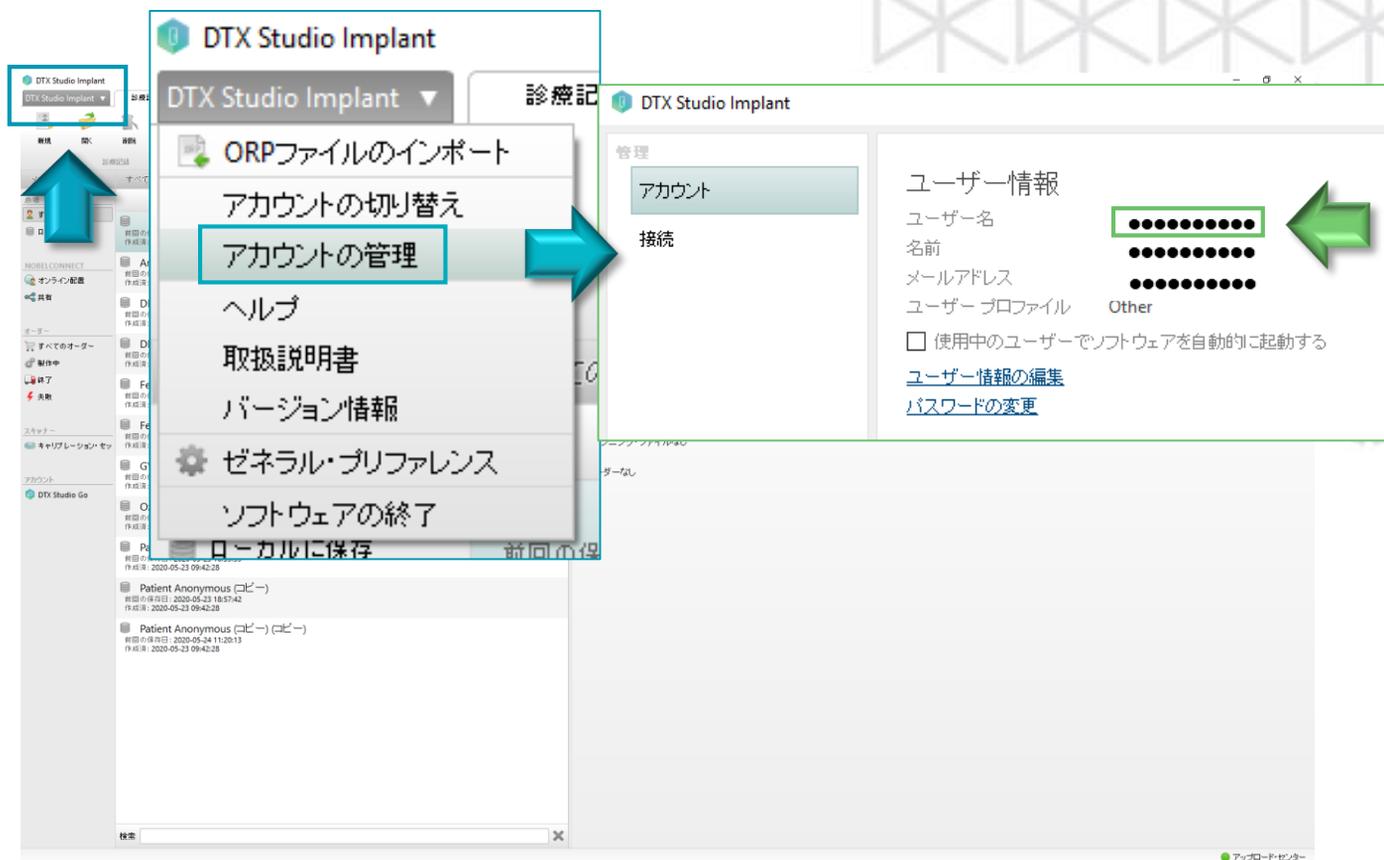

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

1

DTX Studio™ Implant を起動し、メニュー項目の**[DTX Studio Go]**をクリックします。

もしくは



<https://go.dtxstudio.com/>
へアクセスします。

2

ユーザーネーム及びパスワードを入力し、**[ログイン]**をクリックします。

パスワードが分からない場合は、画面下の、【パスワードを忘れた場合】をクリックし、パスワードのリセットを行ってください。

【ログインしたままにする】にチェックを入れると、次回からログイン・ウィンドウは表示されません。

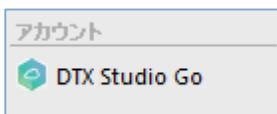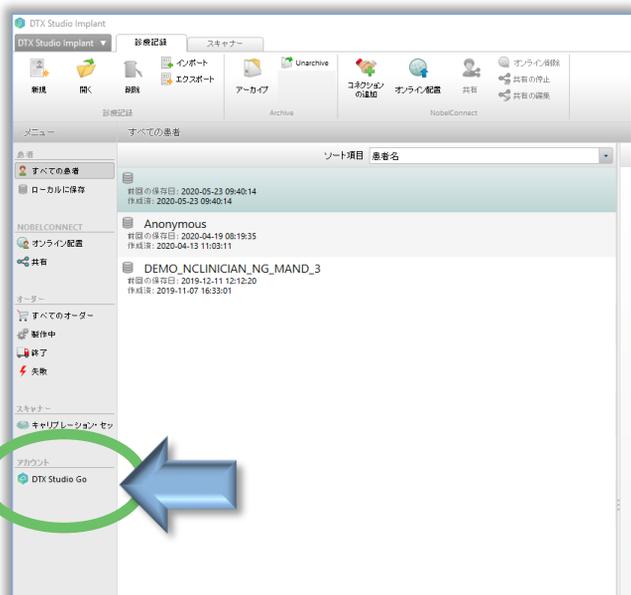


Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Implant のダウンロード方法

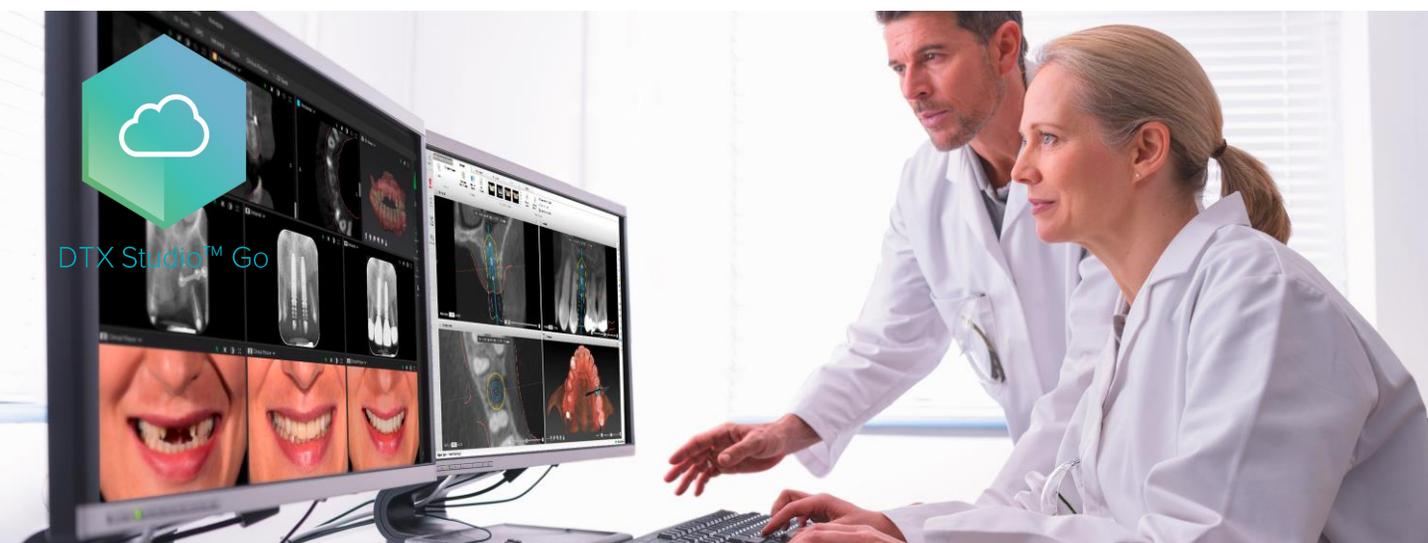

【 DTX Studio™ Implant 】をダウンロードします。

【 DTX Studio™ Go 】からインストールに必要なファイルをダウンロードします。

◆ DTX Studio™ Implant のインストーラーをダウンロードします。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Implant のダウンロード方法

インストールファイルをダウンロードする

1

DTX Studio™ Goの左側メニュー欄から【ソフトウェア】をクリックします。

DTX Studio™ Go 【ソフトウェア】画面



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Implant のダウンロード方法

インストールファイルをダウンロードする

2

DTX Studio Implant V3.4.3のアイコンにカーソルを合わせ、【詳細】をクリックします。

DTX Studio™ Implant Viewerのアイコンと似ていますので、ご注意ください。

DTX Studio™ Go 【ソフトウェア】画面

【ソフトウェア】画面から、対象のSoftwareにマウスカーソルを合わせると表示される【詳細】を選択すると、対象のソフトウェア・ダウンロードページへ移ります。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Implant のダウンロード方法

インストールファイルをダウンロードする

3

【インストールの詳細】タブ内の【最新バージョンのダウンロード】から、ご使用のコンピュータ OS (Windows® & Mac OS®)用の項目をクリックします。 (3.5.5)

DTX Studio™ Implant Viewerの場合

DTX Studio Implant Viewer

Nobel Biocare®

最新バージョンのダウンロード Mac (3.5.2) Windows (3.5.2)

DTX Studio™ Go 【ソフトウェア】画面

ソフトウェアの詳細
ソフトウェア > NobelClinician

NobelClinician
Nobel Biocare®・現在のバージョン 3.2.6
最新バージョンのダウンロード Mac (3.5.5) Windows (3.5.5)

インストールの詳細 製品情報 追加のリソース バージョン履歴 (2)

インストール・キー
装置 ID
DTX Studio™ Care ⓘ
ライセンスの種類

インストレーションキー
装置ID
ライセンス有効期限
ライセンスタイプ

ユーザー (1/1) ユーザーの追加

名	姓	電子メール
YT		

インストール (1/2)

プラットフォーム	バージョン	インストール日
Windows x64	3.2.6	7月 12, 2019

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Implant のダウンロード方法


インストールファイルをダウンロードする

4


ダウンロードしたファイルをコンピュータに保存します。

Windows® の場合

Web画面左下にダウンロードされます

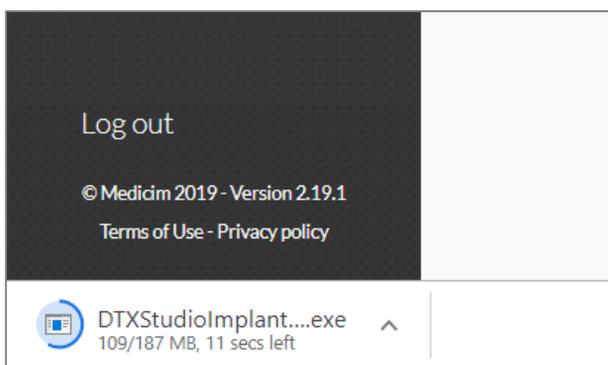


ダウンロードされたファイルをPCに保存します。

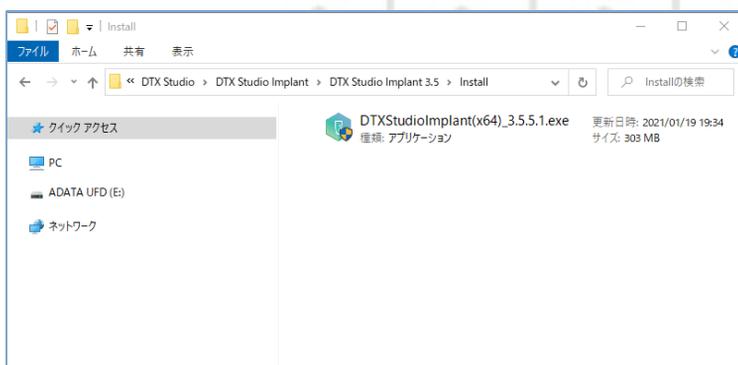


Mac OS® の場合

Web画面右上にダウンロードされます

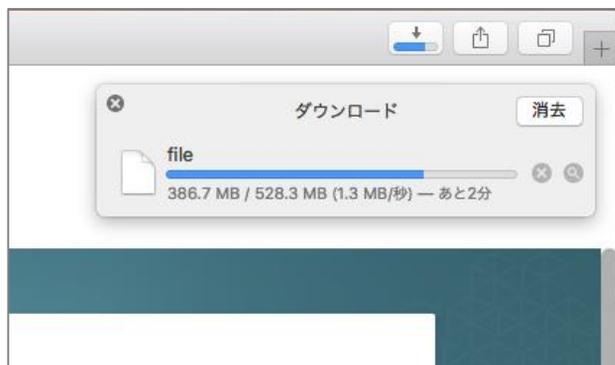

ダウンロードされたファイルをPCに保存します。

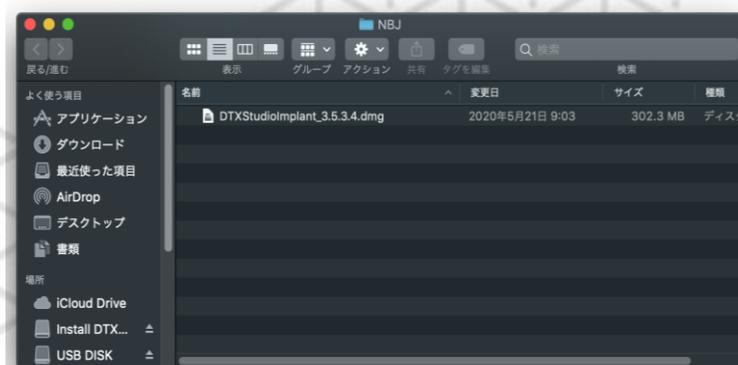

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Impalnt

DTX Studio™ Implant のインストール方法

Windows®



Windows® の場合

【DTX Studio™ Go】からダウンロードしたファイルをご用意ください。



DTXStudioImplant(x64)_3.5.5.1.exe

種類: アプリケーション

Windows用
インストール ファイル

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Install (Windows®)



DTX Studio™ Implant


1

コンピュータ上のアイコンを右クリックします。
管理者として実行をクリックします。




DTXStudioImpl
ant(x64)_3.5.3.4
.exe

右クリックします。

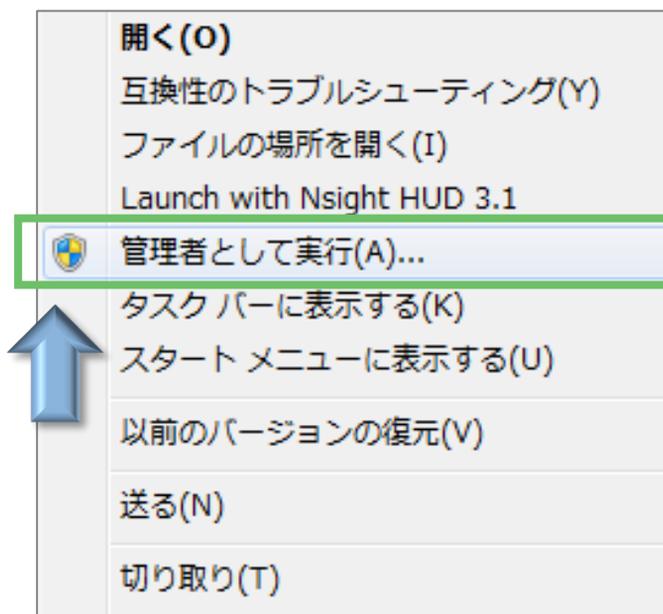

2

[Next]を左クリックします。

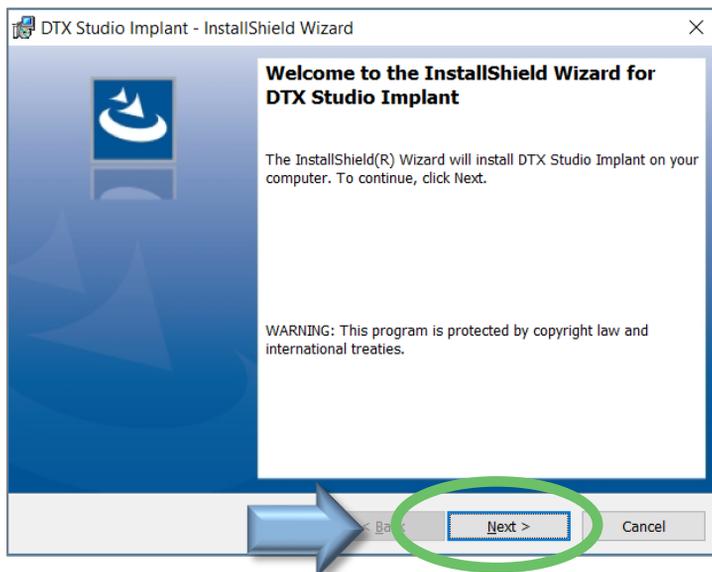

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5




DTX Studio™ Implant

Install (Windows®)

3

エンドユーザー契約に同意して、
【Next】を左クリックします。


【 I accept the term in the agreement 】
(上段)
にチェックを入れ、 【Next】 をクリック
します。

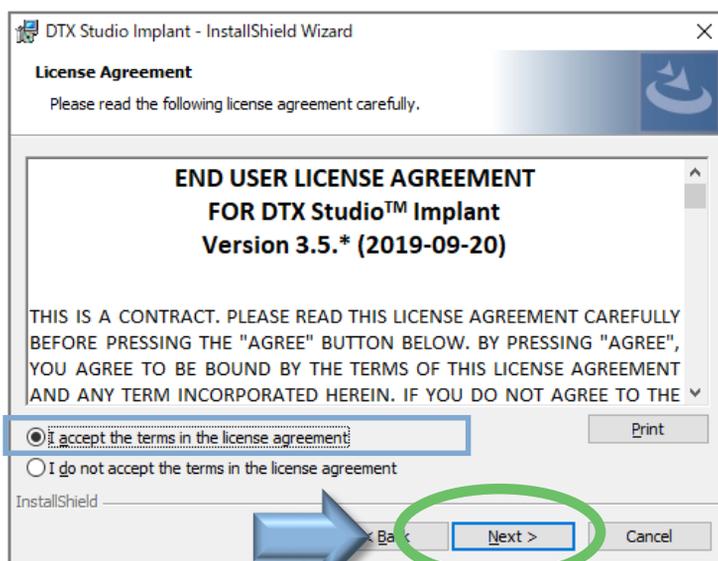

4

【Next】を左クリックします。

プログラムファイルのインストール先を設定
します。
基本的にはC ¥ Program Filesにインス
トールしてください。Nextを左クリックします。

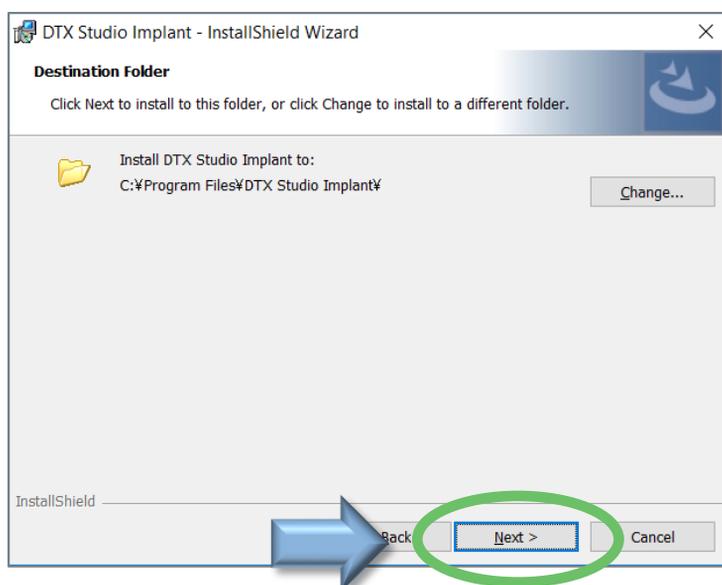

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Install (Windows®)




DTX Studio™ Implant

5

【Install】を左クリックします。


複数のファイルをインストールします。
インストール中はコンピュータの電源
を切らないよう、ご注意ください。

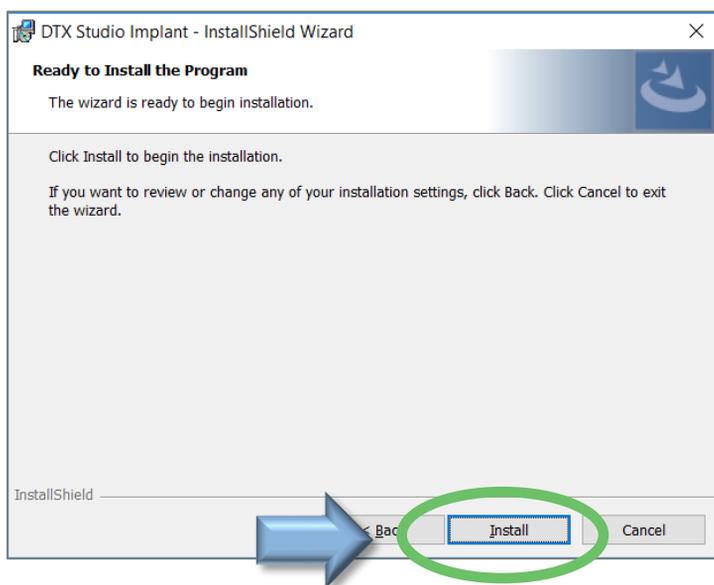

6

【Finish】を左クリックします。

コンピュータへのインストールが完了

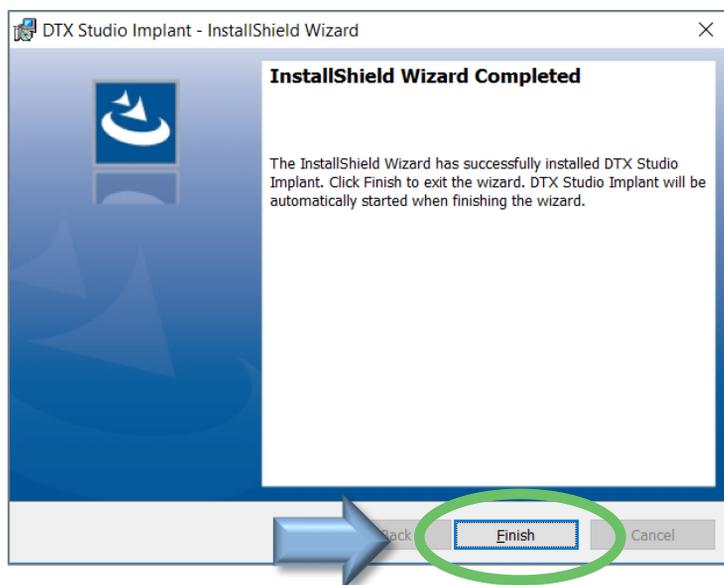

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Install (Windows®)



DTX Studio™ Implant


7

DTX Studio Implantが
起動します。



8

サインイン・ウィンドウが表示
されます。

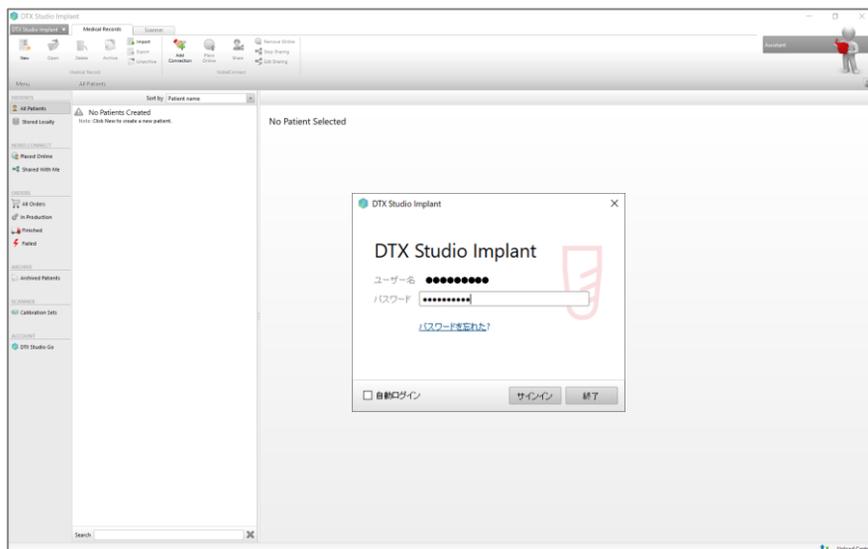

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant

Install (Windows®)


バージョンアップのインストール

9

DTX Studio™ Implantのサインイン画面に、パスワードを入力し、【サインイン】を左クリックします。

DTX Studio™ Implantのサインイン画面にパスワードを入力します。


ユーザー名とパスワードは、DTX Studio™ Goで設定したものと同一になります。

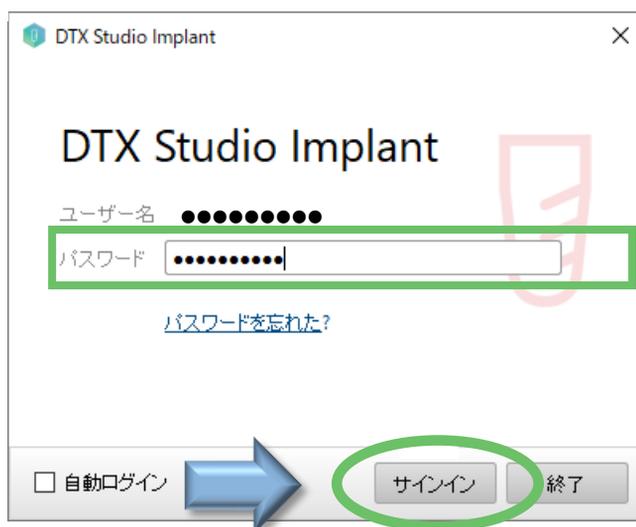

10

エンドユーザー契約に同意して、【次へ】を左クリックします。

【ライセンス契約の条項に同意します】(上段)にチェックを入れ、【次へ】をクリックします。

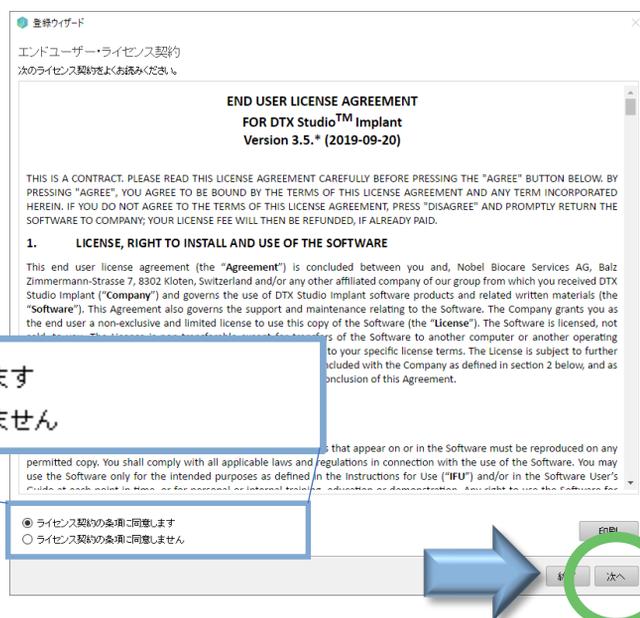

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant

Install (Windows®)

バージョンアップのインストール

11

レジストレーションを完了します。
【完了】を左クリックします。




12

【IFU】言語ファイルを自動ダウンロード

【バージョンアップ】を行った場合は、ソフト起動後、
【IFU】言語ファイルを自動ダウンロードします。

この操作には、数十分から数時間を要します。

ダウンロードが終了したら、インストール完了です。

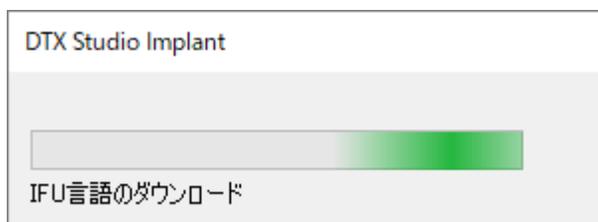

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Install (Windows®)




DTX Studio™ Implant

バージョンアップのインストール

13

【Insutrcution for Use(取扱説明書)】の
ウィンドウが立ち上がります。
Japaneseを選択します。

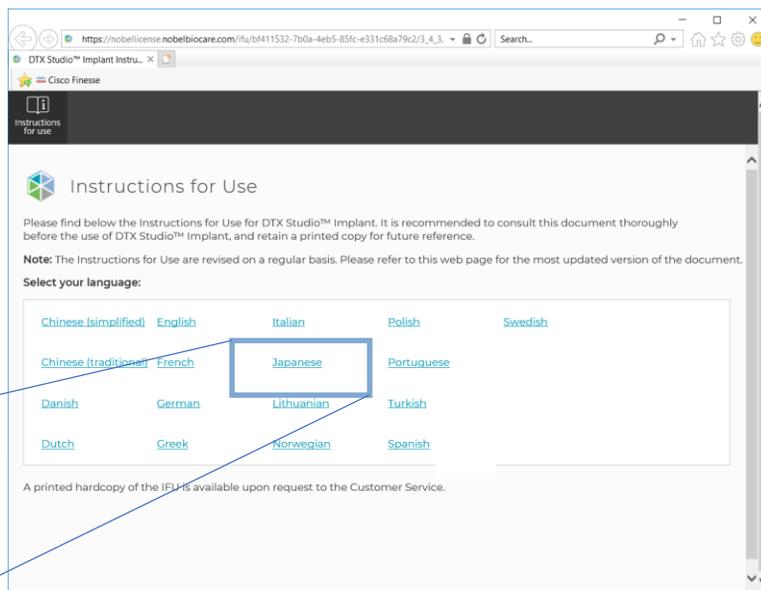

Japanese

14

取扱説明書の**PDF**が開きます。
必要に応じて、コンピュータに保存します。




Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant

DTX Studio™ Implant のインストール方法

Mac OS®

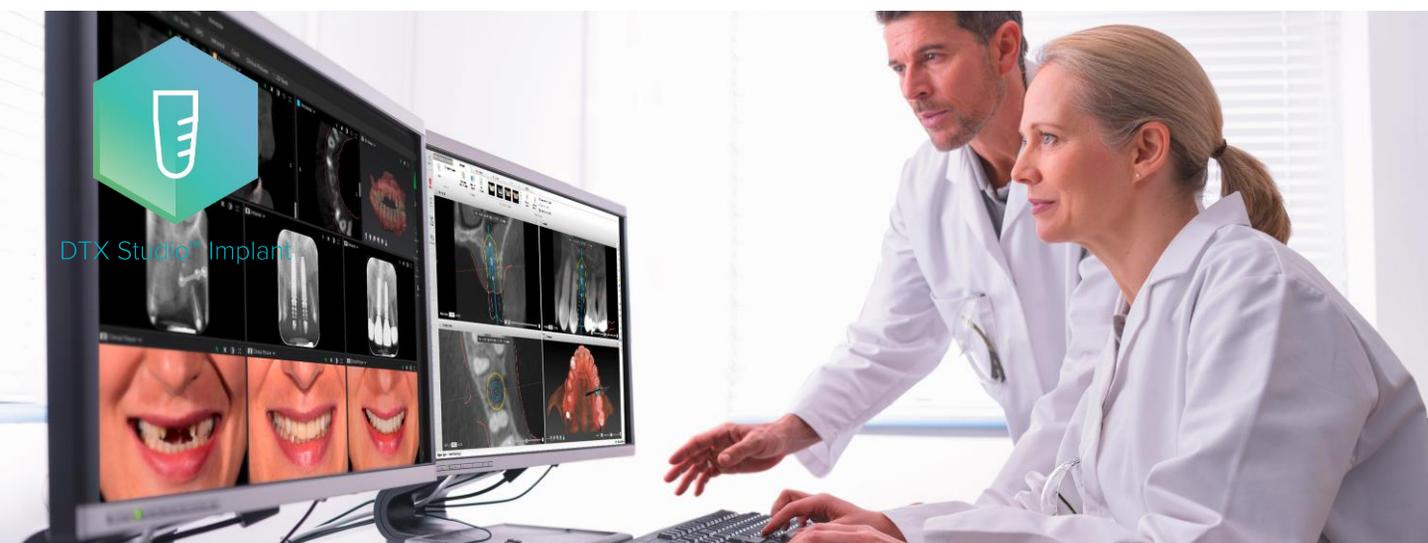

Mac OS® の場合

【DTX Studio™ Go】からダウンロードしたファイルをご用意ください。



DTXStudioImplant_3.5.5.1.dmg

Mac-OS 用
インストール ファイル

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Install (Mac OS®)



DTX Studio™ Implant

新規およびバージョンアップ


1

コンピュータ上のアイコンを**W**クリックします。
続けて、インストール画面の、DTX Studio
Implantを**W**クリックします。




DTXStudioImplant_3.5.5.1.dmg

アイコンを**W**クリックします。

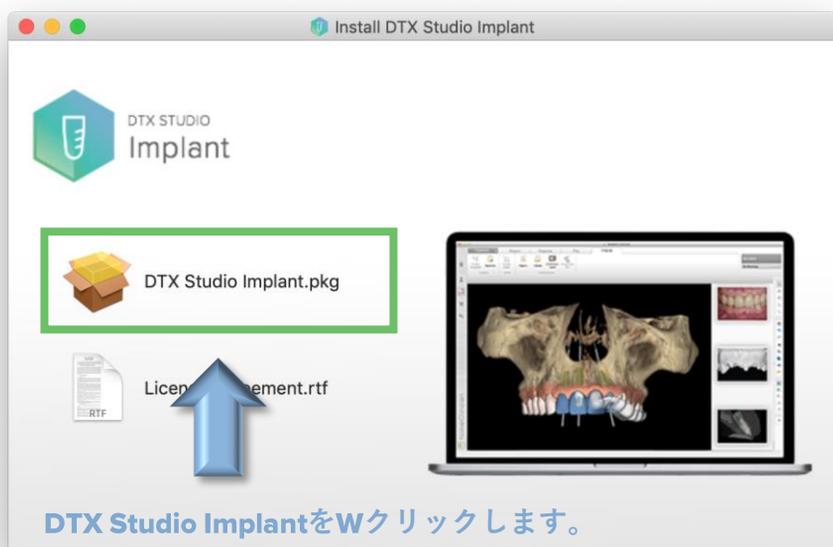

2

[続ける]を左クリックします。

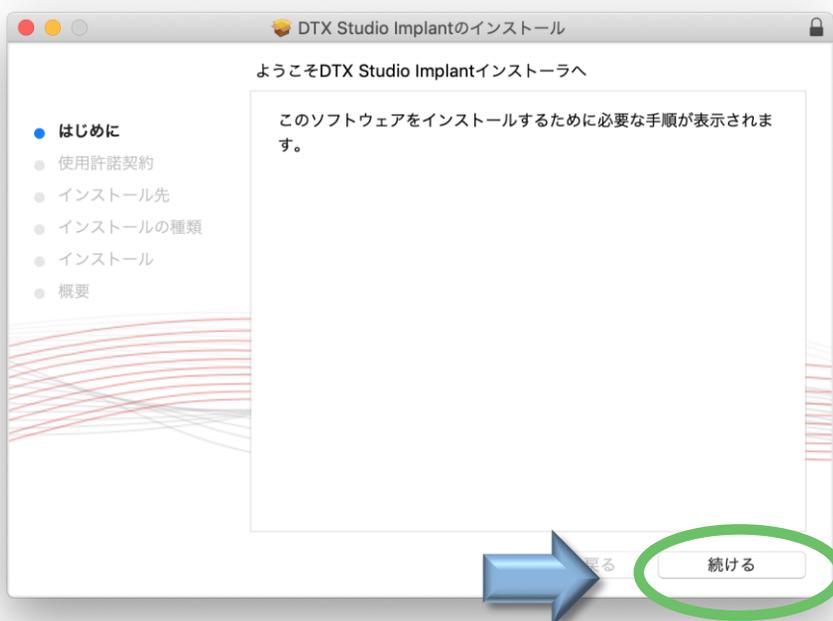

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant

Install (Mac OS®)

新規およびバージョンアップ


3

[続ける]を左クリックします。



4

[同意する]を左クリックします。

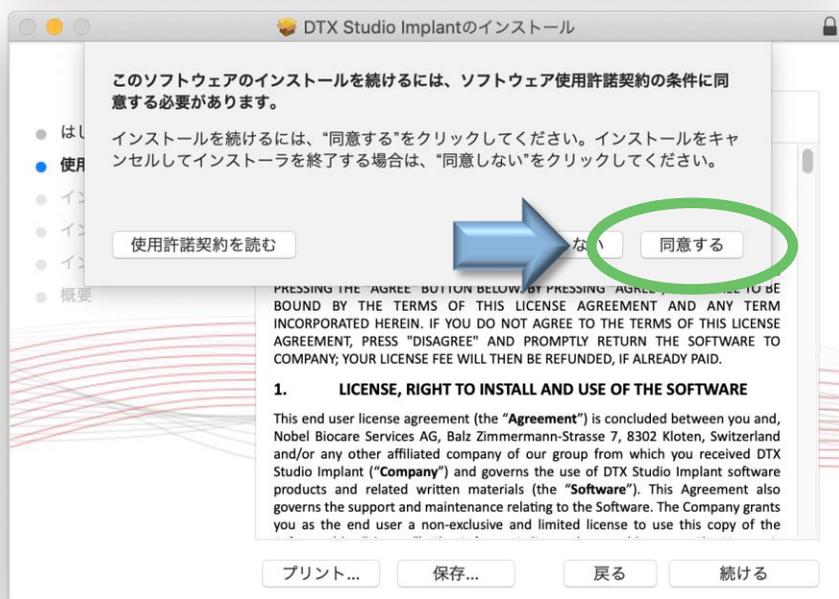

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant


Install (Mac OS®)

新規およびバージョンアップ

5

【インストール】を左クリックしてインストール開始します。

インストール先を設定します。
基本はMacintosh HDにインストール
されます。

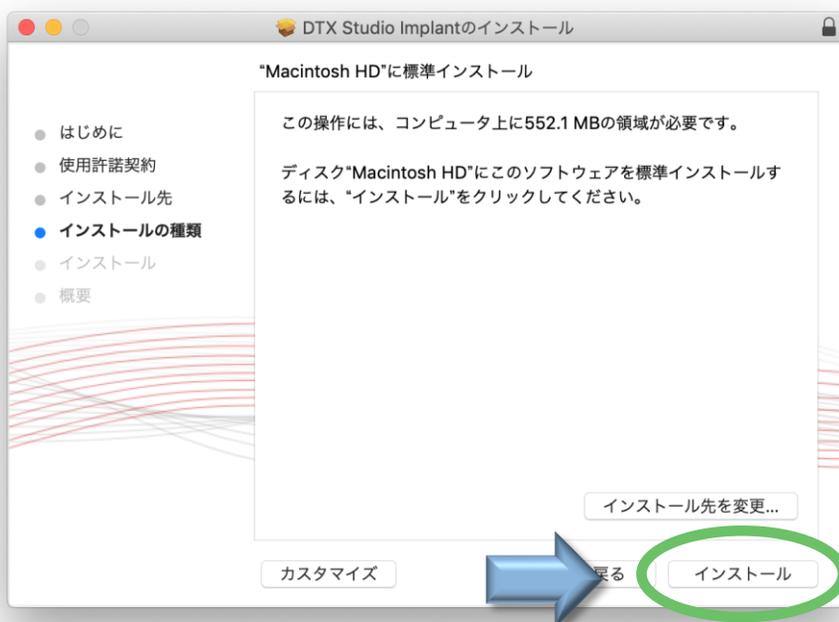


6

【パスワード】を入力し、【ソフトウェアをインストール】を左クリックします。

パスワードの入力を求められます。
このパスワードは、**Mac OS X**に設
定されたパスワードを入力してくだ
さい。

パスワードを設定していない場合
は、空欄で進みます。

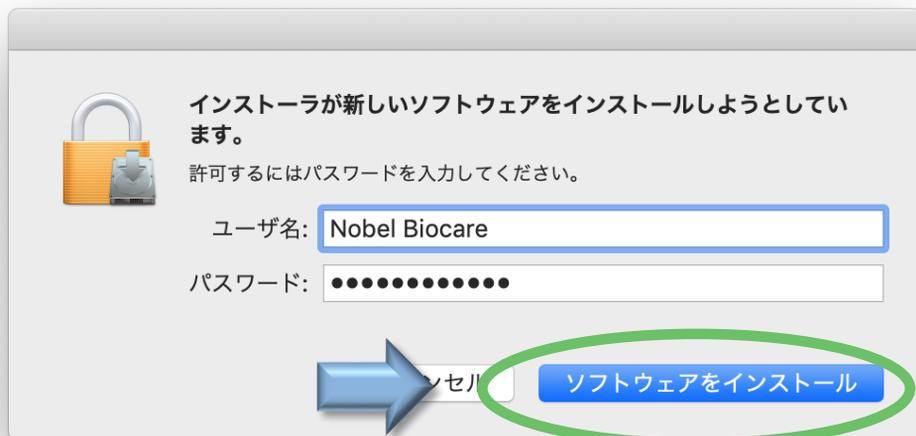

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Install (Mac OS®)



DTX Studio™ Implant

7


インストールが進行します。



8

インストールの完了

DTX Studio™ Implant が自動で起動します。

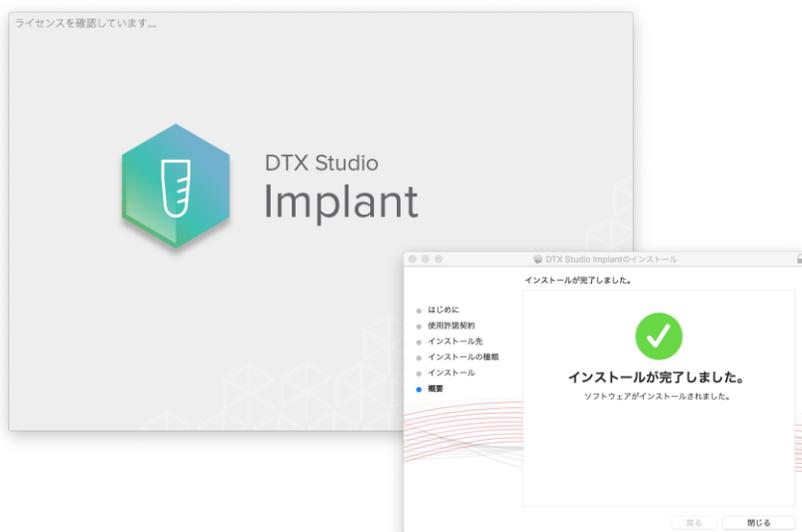

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



DTX Studio™ Implant

Install (Mac OS®)

新規およびバージョンアップ

9

Login画面に【ユーザーネーム】および【パスワード】を入力し、**【サインイン】**を左クリックします。

* 自動ログインにチェックを入れておくと、次回起動時に、【ユーザーネーム】および【パスワード】の入力を省略できます。



10

レジストレーションを完了します。
【完了】を左クリックします。



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Install (Mac OS®)



DTX Studio™ Implant

新規およびバージョンアップ


11

【IFU Language(言語)】を自動でダウンロードします。

【IFU】言語ファイルを自動ダウンロードします。

この操作には、数十分から数時間を要します。

ダウンロードが終了したら、インストール完了です。

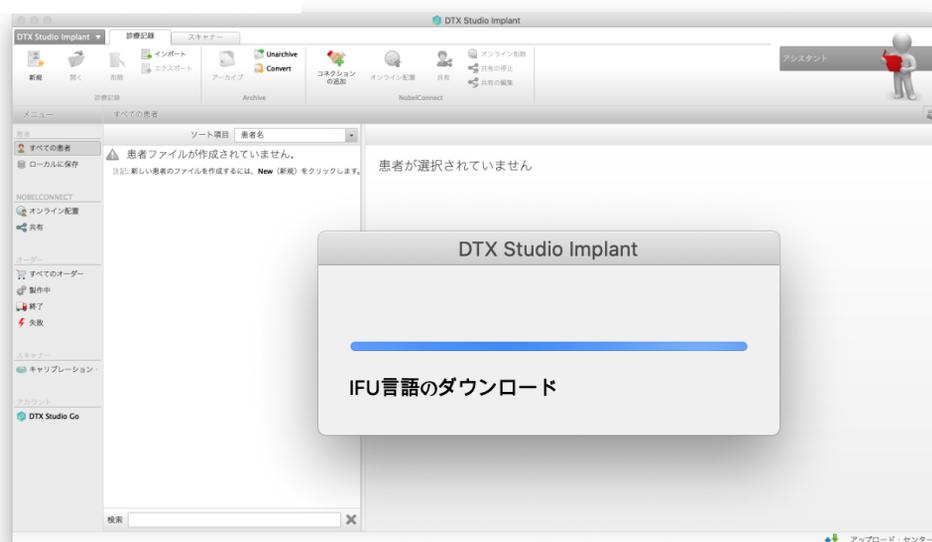


12

【Insutraction for Use(取扱説明書)】のウィンドウが立ち上がります。
Japaneseを選択します。



Japanese

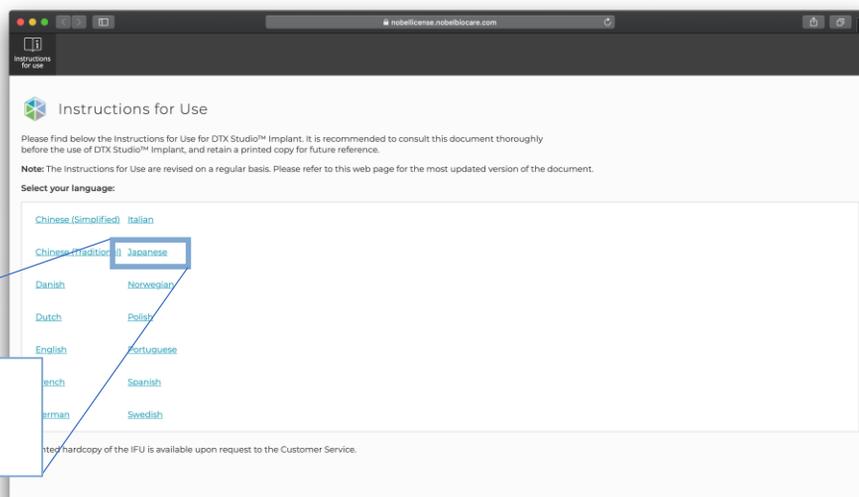

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.5.5



Install (Mac OS®)



DTX Studio™ Implant

新規およびバージョンアップ


13

取扱説明書のPDFが開きます。
必要に応じて、コンピュータに保存します。



14

インストールの完了。

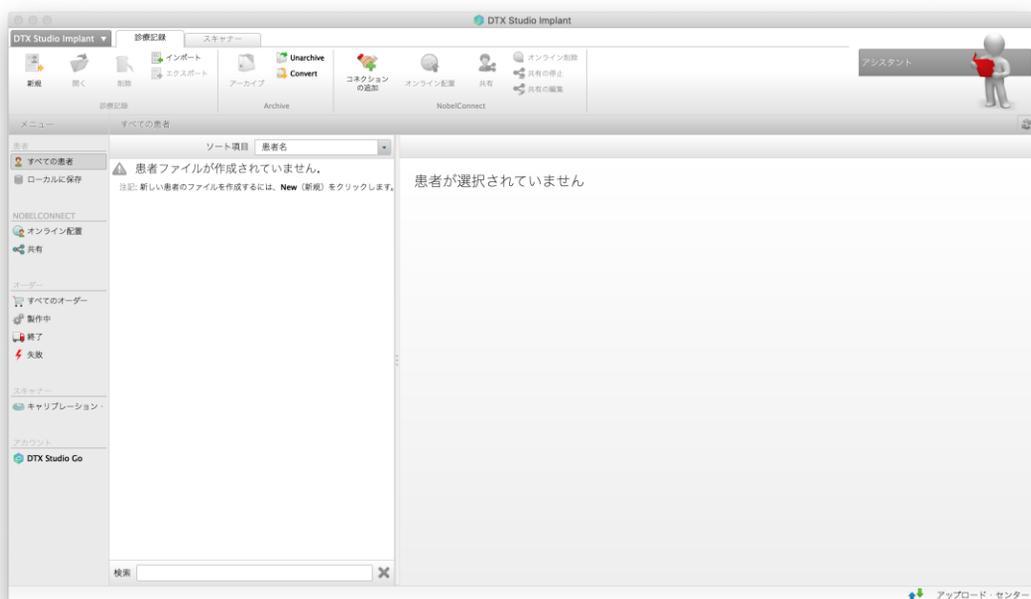

Contact Support

インストール方法やソフトウェア操作方法など
ご不明点などございましたら、以下までご連絡ください。

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

プロセラ・テクニカルサポート

TEL : 0120-432-118

営業時間 : 月～金 9時～20時 (土・日・祝日は除く)



Nobel Biocare DTX Studio™ Implant Version 3.5 Installation guide

©Nobel Biocare Japan K.K. All rights reserved.

MK407A 2101