



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2

DTX Studio™ Implant Version 3.5 からのアップデート



DTX Studio™ Implant



DTX Studio™ Go

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



Content

Introduction	03
Computer Guideline	04
About DTX Studio™ Go	06
DTX Studio™ Go Login	12
DTX Studio™ Implant Download	23
DTX Studio™ Implant Install (for Windows®)	28
DTX Studio™ Implant Install (for Mac-OS®)	36
Contact Support	44



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



Introduction

- ◆ ご使用のコンピュータースペックをご確認ください。
- ◆ インターネットに接続されている事をご確認ください。
- ◆ ラップトップ型コンピュータをご使用の場合、充電が十分に残っている事をご確認ください。
- ◆ コンピュータの日付及び時間設定が正しい事をご確認ください。
- ◆ ライセンス契約が終了している場合はバージョンアップが出来ません。
- ◆ Practice Setupライセンスユーザーは、現在ご使用になっている全てのソフトウェアバージョンを合わせる必要があります。
- ◆ Computer Guidelineに記載されていないOS (**Windows® & Mac OS®**) には、対応していません。
- ◆ インストールに必要なファイルは、**DTX Studio™ Go**からダウンロードしてください。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2 for Windows



Computer Guideline

Windows® 64-bit (Windows® 10)

Recommended requirements (推奨要件)

CPU : 最小条件

デュアルコアプロセッサ
3 GHz

RAM : メモリ

64bit 8GB 以上

Graphics card

ビデオメモリ1GB 以上
(4K/Retinaディスプレイは2GB以上)
OpenGL® (NVIDIA、AMDなど)
※Intelのグラフィックでは動作しません

Monitor : 解像度

推奨1920 X 1200 ※最小1920 X 1080
※4Kなどの大きな解像度では、表示は可能ですが文字が極端に小さくなってしまいます

Internet : 回線速度

ブロードバンドの回線が必要 推奨 アップロード3Mbps 以上、ダウンロード30Mbps以上

Disk space

患者様のデータは約250MB以上になります。
通常インストールに最低5GB、患者ファイル数に応じてそれ以上のディスクスペースが必要です。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2 for Mac



Computer Guideline MacOS® Catalina, MacOS® Big Sur

Recommended requirements (推奨要件)

Devices

iMac / Mac Pro / Mac Book Pro(15インチ以上)
*2011年以降にリリースされたモデルがサポートされています。

CPU : 最小条件

デュアルコアプロセッサ
3 GHz
(Apple M1 Chip(SoC)搭載のコンピュータは現在検証中のため、動作保証は致しかねます。)

RAM : メモリ

Mac OS X 8 GB 以上

Graphics card

ビデオメモリ1GB 以上
(4K/Retinaディスプレイは2GB以上)
OpenGL® (NVIDIA、AMDなど)
※Intelのグラフィックでは動作しません

Monitor : 解像度

推奨1920 X 1200 ※最小1920 X 1080
※4Kなどの大きな解像度では、表示は可能ですが文字が極端に小さくなってしまいます

Internet : 回線速度

ブロードバンドの回線が必要 推奨 アップロード3Mbps 以上、
ダウンロード30Mbps以上

Disk space

患者様のデータは約250MB以上になります。
通常インストールに最低5GB、患者ファイル数に応じて、それ以上のディスクスペースが必要です。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go



ライセンス情報管理ウェブサイト。

- ◆ オンラインプラットフォーム（ウェブサイト）にアクセスして、ソフトウェアのバージョン、サービス、およびご自身のライセンス情報についての詳細を確認することができます。
- ◆ 最新のソフトウェア・インストールファイルをご自身でダウンロードすることができるだけでなく、他の【DTX Studio™ Implant】や【DTX Studio™ Lab】ユーザーと接続し情報をシェアすることができます。
- ◆ ご自身のライセンスと接続している他のDTX Studio™ユーザーをご自身のDTX Studio™ Goの中で管理します。



DTX Studio™ Go

<https://go.dtxstudio.com/>

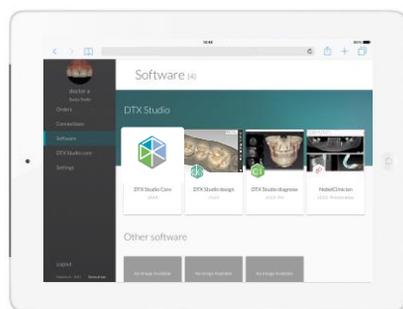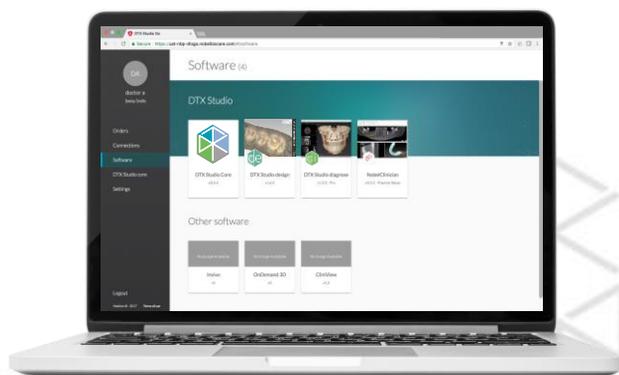

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go


ライセンス情報管理ウェブサイト – DTX Studio™ Go

DTX Studio™ suite

DTX Studio™ プラットフォーム

- DTX Studio™ suiteは3つのソフトウェアと1つのWeb Portalの総称です。
- DTX Studio™ suiteの4つの主要コンポーネント：
DTX Studio™ / Clinic (画像取得と診断) / Implant / Lab and Go
- DTX Studio™ Goは、DTX Studio™ ソフトウェアのライセンス管理を行います。

DTX Studio™ suite

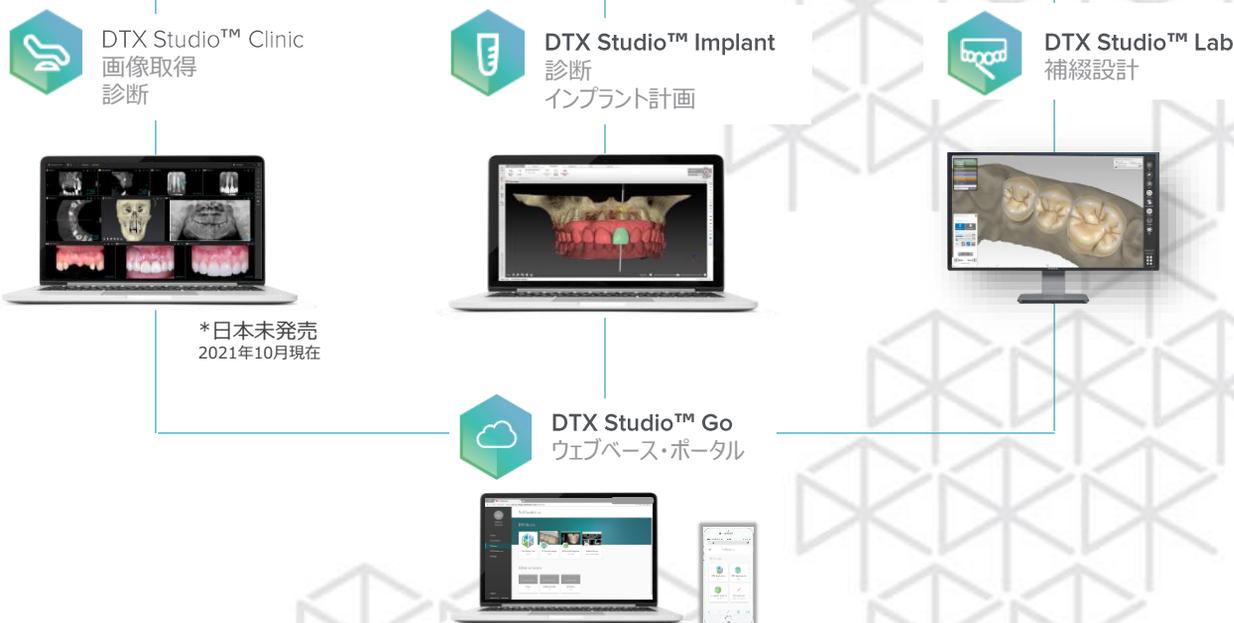

歯科医師 / 臨床医

歯科技工士

DSO/ 大規模歯科医院

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go で出来ること

オーダー確認

- ◆ NobelProcera®製品および、DTX Studio™ Implant・DTX Studio™ Lab における、ご自身の送受信履歴をいつでも確認することが可能です。
- ◆ IOSでスキャンしたデータを添付して、DTX Studio™ Labソフトウェアに直接オーダーリクエストを送信することが可能です。
※事前にラボとのDTXコネク트가必要です。
- ◆ 最新のソフトウェア・インストールファイルをご自身でダウンロードすることができるだけでなく、他のDTX Studio™ Implantや、DTX Studio™ Labユーザーと接続し情報をシェアする事ができます。
- ◆ ご自身のライセンスと接続している他のDTX Studio™ユーザーをご自身のDTX Studio™ Goの中で管理します。

No.	項目	量の番号	ステータス
1	TempShell 1 unit (CUSTV001)	11	処理済み

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go で出来ること

コネクト機能

- ◆ 弊社カスタマーサービスに依頼せず、他のDTX Studio™ユーザーと接続する事ができます
※双方の同意が必要です。
- ◆ 相手のDTX-IDを入力して新しい接続を追加します。
- ◆ ライセンス間で送受信されるデータの概要を確認することができます。

ID	日付	タイプ	ステータス
R14-151-632	8月20, 2021	テンプレート	Accepted
R12-114-097	8月20, 2021	LabDesign	Finished
R11-134-404	8月20, 2021	確認スキャン	Rejected
R12-114-095	8月19, 2021	LabDesign	Finished
R13-118-836	8月19, 2021	テンプレート	Finished
R11-134-074	7月19, 2021	確認スキャン	Finished
R14-149-181	7月05, 2021	テンプレート	Accepted
R14-149-156	7月02, 2021	テンプレート	Accepted
R14-148-945	6月18, 2021	テンプレート	Accepted
R14-148-942	6月18, 2021	テンプレート	Accepted
R13-118-504	6月17, 2021	テンプレート	Finished
R12-113-830	6月17, 2021	LabDesign	Finished
R11-133-750	6月17, 2021	確認スキャン	Result shared
R11-113-884	6月15, 2021	確認	Accepted

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go で出来ること

ソフトウェア管理

- ◆ 各種ソフトウェアのインストーラーをダウンロードする事ができるようになり、自身のライセンスのインストールキーを表示できます。
- ◆ ユーザー自身のライセンスへ他のユーザーを追加、または削除を実行することができます。
- ◆ 新しいPCにソフトを入れ直す際に、ご自身で旧PCに登録したライセンスを解除することができます。
- ◆ ユーザーご自身でインストールを実行することができます。

ソフトウェア製品	バージョン	インストール	DTX Studio Care
DTX Studio Implant 最新バージョン Win 3.6.3, Mac 3.6.3	3.6.3 - Practice Setup	(3/10)	常に有効
DTX Studio Lab 最新バージョン Win 1.11.8	Rental Open	(0/1)	常に有効
DTX Studio Lab 最新バージョン Win 1.12.2	1.12.2 - Rental Open	(2/1)	常に有効
DTX Studio Go	2.19	-	-

その他のダウンロード

DTX Studio Implant Viewer v2.6.3	インストールを取得
----------------------------------	---------------------------

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go で出来ること

設定

- ◆ ユーザーのプロフィール画像や、ロゴを追加することができます。
- ◆ ユーザーご自身でDTXの電子メールアドレス設定を変更することができます。
- ◆ 言語設定を行えます。




Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

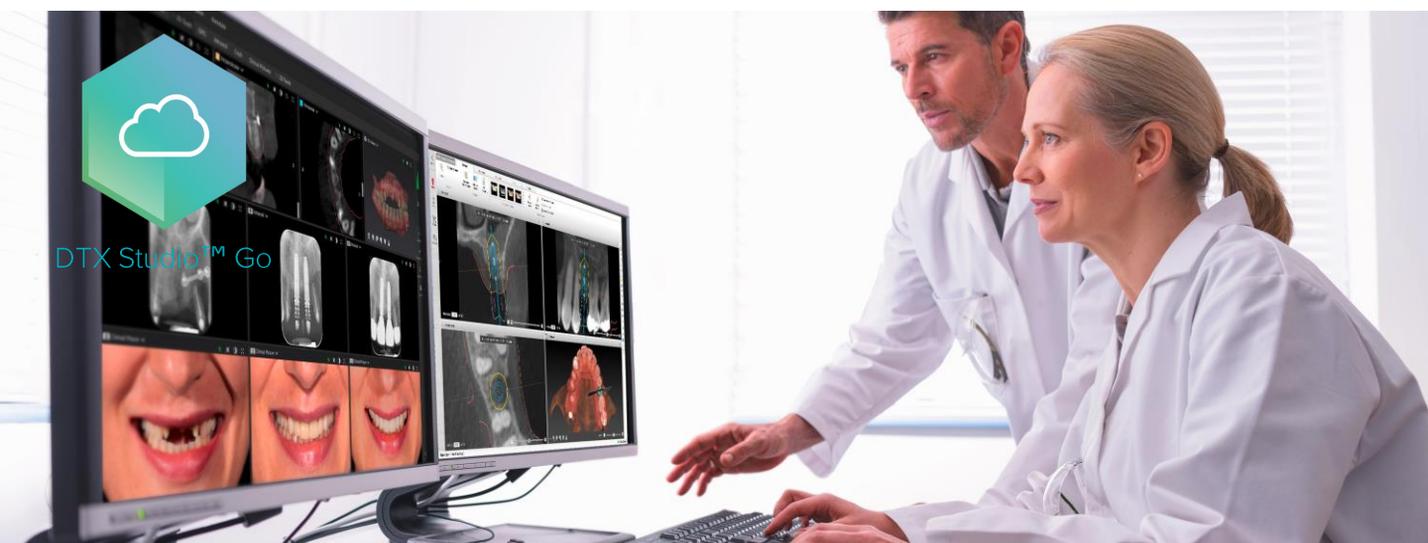

- ❖ <https://go.dtxstudio.com/> または、ソフトウェア内の【DTX Go】のリンクからログインし、必要に応じてパスワードを新しく設定してください。
Username、PasswordはDTX Studio™ Implantと同じになります。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

- 【DTX Studio™ Implant】を起動します。
- Menuから【DTX Studio Go】をクリックします。
- DTX Studio™ Goのログイン画面が開きます。
- Usernameの確認方法は次項を参照ください。

- * 【DTX Studio™ Go】では、大文字、小文字、数字、記号を含む10桁のパスワード設定を要求されます。
- * 【DTX Studio™ Implant】のパスワードも変更されます。

DTX Studio™ Implant トップ画面

The screenshot shows the DTX Studio Implant main interface. On the left sidebar, the 'アカウント' (Account) menu item is highlighted with a blue box, and a blue arrow points to the 'DTX Studio Go' option. On the right, the 'DTX Studio™ Go ログイン画面' (DTX Studio™ Go Login Screen) is shown, featuring the DTX Studio Go logo, fields for 'Username' and 'Password', a 'Keep me logged in' checkbox, and 'Forgot password?' and 'Log in' buttons.

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go


DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

【DTX Studio™ Implant】ユーザーネーム確認方法

- 【DTX Studio Implant】タブをクリックします。
- [アカウントの管理]を選択します。
- アカウント情報の[Username]をご参照ください。

DTX Studio™ Implant 画面

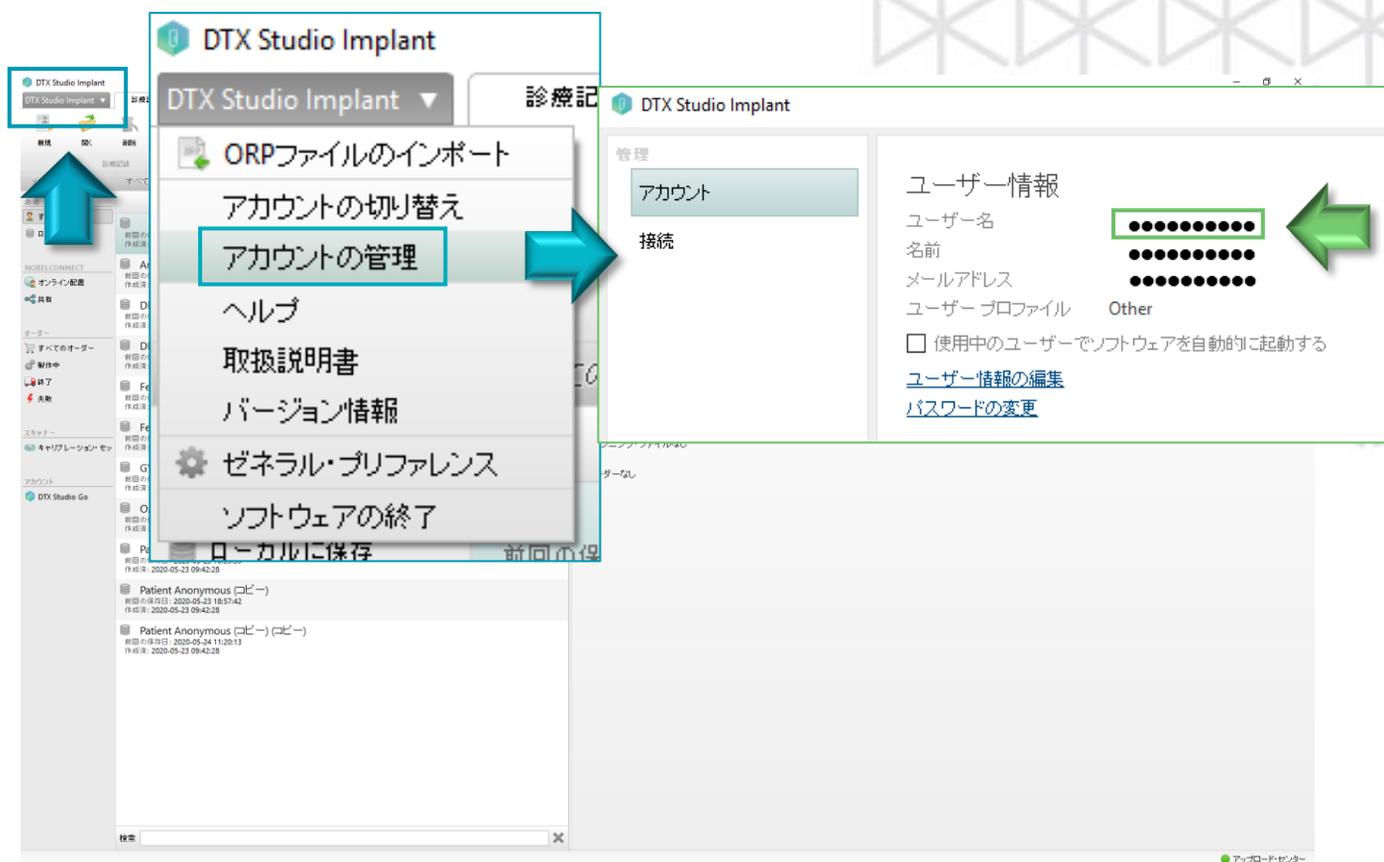

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

1

DTX Studio™ Implant を起動し、メニュー項目の**[DTX Studio Go]**をクリックします。

もしくは


<https://go.dtxstudio.com/>
へアクセスします。

2

ユーザー名及びパスワードを入力し、**[ログイン]**をクリックします。
ログインが成功したら、P23へ進みます

パスワードが分からない場合は、画面下の、【パスワードを忘れた場合】・【Forgot password】をクリックし、パスワードのリセットを行ってください。
* 次項を参照ください

【ログインしたままにする】にチェックを入れると、次回からログイン・ウィンドウは表示されません。

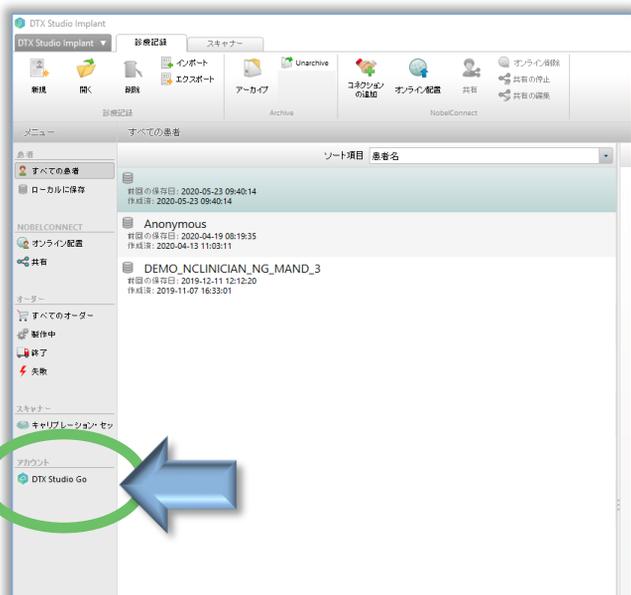

アカウント

 DTX Studio Go



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

Reset
1

[Forgot password?]をクリックします。

Reset
2

Usernameを入力し、[Reset password]をクリックします。

DTX Studio Go

Username

Password

Keep me logged in

Forgot password? Log in

DTX Studio Go

Enter your username and we will send you a link to reset your password.

Username

Reset password

Cancel

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

Reset
3

ご登録されたメールアドレスへ【**Reset Password**】のリンクが送信されます。
ご登録メールを確認してください。

DTX Studio
Go

ご登録されたメールアドレスが
表示されます

An email was sent to [redacted] containing a link
to reset your password.

Still can't login? Contact your local customer support.

[Back to login page](#)

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法



Reset
4

登録メールに下記メールが届きます。
パスワードのリセット[Reset password]
をクリックします。

Reset
5

パスワード設定してください。(10文字以上)
[Next]をクリックします。
DTX Studio™ Implantも同じパスワードを
使用します。

パスワードは少なくとも10文字で、大文字、小文字、数値、
特殊文字 (!、@、#、\$、%、^、&) を含む必要があります。

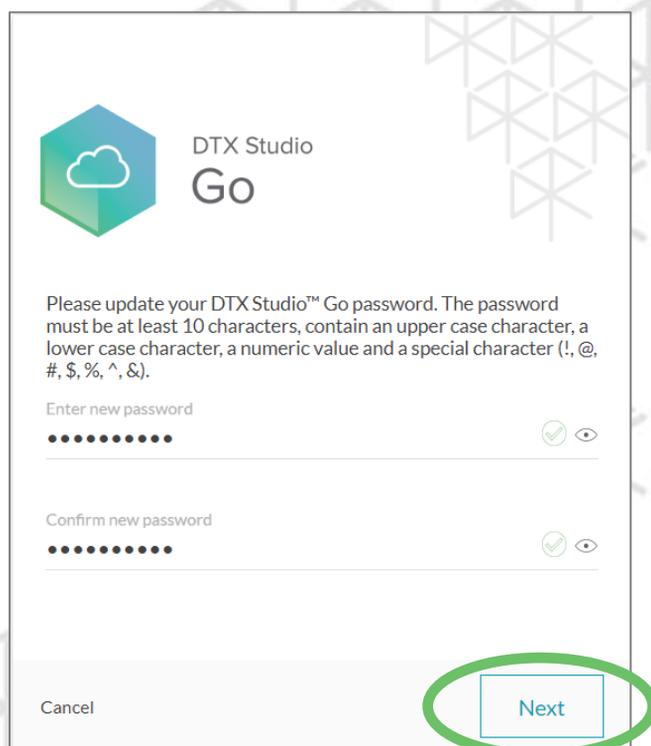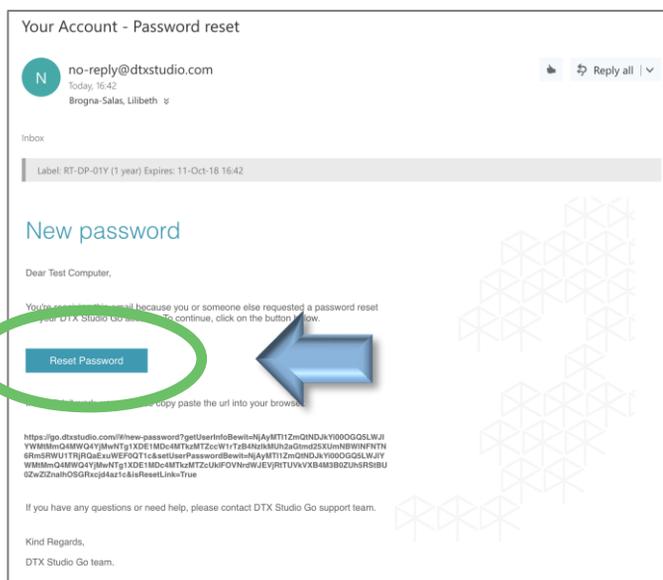

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go




DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go のログイン方法

Reset
6

「DTX Studio™ Go」が開きログイン完了です。

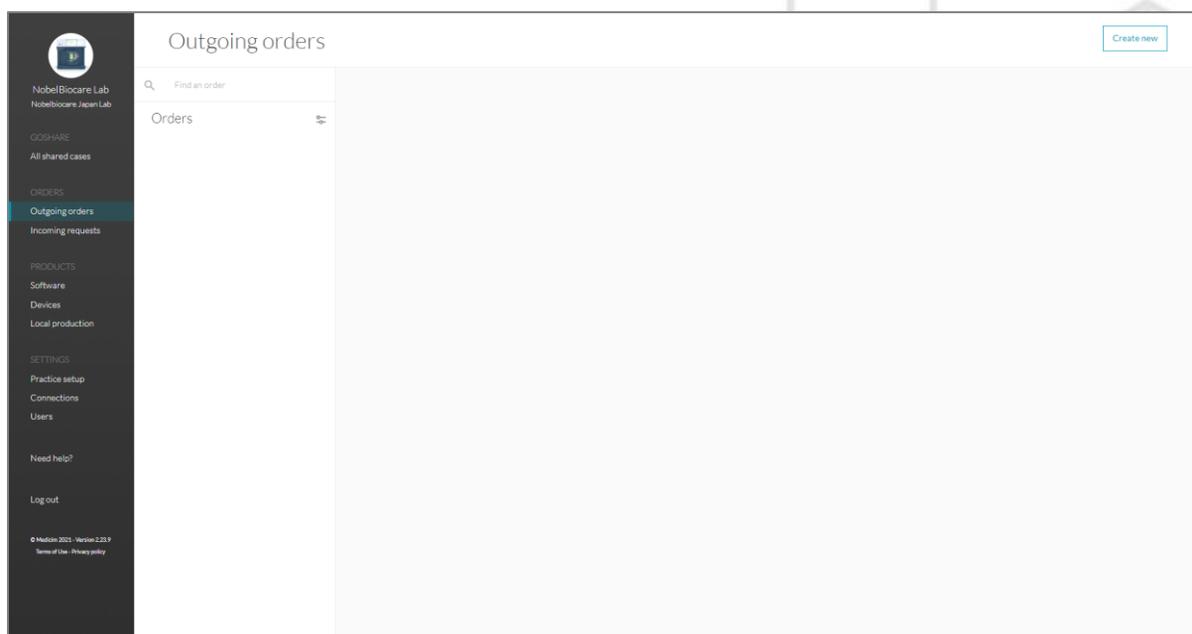

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go の言語設定

日本語に設定します

Setting 1

言語設定を行います。
メニューから【Practice setup】を選択します。
【Edit】をクリックし、編集画面にします。

Practice setup

My profile My account Billing Preferences My services

General information **Edit**

Profile picture **[Edit] をクリックします**

Remove picture

Security

Two-factor authentication

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go の言語設定

日本語に設定します

Setting 2

言語設定を行います。
【 Language 】の項をクリックします。
【日本語】(好みの言語)を選択します。
【Save】をクリックします。

General information

Username
Nobelbiocare.Lab

First name
NobelBiocare

Last name
Lab

Language
English

E-mail
●●●●●●●●●●●●●●●●

I would like to receive information about new products and updates from the Envista Operating Companies.

Cancel Save

English

Español

Français

Italiano

日本語

【Language】欄をクリックします

【日本語】をクリックします

【保存】します

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go の言語設定

日本語に設定します

Setting
3


言語設定の完了です。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Implant のダウンロード方法

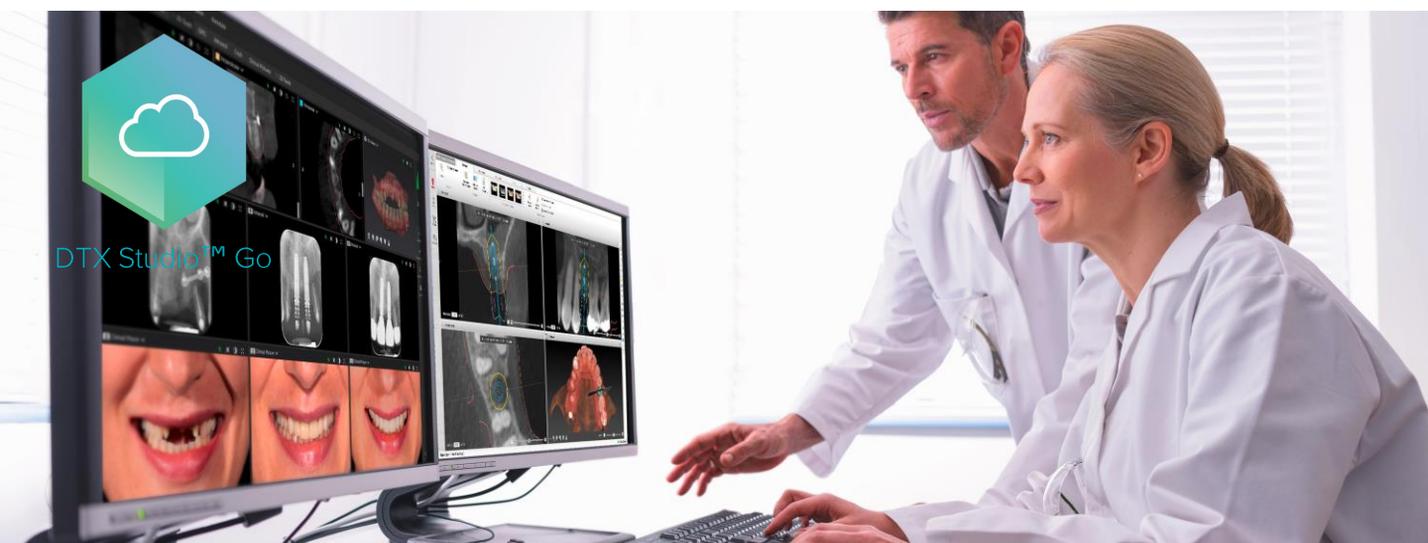

【 DTX Studio™ Implant 】をダウンロードします。

【 DTX Studio™ Go 】からインストールに必要なファイルをダウンロードします。

✦ DTX Studio™ Implant のインストーラーをダウンロードします。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Implant のダウンロード方法

インストールファイルをダウンロードする

1

DTX Studio™ Goの左側メニュー欄から【ソフトウェア】をクリックします。

DTX Studio™ Go 画面

ソフトウェア

マイ製品

ソフトウェア製品	バージョン	インストール	DTX Studio Core
DTX Studio Implant 最新バージョン Win 3.6.3.1/Win 3.6.3	3.6.3-Practice Setup	(3/10)	常に有効
DTX Studio Lab 最新バージョン Win 1.11.3	Rental Open	(0/1)	常に有効
DTX Studio Lab 最新バージョン Win 1.12.2	1.12.2-Rental Open	(2/1)	常に有効
DTX Studio Go	2.19	-	-

その他のダウンロード

DTX Studio Implant Viewer v3.6.3	インストールを数値
----------------------------------	-----------

【ソフトウェア】の表示件数は、お持ちのライセンスにより異なります

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Implant のダウンロード方法

インストールファイルをダウンロードする

2

DTX Studio Implant のアイコンにカーソルを合わせクリックします。
DTX Studio™ Implant Viewerのアイコンと似ていますので、ご注意ください。

DTX Studio™ Go 画面

ソフトウェア製品	バージョン	インストール	DTX Studio Go
DTX Studio Implant 最新バージョン: Win 3.6.3, Mac 3.6.3	3.6.3 - Practice Setup	(3/10)	常に有効
DTX Studio Lab 最新バージョン: Win 1.11.3	1.11.3 - Rental Open	(0/1)	常に有効
DTX Studio Lab 最新バージョン: Win 1.12.2	1.12.2 - Rental Open	(2/1)	常に有効
DTX Studio Go			

その他のダウンロード

DTX Studio Implant Viewer v3.6.3	インストールを取得
----------------------------------	-----------

メニューから【ソフトウェア】を選択後、対象のソフトウェアをクリックします。
ソフトウェア・ダウンロードページへ移ります。

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Go

DTX Studio™ Implant のダウンロード方法

インストールファイルをダウンロードする

4


ダウンロードしたファイルをコンピュータに保存します。

Windows® の場合

Web画面左下にダウンロードされます




ダウンロードされたファイルをPCに保存します。

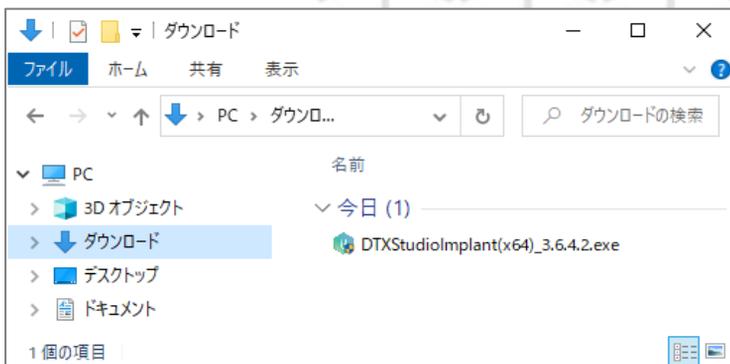


Mac OS® の場合

Web画面右上にダウンロードされます

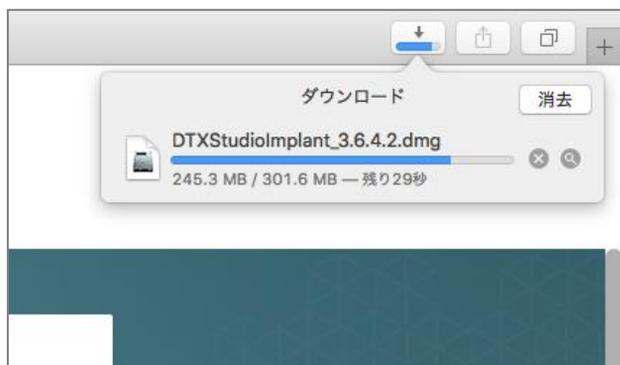

ダウンロードされたファイルをPCに保存します。

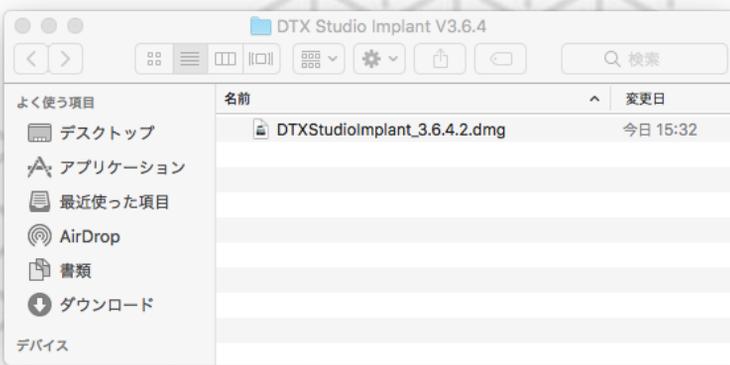


Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Impalnt

DTX Studio™ Implant のインストール方法

Windows®

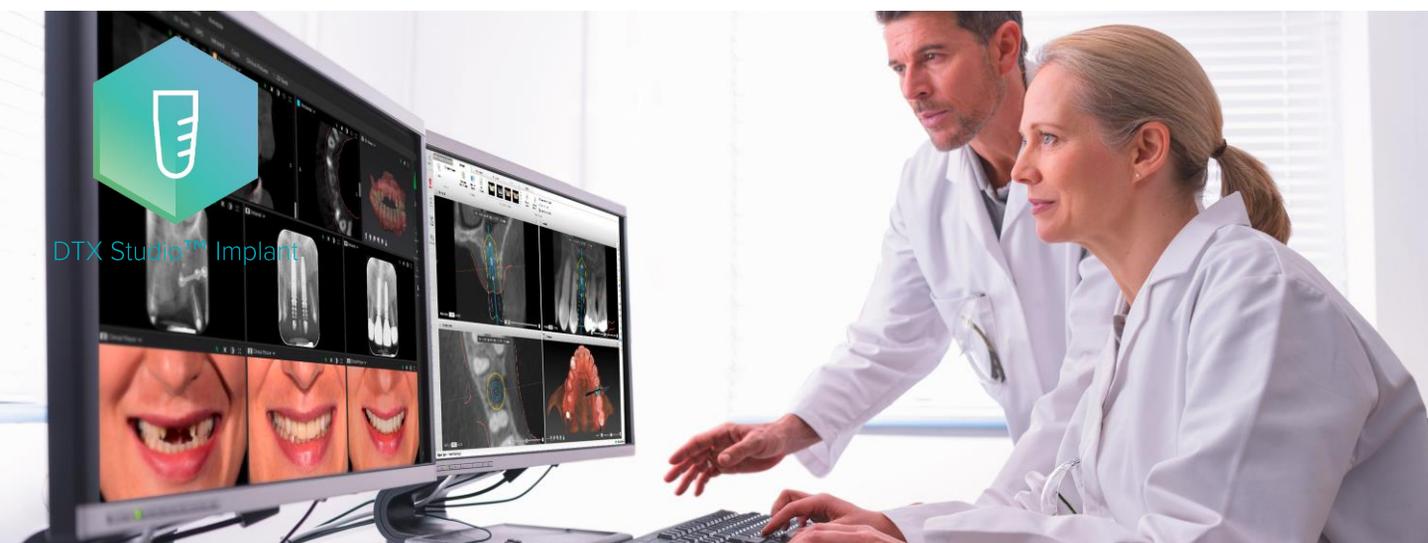

Windows®の場合

【DTX Studio™ Go】からダウンロードしたファイルをご用意ください。



DTXStudioImplant(x64)_3.6.4.2.exe
種類: アプリケーション

Windows用
インストール ファイル

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2




Install (Windows®)




DTX Studio™ Implant

1

コンピュータ上のアイコンを右クリックします。
管理者として実行をクリックします。

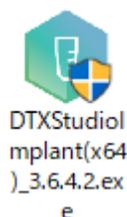


右クリックします。

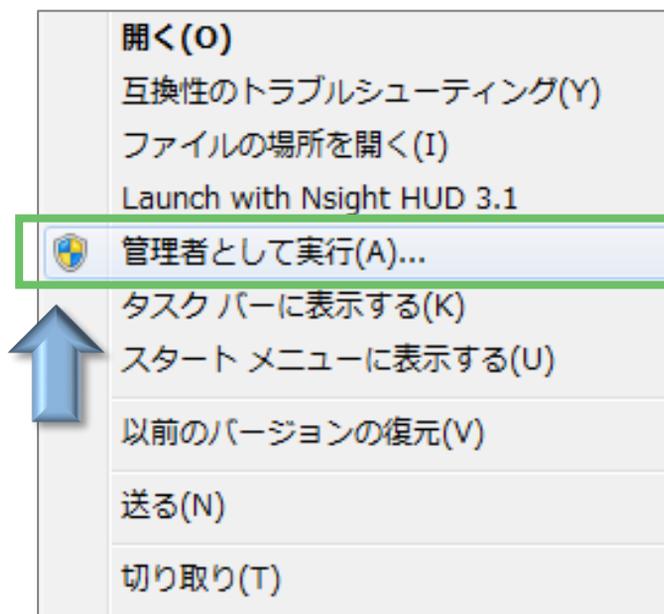

2

[Next]をクリックします。

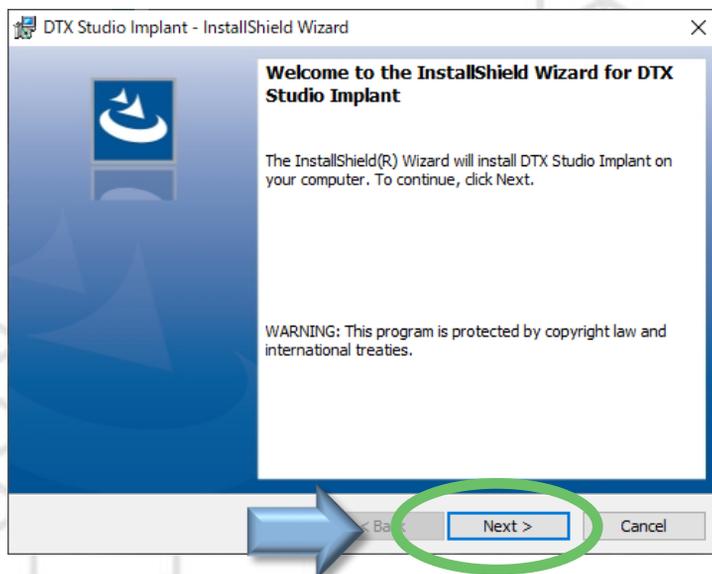

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



Install (Windows®)




DTX Studio™ Implant

3

エンドユーザー契約に同意して、
【Next】をクリックします。


【 I accept the term in the agreement 】
(上段)にチェックを入れ、
【Next】をクリックします。

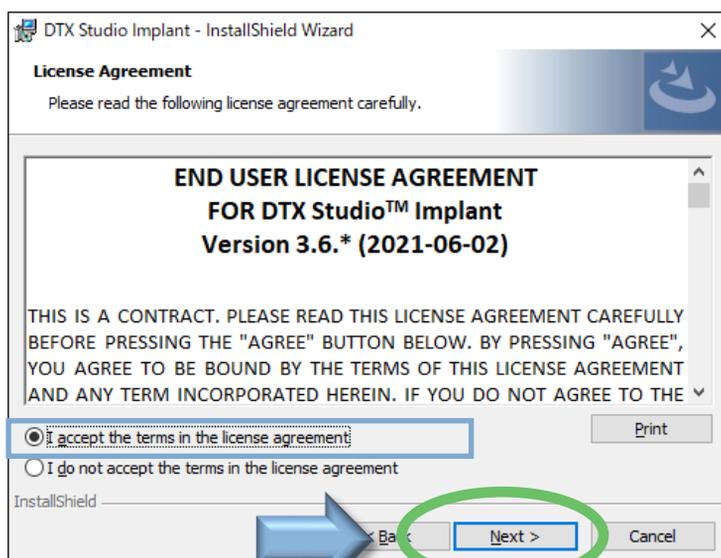

4

【Next】をクリックします。

プログラムファイルのインストール先を設定します。
C ¥ Program Filesにインストールしてください。
【Next】をクリックします。

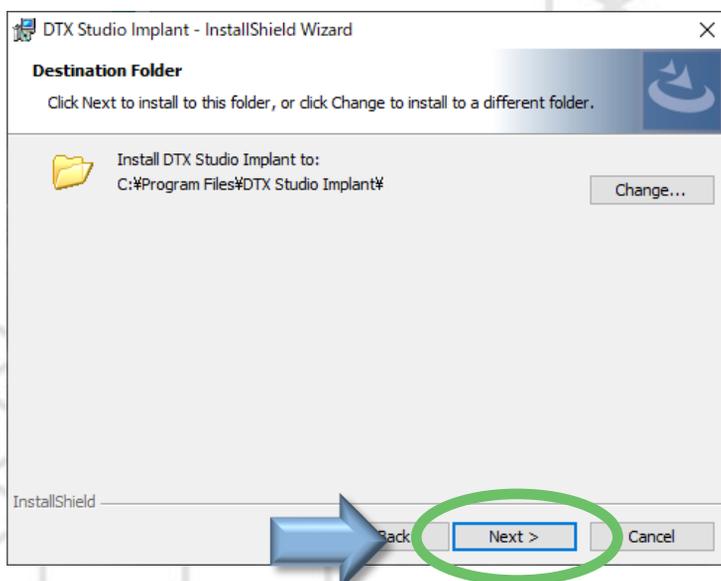

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



Install (Windows®)




DTX Studio™ Implant

5

【Install】をクリックします。


複数のファイルをインストールします。
インストール中はコンピュータの電源を切らない
よう、ご注意ください。

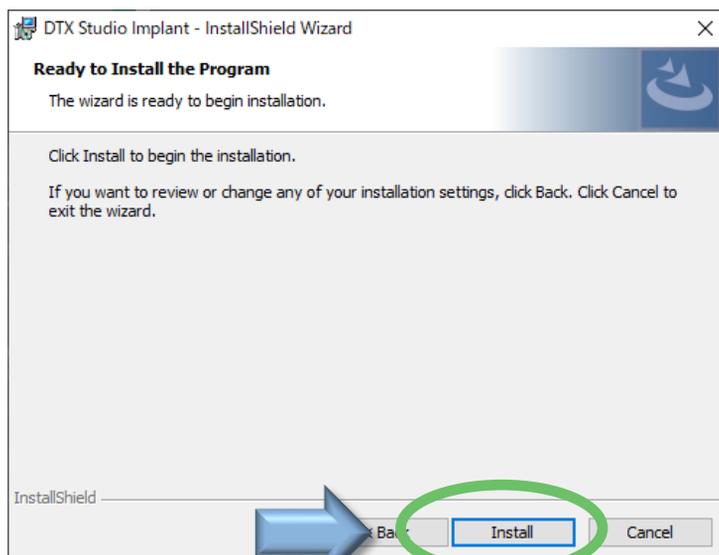

6

【Finish】をクリックします。

コンピュータへのインストールが完了。

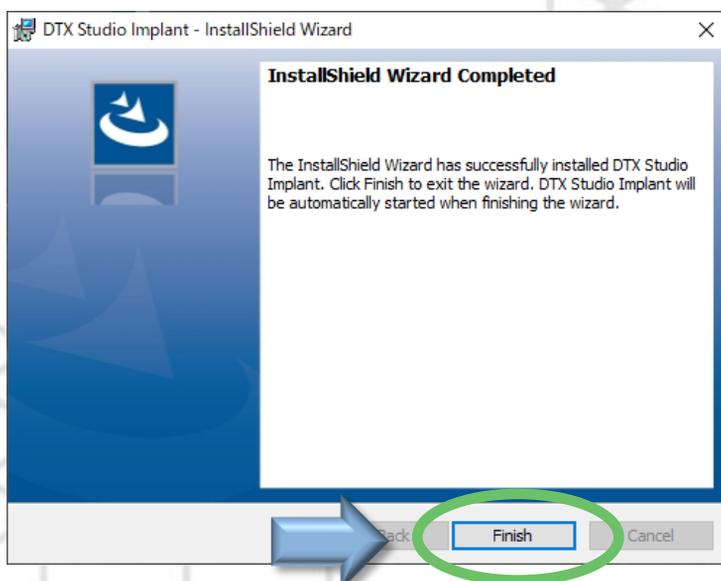

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Implant


Install (Windows®)

7 DTX Studio Implantが 起動します。


【IFU】言語ファイルの自動ダウンロード

この操作には、数十分から数時間を要します。

ダウンロードが終了したら、インストール完了です。

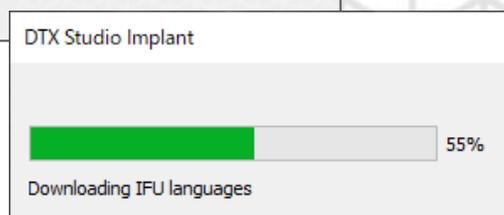

8 サインイン・ウィンドウが表示 されます。

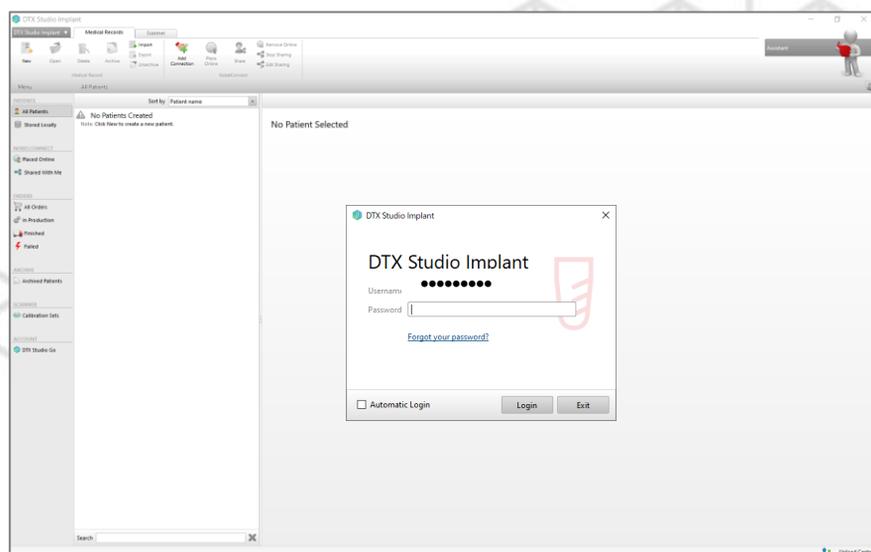

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Implant

Install (Windows®)

9 DTX Studio™ Implantのサインイン画面に、パスワードを入力し、【サインイン】をクリックします

DTX Studio™ Implantのログイン画面にパスワードを入力します。


パスワードは、DTX Studio™ Goで設定したものと同一になります。

* 【自動ログイン】・【Automatic Login】にチェックを入れておくと、次回起動時に、【パスワード】の入力を省略できます。



10 エンドユーザー契約に同意して、【次へ】をクリックします。

【ライセンス規約の条項に同意します】(上段)にチェックを入れ、【Next】をクリックします。

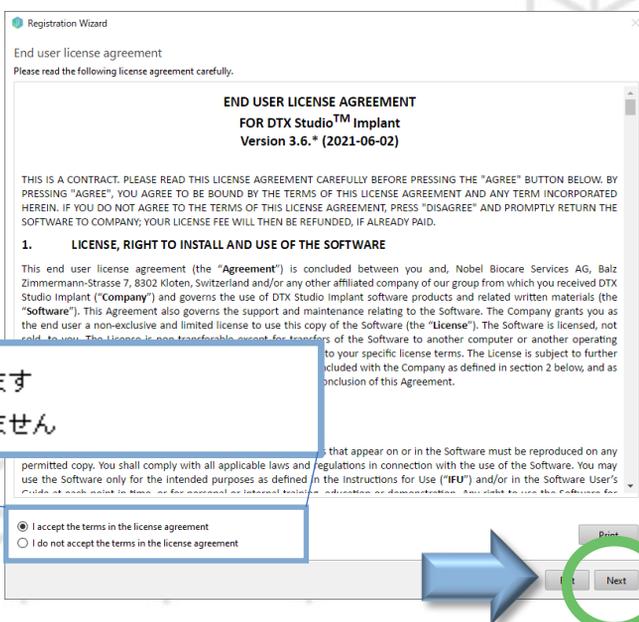

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2




DTX Studio™ Implant

Install (Windows®)


11

【Insutraction for Use(取扱説明書)】の
ウィンドウが立ち上がります。
Japaneseを選択します。

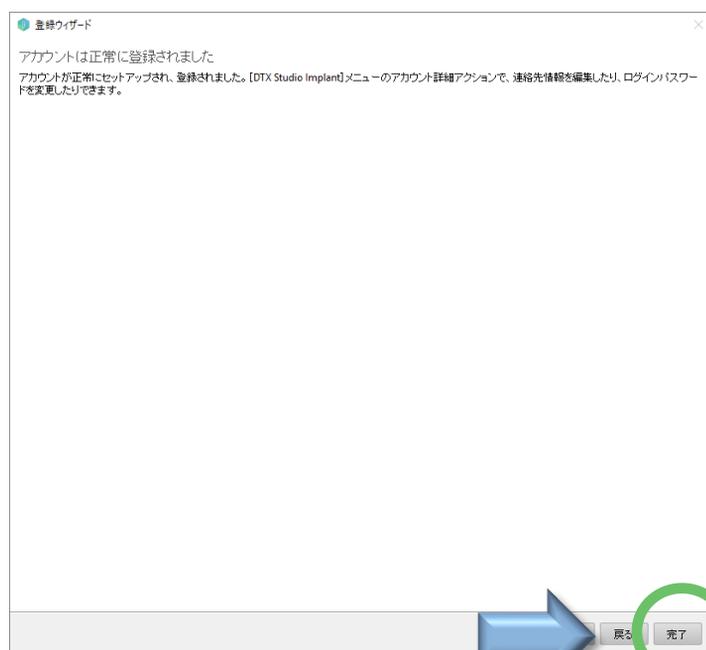

12

【IFU】言語ファイルを自動ダウンロード

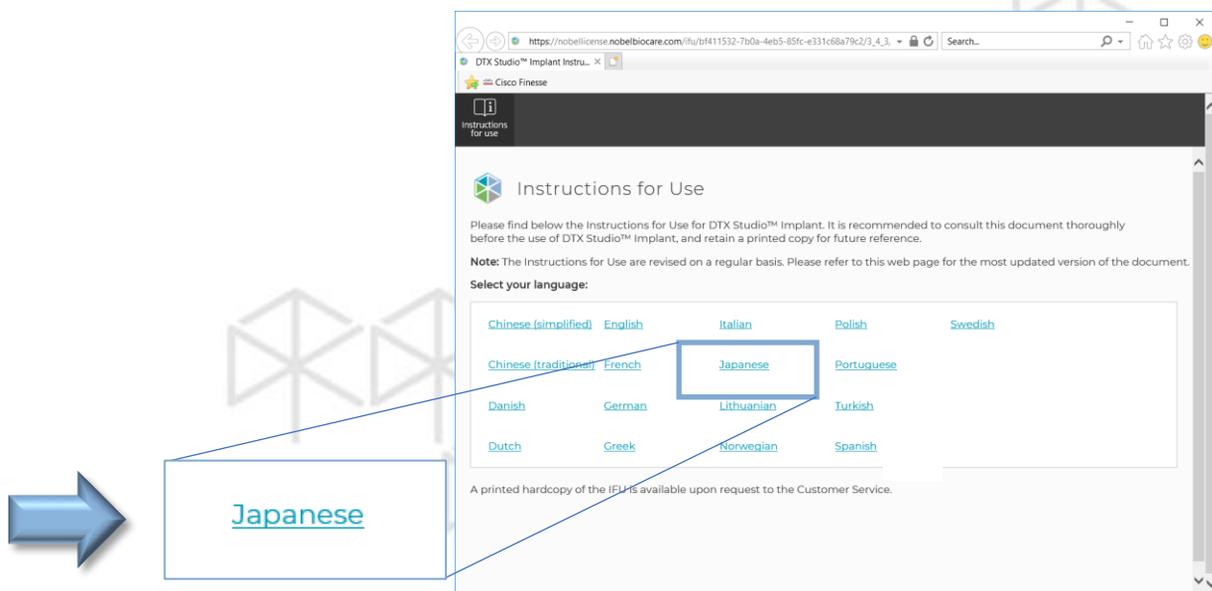

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Implant

Install (Windows®)


13

取扱説明書のPDFが開きます。
必要に応じて、コンピュータに保存します。



14

インストールの完了

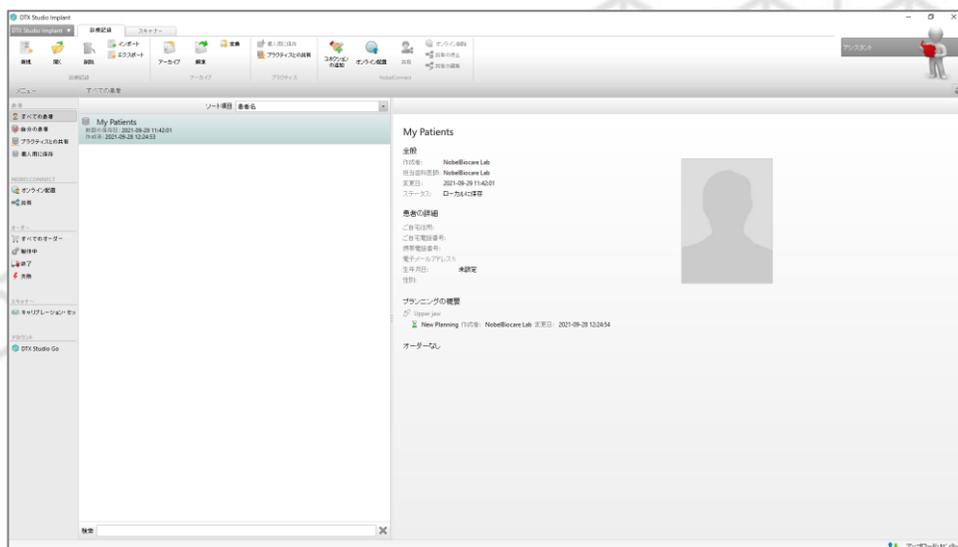


Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Implant

DTX Studio™ Implant のインストール方法

Mac OS®

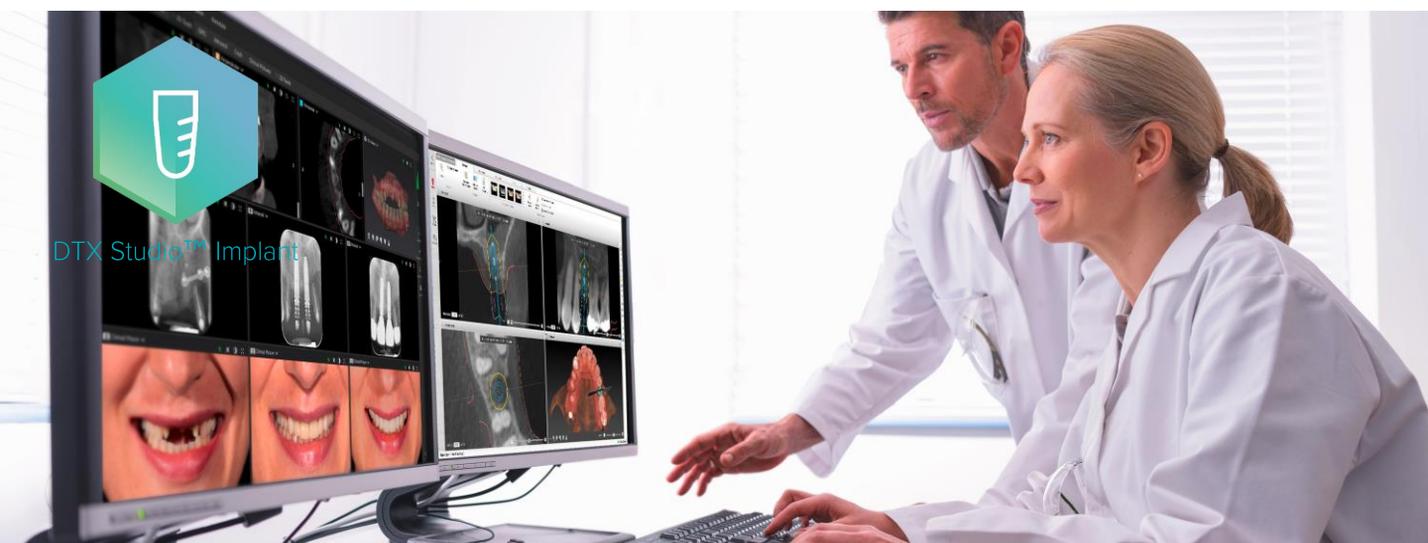

Mac OS® の場合

【DTX Studio™ Go】からダウンロードしたファイルをご用意ください。



DTXStudioImplant
_3.6.4.2.dmg

DTXStudioImplant_3.6.4.2.dmg

Mac-OS 用
インストール ファイル

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



Install (Mac OS®)



DTX Studio™ Implant


1

コンピュータ上のアイコンを**W**クリックします。
続けて、インストール画面の、DTX Studio
Implantを**W**クリックします。




DTXStudioImplant
_3.6.4.2.dmg

アイコンを**W**クリックします。

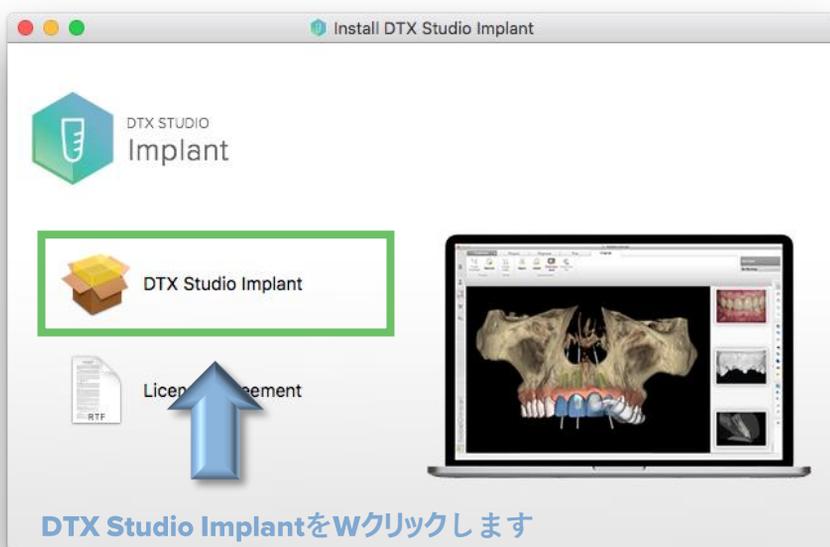

2

[続ける]をクリックします。

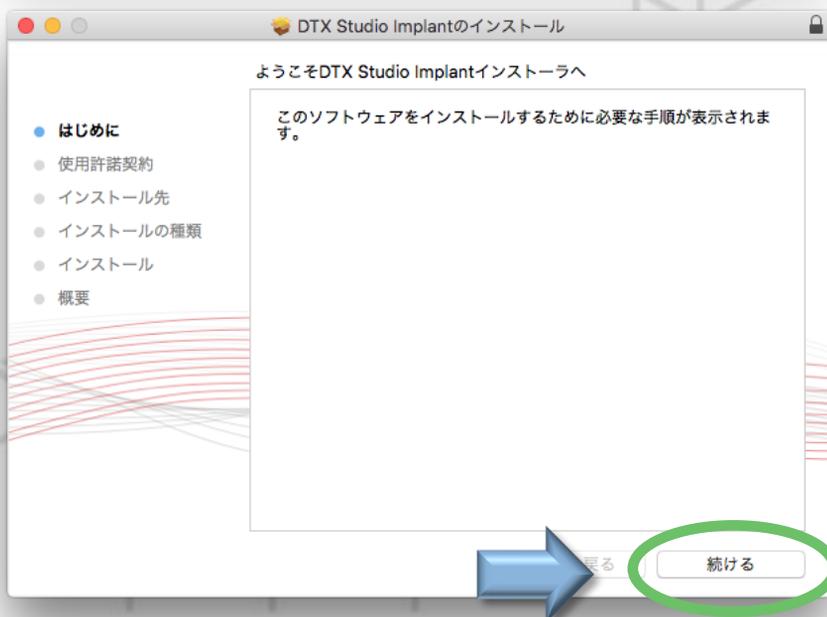

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2




DTX Studio™ Implant

Install (Mac OS®)

3

[続ける]をクリックします。

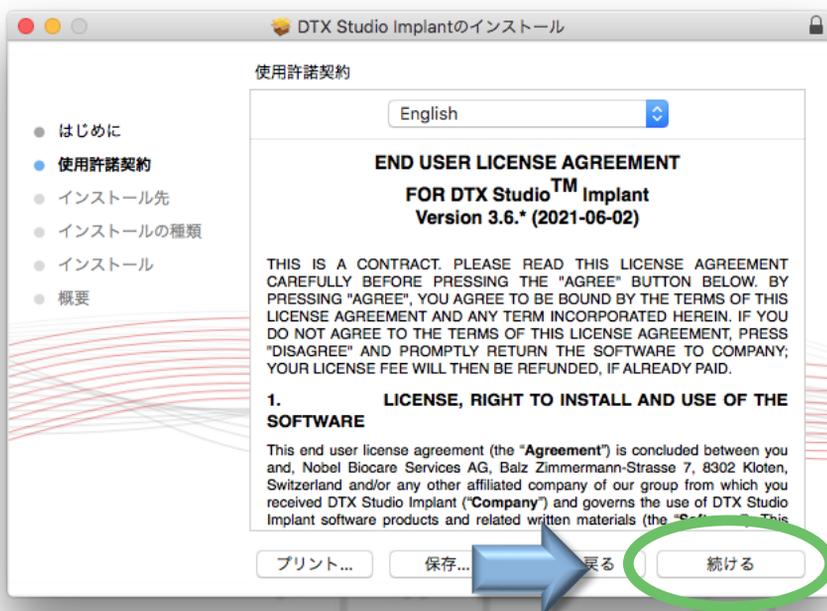

4

[同意する]をクリックします。



Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



Install (Mac OS®)




DTX Studio™ Implant

5

【インストール】をクリックしてインストール開始します。

インストール先を設定します。
Macintosh HDにインストールされます。

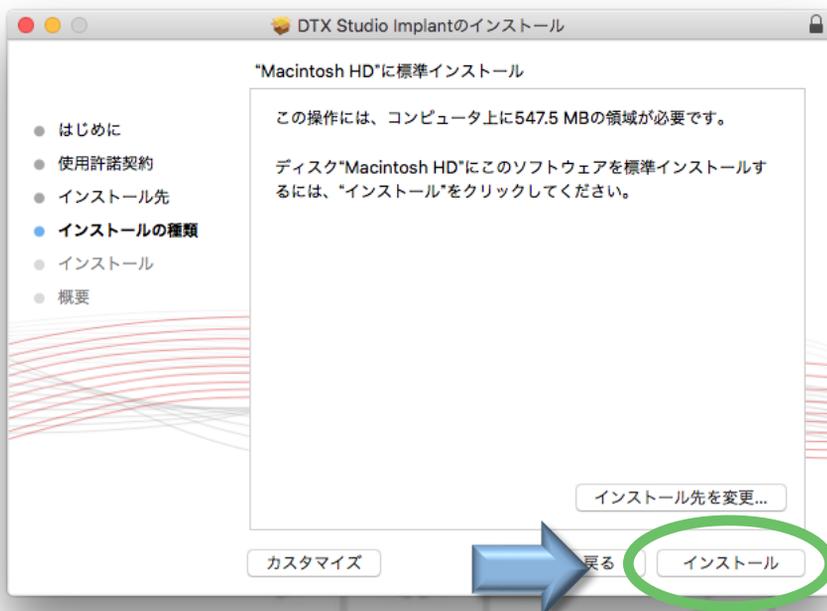


6

【パスワード】を入力し、【ソフトウェアをインストール】をクリックします。

パスワードの入力を求められます。
このパスワードは、Mac OSに設定されたパスワードを入力してください。

MacOSにパスワードを設定していない場合は、空欄で進みます。

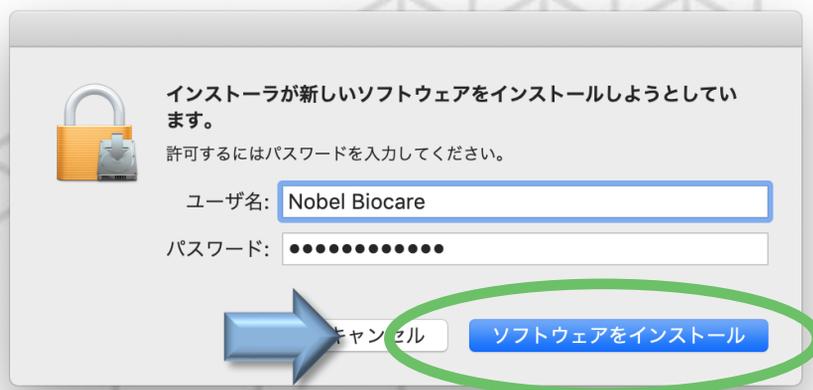

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2




DTX Studio™ Implant

Install (Mac OS®)

7

インストールが進行します。

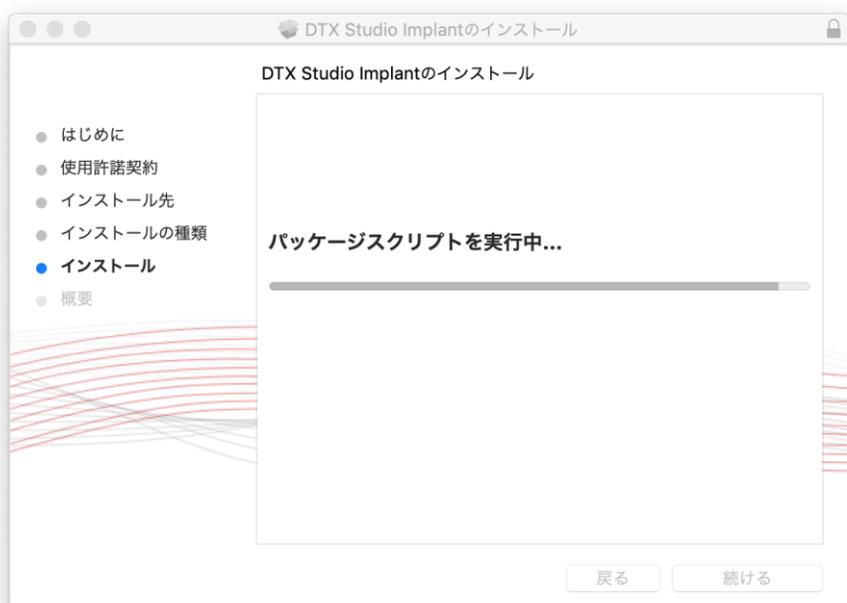


8

インストールの完了

インストールウィザードを閉じます。
DTX Studio™ Implant が自動で起動します。

【IFU】言語ファイルを自動ダウンロードします。
この操作には、数十分から数時間を要します。
ダウンロードが終了したら、インストール完了
です。

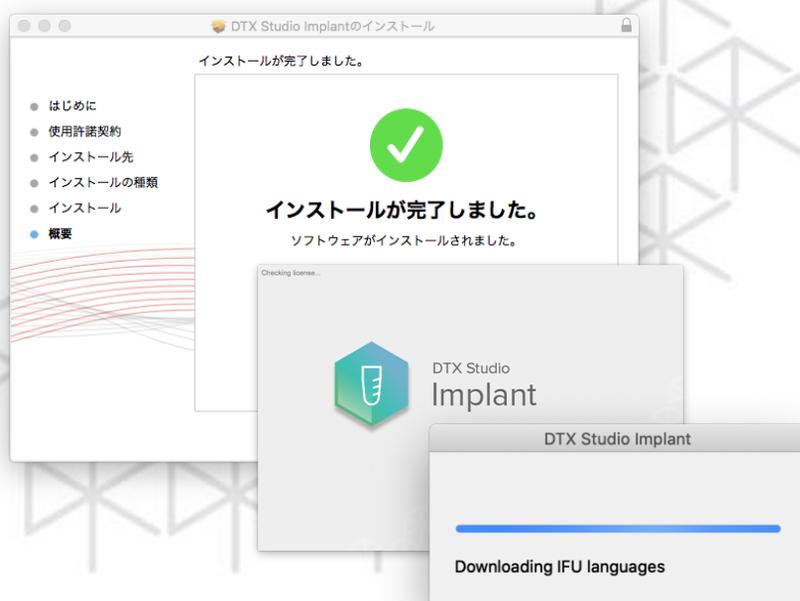

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Implant

Install (Mac OS®)

9

Login画面に【ユーザーネーム】および【パスワード】を入力し、【サインイン】をクリックします。

DTX Studio™ Implantのログイン画面にパスワードを入力します。

ユーザーネームとパスワードは、DTX Studio™ Goで設定したものと同一になります。


* 【自動ログイン】・【Automatic Login】にチェックを入れておくと、次回起動時に、【パスワード】の入力を省略できます。



10

エンドユーザー契約に同意して、【Next】をクリックします。

【ライセンス規約の条項に同意します】(上段)にチェックを入れ、【Next】をクリックします。

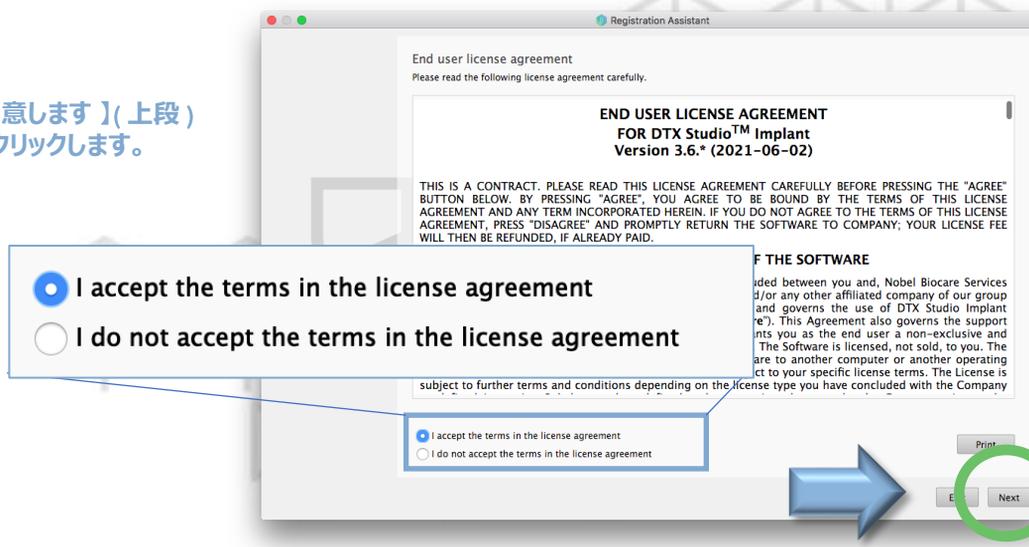

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2




Install (Mac OS®)



DTX Studio™ Implant

11


レジストレーションを完了します。
【Finish】をクリックします。

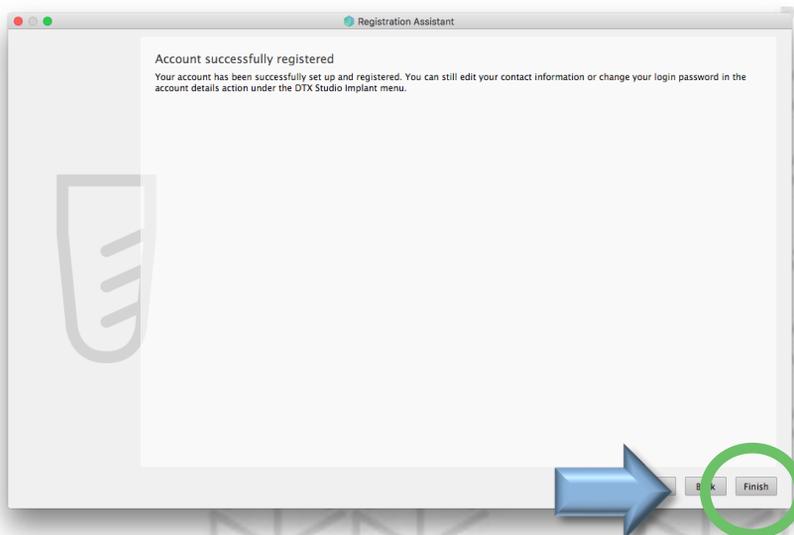

12

【Instruction for Use(取扱説明書)】のウィンドウが立ち上がります。
Japaneseを選択します。

Japanese

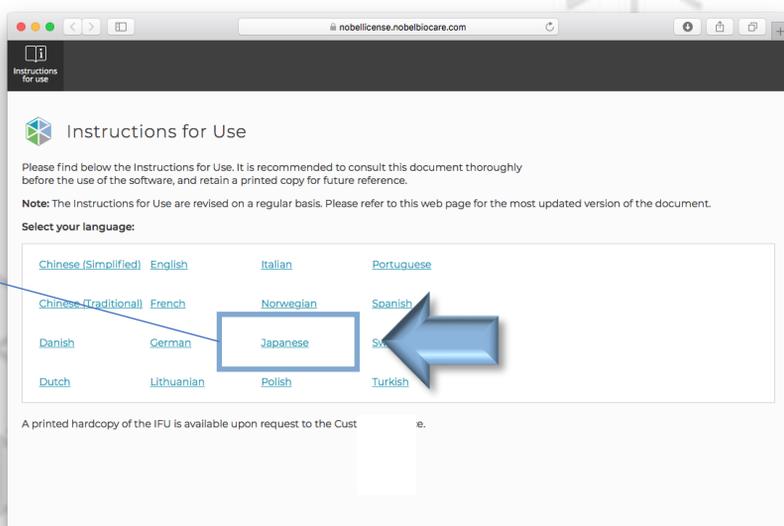

Installation guide for DTX Studio™ Implant 3.6.4.2



DTX Studio™ Implant

Install (Mac OS®)


13

取扱説明書のPDFが開きます。
必要に応じて、コンピュータに保存します。



14

DTX Studio implantが起動し、新しい製品ライブラリーをダウンロードします。
ダウンロード状況は、【Upload center】から確認が可能です。

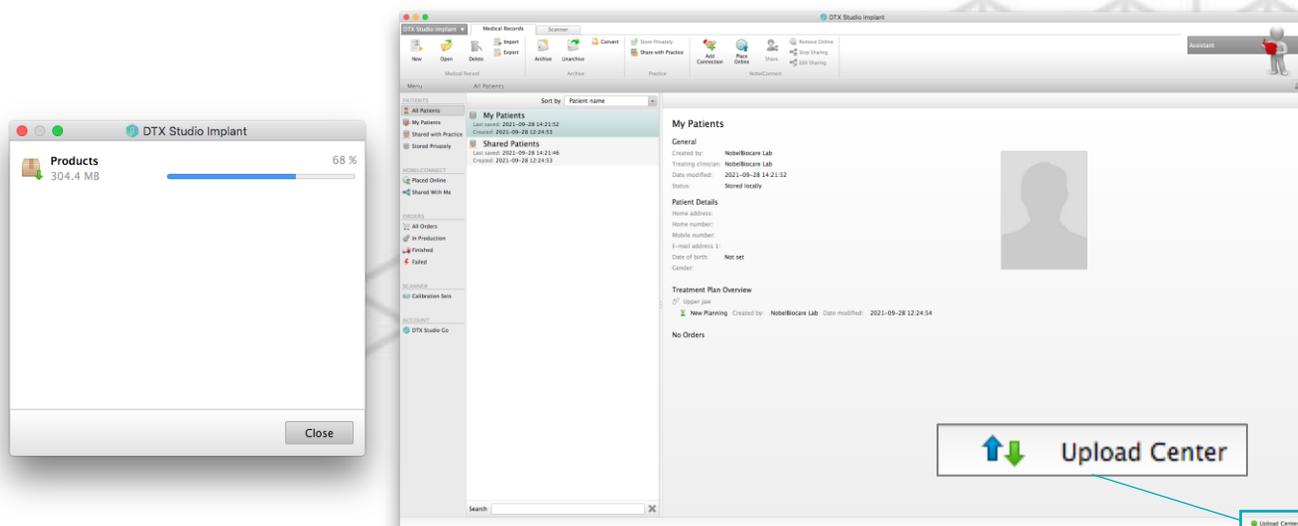

Contact Support

インストール方法やソフトウェア操作方法など
ご不明点などございましたら、下記までお問い合わせください。

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

プロセラ・テクニカルサポート

TEL : 0120-432-118

営業時間 : 月～金 9時～20時 (土・日・祝日は除く)



Nobel Biocare DTX Studio™ Implant Version 3.6.4.2 Installation guide

©Nobel Biocare Japan K.K. All rights reserved.

MK471 2111